

	FICHA TÉCNICA	Fecha de actualización: 25/02/22
	Extensión para Venoclisis	Technical Specifications Especificaciones Técnicas

MARCA: Global Healthcare.

DESCRIPCIÓN: Dispositivo médico de uso único, utilizado para la administración de soluciones intravenosas que fluyen desde una bolsa, frasco o contenedor al sistema vascular del paciente por medio de una aguja o un catéter introducido en una vena.

CARACTERÍSTICAS: Fabricada con PVC grado médico, libre de pirógenos, libre de látex con conectores luer lock, con una capacidad aproximada de 5mL y dispositivo de cierre "Clamp", Estéril OE.

COMPOSICIÓN:

Tubo de extensión	PVC grado medico	40" (101cm).
Conectores Clamp	resina 100%	Luer Lock

PRESENTACIÓN COMERCIAL: Empaque unitario, 100 unidades en caja de cartón corrugado (4 Bolsas por 25 Unidades). El empaque individual asegura la esterilidad del equipo.

Ítem	Descripción	Empaque	Códigos de Barras	N° de Registro Invima
81-020	Extensión para Venoclisis 101 cm. Estéril OE	100und/caja	Unidad: 872237006960 Corrugado: 40872237006968	2017DM-0001179 R1 Vigente 15 Sep 2027. Riesgo: IIA

TIPO DE CONSERVACIÓN: Almacenar en ambiente seco, evitar la luz solar directa, temperaturas extremas y gran humedad.

TIPO DE TRATAMIENTO: Para administración de soluciones intravenosas que fluyen desde una bolsa, frasco o contenedor al sistema vascular del paciente por medio de una aguja o un catéter introducido en una vena.

INDICACIONES: Es un equipo utilizado para alargar la distancia entre el catéter venoso y la solución a administrar. También se utiliza para adaptar el sistema de presión y lavado en las líneas arteriales que permiten el control de la tensión arterial en forma invasiva. Debe asegurarse su uso en forma aséptica especialmente en las conexiones de los puertos de los catéteres para mantener libre de gérmenes y evitar así la infección asociada a dispositivos intravasculares. Una vez utilizadas deben mantenerse permeables y limpias también con el fin de evitar contaminación u obstrucción de las vías y catéteres. La frecuencia de cambio en cada paciente depende de la normativa de cada institución para el manejo de dispositivos intravasculares. Después del uso con cada paciente deben ser desechadas según protocolo institucional para manejo de dispositivos médicos.

CONTRAINDICACIONES:

1. El DEHP en la endocrinología reproductiva humana tiene cierta toxicidad.
2. Daño a la salud humana y mujeres embarazadas, lactantes no deben usar medicamentos de infusión.
3. Este producto no puede ser empleado y almacenado con fármacos lipofílicos, como lo es el Propofol, entre otros, debido a que cambia la naturalidad del compuesto del que está fabricado el material, tanto en los conectores como la extensión.
4. No puede estar con 3-cloro-acetaldehído y otros medicamentos incompatibles usados juntos.

PRECAUCIONES:

1. No usar ningún equipo / instrumento motorizado, como podría ser una bomba de infusión y/o impulsador que cambie la presión operacional dentro de la Extensión de Anestesia.
2. No sobre presionar el conector distal (Conector Luer Lock).
3. Use técnica aséptica.
4. No emplear medios de contraste a través de la extensión debido a que puede llegar a generar fugas o ruptura entre los conectores y la extensión debido al alto grado de reactividad del líquido.
5. Mantener el dispositivo libre de alcohol, ya que puede afectar el sello entre los conectores y la extensión.
6. Almacenar en ambiente seco, evitar la luz solar directa, temperaturas extremas y gran humedad.
7. Reemplazar por guías CDC y/o por políticas del hospital.
8. No permita que quede aire atrapado en el set.
9. No usar con sangre o componentes sanguíneos.

	FICHA TÉCNICA	Fecha de actualización: 25/02/22
	Extensión para Venoclisis	Technical Specifications Especificaciones Técnicas

VIDA ÚTIL: 5 años.

PRECAUCIONES: Use técnica aséptica. No permita que el aire quede atrapado en el set. No usar con sangre o componentes sanguíneos. No usar medios de contraste.

OBSERVACIONES: Producto para uso único, deséchelo después de usarlo, reemplazar el equipo cada 24 horas como máximo, no utilice este producto si el empaque está roto o dañado.

**EXTENSIÓN PARA
VENOCLISIS**



Si requiere de información adicional,
puede contactarnos en: Colombia:
ghc-colombia@globalhealthcare.net
Sitio web:
www.globalhealthcare.net