

Máscara de Traqueostomía

REF 63-410



REGISTRO INVIMA CLASE

2020DM-0021939
Clase: IIA

CÓDIGO DE BARRAS CASE



40872237009051



EMPAQUE

(50) Und / Corrugado

Presentación en bolsa
en empaque individual.



Vida Útil de 5 años

Si se almacena de acuerdo a
recomendación del fabricante

Descripción

MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMÍA

Dispositivo médico desechable de uso único utilizado para la administración de Oxigenoterapia y Aerosolterapia en pacientes con vía aérea artificial tipo traqueostomía en forma segura y consistente. Disponible para paciente adulto, niño e infante.


Indicaciones de uso

- Dispositivo utilizado para la administración de oxígeno húmedo a los pacientes con traqueostomía conectado a un sistema Venturi.
- Permite la administración de oxígeno en forma de aerosol a través de la conexión de un humidificador tipo Jet o nebulizador de alto volumen.
- Para la administración de medicamentos a través de la cánula de traqueostomía conectada a un micronebulizador.

Características

- La máscara de traqueostomía está anatómicamente diseñada para un solo uso, es de color transparente uniforme que permite monitorizar la vía aérea del paciente para asegurar su permeabilidad y estado en forma continua.
- Su estructura está elaborada en material suave que al entrar en contacto con la piel del paciente no produce lesiones ni irritaciones haciéndola muy cómoda durante su uso.
- El borde de la máscara tiene un diseño seguro y confortable que protege la piel del paciente de lesiones por presión durante su uso continuo.
- El conector de oxígeno giratorio 360° es de diámetro universal de 22 mm haciéndola práctica y versátil, adaptable a cualquier sistema de oxígeno y aerosolterapia.
- La base del conector tiene un orificio que permite la liberación del aire exhalado.
- El elástico con puntas protegidas es ajustable según las características físicas del paciente con un sistema de broche lateral para facilitar la adaptación y liberación del paciente en forma cómoda, rápida y segura.
- Permite completa movilidad sin riesgos de desconexión, daño, ni tracción sobre la tráquea y un acceso al paciente desde cualquier frente.

Producto y estructura

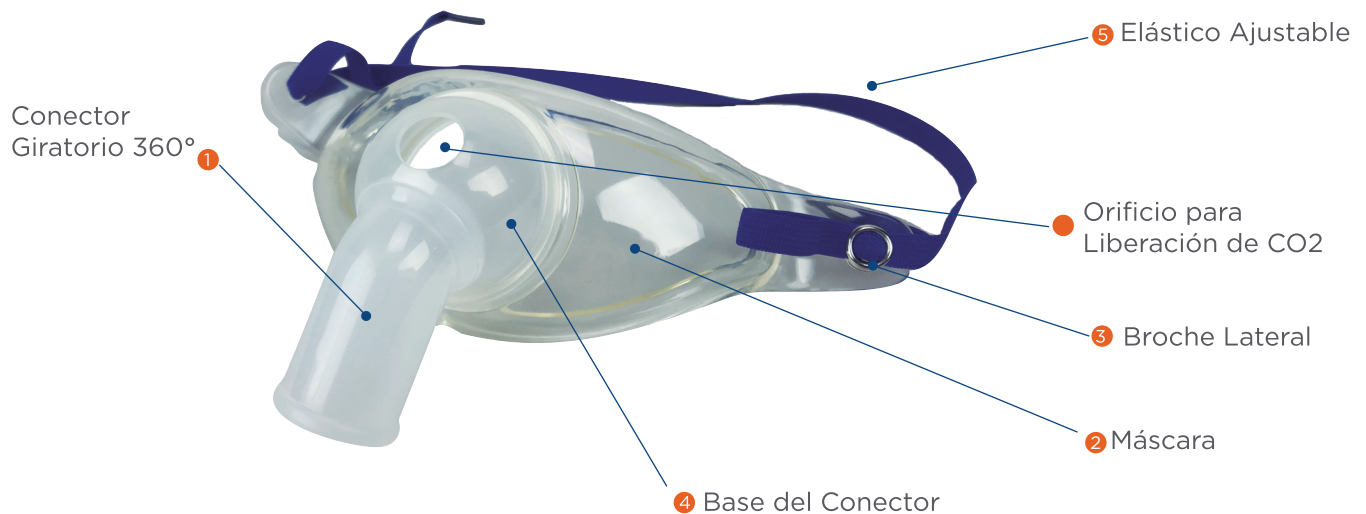

N°	Estructura	Material
1	Conector Giratorio 360°	Fibra de Poliuretano
2	Máscara	PVC Grado Médico
3	Broche Lateral	Metal
4	Base del Conector	Fibra de Poliuretano
5	Elástico Ajustable	Goma Natural Libre de Látex

✓ Producto estéril en Óxido de Etileno.

Instrucciones de uso

- ✓ Verifique que el empaque esté intacto y que las fechas de vencimiento del producto estén vigentes.
- ✓ Elija el tamaño que requiere de acuerdo al paciente, abra la bolsa y saque la máscara.
- ✓ Conecte el sistema de oxígeno que va a utilizar de acuerdo al requerimiento del paciente: manguera corrugada, micronebulizador o sistema Venturi (no suministrado) entre la máscara y la fuente de oxígeno.
- ✓ El conector de oxígeno de la máscara gira 360° y permite que el paciente se encuentre en cualquier posición, supina o sedente.
- ✓ Ajuste el oxígeno al flujo adecuado de acuerdo al sistema utilizado y verifique que el flujo de oxígeno pasa libre y adecuadamente a través del dispositivo.

- ✓ Coloque el extremo del elástico que tiene el broche detrás del cuello del paciente, tire suavemente hasta lograr apuntarlo en el broche de la máscara. Hale el extremo contrario para que la máscara se ajuste al contorno del paciente y quede segura y bien posicionada.
- ✓ Cuando requiera realizar algún procedimiento como la succión de la cánula de traqueostomía, afloje la máscara y suelte la máscara del extremo del broche para facilitar la atención. No utilice el orificio del conector para realizar el procedimiento; no es seguro y puede generar incomodidad y lesiones en el paciente. Reposicione la máscara una vez termine el procedimiento.
- ✓ Asegúrese que la base del conector giratorio siempre quede posicionada sobre la cánula de traqueostomía para permitir el libre paso del oxígeno hacia la vía aérea artificial del paciente.
- ✓ Verifique permanentemente que la máscara se encuentre permeable, libre de obstrucciones con secreciones o elementos extraños, que las conexiones son seguras y el oxígeno circula libremente a través del sistema.
- ✓ El dispositivo debe utilizarse bajo supervisión de personal entrenado y guía de un médico cuando se conecta al oxígeno.
- ✓ Cambie la máscara del paciente según el protocolo establecido o antes si presenta daños, rupturas o desprendimientos de alguna de sus partes.
- ✓ Deseche el dispositivo según la reglamentación local o los protocolos institucionales.

Precauciones

- Para uso único, desechar después de su uso.
- No lo use si el paquete está abierto o dañado.
- No almacenar a temperatura y humedad extremas.
- Almacenar en lugar fresco y seco.

Advertencias

- Si el producto se reutiliza hay riesgo de tener infección cruzada.
- El producto contiene DEHP, usar con precaución en niños y mujeres embarazadas.
- La manipulación del elástico o del broche de la máscara no debe hacerse con elementos corto punzantes que puedan alterar su estructura.
- El producto mantiene sus características siempre y cuando se sigan las recomendaciones de almacenamiento, transporte, instrucciones de uso y desecho.
- Para evitar productos contaminados evite embalaje dañado.
- Si se presenta algún tipo de reacción en el paciente durante su uso, suspéndalo y consulte al médico.

Almacenamiento y transporte

- Almacenar en lugar ventilado, seco y limpio.
- No usar si se evidencia que el producto está contaminado.
- Mantener libre de gases corrosivos y evitar la luz solar directa.
- Evite apretar y colisionar durante el transporte y manténgalo en su empaque original.

Disposición final

- Una vez usado el dispositivo debe considerarse como un producto potencialmente biopeligroso.
- Debe desecharse de acuerdo a protocolo de cada institución o según la regulación legal local para la disposición final de dispositivos médicos.

Símbolos



Alertas sanitarias o eventos adversos:

Hasta ahora no hay alertas sanitarias o eventos adversos ocurridos con este producto.