

FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MÉDICOS

PRODUCTO	MELISEPTOL WIPES																
NOMBRE GENERICO	Toallitas desinfectantes para pequeñas superficies																
DESCRIPCIÓN	Toallitas para la limpieza y desinfeccion de pequeñas superficies de dispositivos médicos																
COMPOSICIÓN	Toallita :17 G de Propan-1-ol, 0,23 g de Cloruro De Didecildimetilamonio, Poliéster																
TIEMPOS DE EXPOSICIÓN	<table><tr><td>Tiempos de exposición/Temps d'action</td><td></td></tr><tr><td>Bacterias, levaduras, virus envueltos/Bactéries, Levures, virus enveloppés (incl. VHB, VHC, VIH) *, rotavirus. DGHM 2001/EN 1040/EN 1276/EN 13727/13624/13697 ** DVV/RKI</td><td>1 min.</td></tr><tr><td>Bacterias, levaduras, alta carga orgánica/bacteriana, levadura en condiciones de suelo DGHM 2001, EN13727/13624/13697 **</td><td>2 min.</td></tr><tr><td>Tuberculosis bacteria (M. terrae) / Mycobactéries EN 14348/EN 14563</td><td>3 min.</td></tr><tr><td>Polyomavirus DVV/RKI, Norovirus (MNV)</td><td>5 min.</td></tr><tr><td>Aspergillus niger</td><td>60 min.</td></tr></table>					Tiempos de exposición/Temps d'action		Bacterias, levaduras, virus envueltos/Bactéries, Levures, virus enveloppés (incl. VHB, VHC, VIH) *, rotavirus. DGHM 2001/EN 1040/EN 1276/EN 13727/13624/13697 ** DVV/RKI	1 min.	Bacterias, levaduras, alta carga orgánica/bacteriana, levadura en condiciones de suelo DGHM 2001, EN13727/13624/13697 **	2 min.	Tuberculosis bacteria (M. terrae) / Mycobactéries EN 14348/EN 14563	3 min.	Polyomavirus DVV/RKI, Norovirus (MNV)	5 min.	Aspergillus niger	60 min.
	Tiempos de exposición/Temps d'action																
	Bacterias, levaduras, virus envueltos/Bactéries, Levures, virus enveloppés (incl. VHB, VHC, VIH) *, rotavirus. DGHM 2001/EN 1040/EN 1276/EN 13727/13624/13697 ** DVV/RKI	1 min.															
	Bacterias, levaduras, alta carga orgánica/bacteriana, levadura en condiciones de suelo DGHM 2001, EN13727/13624/13697 **	2 min.															
	Tuberculosis bacteria (M. terrae) / Mycobactéries EN 14348/EN 14563	3 min.															
	Polyomavirus DVV/RKI, Norovirus (MNV)	5 min.															
	Aspergillus niger	60 min.															
INDICACIONES DE USO	Toallitas para la limpieza y desinfeccion: Los Meliseptol® Wipes sensitive 100 se recomiendan para áreas donde se requiere un alto consumo de toallitas, p. en unidades de cuidados intensivos, para las bombas de infusión y pantallas. Los Meliseptol® Wipes sensitive XL se utilizan mejor para superficies más grandes, p. de dispositivos médicos altamente sensibles como incubadoras de bebés y máquinas de diálisis. Realice la desinfección de las manos y use guantes antes de usarlos. Siga los estándares de seguridad y salud ocupacional para manejar de líquidos inflamables y combustibles. Los aparatos eléctricos debe apagarse antes de desinfectarse. Si este no es posible, se deben tomar precauciones para garantizar que no la conmutación ocurre mientras se está produciendo la desinfección. Deja enfriar las superficies antes de la desinfección. Quite todos los contaminantes visibles antes de la desinfección. Limpie el superficie limpia visible con Meliseptol® Wipes sensitive hasta está completamente mojado. Mantenga la superficie húmeda hasta que la exposición ha transcurrido el tiempo. No limpie la superficie en seco. Para los tiempos de exposición correctos ver tabla.																
CONTRAINDICACIONES	N/A																
ADVERTENCIAS	No utilice en superficies calientes ni en equipos eléctricos encendidos. No usar para dispositivos invasivos																
VIDA ÚTIL	2 años		CLASIFICACION DE RIESGO		IIA												
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2018DM-0017968	MODALIDAD	IMPORTAR Y VENDER	VIGENCIA	4-may.-2028												
TITULAR	B. BRAUN MEDICAL AG- SUIZA	FABRICANTE	B. BRAUN MEDICAL AG- SUIZA TEAMPAC OY - FINALANDIA														
REFERENCIAS	19582 - Meliseptol Wipes sensitive 19893 - Meliseptol Wipes sensitive XL 19894-Meliseptol Wipes sensitive 100 19530-Meliseptol Wipes sensitive																
PRESENTACION COMERCIAL	Unidad (Dispensador o caja x 60 y 100 toallitas) , Caja x 12 dispensadores de 60 und de toallitas, Paquete x 42 toallitas																
ENVASE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA													
	Frasco	Polietileno	1, 42, 60, 100	Nombre.													
				Descripción del producto.													
				Lote, fecha de fabricación y expiración.													
Titular																	
EMPAQUE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA													
	Frasco	Polietileno	1, 12	Nombre.													
				Descripción del producto.													
				Lote, fecha de fabricación y expiración.													
Titular																	
EMBALAJE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA													
	Caja	Cartón	10,12	Nombre.													
				Descripción del producto.													
				Lote, fecha de fabricación y expiración.													
Titular																	
CONDICIONES ALMACENAMIENTO	Almacenar a condiciones normales de temperatura.																
MÉTODO DE DESECHO O DISPOSICIÓN FINAL	Puede verterse al desagüe, de acuerdo a la normativa ambiental aplicable.Los envases del producto presentan características de aprovechamiento a partir de un adecuado proceso de lavado y separación de la fuente.																

