

FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MÉDICOS

PRODUCTO	HEXAQUART XL - DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES																																																																										
NOMBRE GENERICO	Desinfectante para superficies																																																																										
DESCRIPCIÓN	Desinfectante concentrado, libre de aldehído, que se utiliza para la limpieza y desinfección de áreas de alto riesgo en hospitales y prácticas médicas. Basado en aminas y compuestos de amonio cuaternarios, es activo contra bacterias, microbacterias, levaduras, virus con envoltura vírica (VIH, VHC, VHB), adeno-, noro-, polyoma-, rota-, y vaccina virus.Cuenta con una excelente compatibilidad de material.																																																																										
COMPOSICIÓN	100 g de la solución contienen: 9.9 g de N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1.3-diamina, 6.0 g de Cloruro de didecildimetilamonio Excipientes: < 5% de surfactantes no iónicos, agente complejante, perfume, inhibidor de la corrosión, colorante, disolvente																																																																										
INDICACIONES DE USO	Hexaquart®XL esta indicado para la limpieza y desinfección de superficies y suelos para ser usado en hospitales, consultorios o áreas médicas. Instrucciones de Uso: Adicione siempre la cantidad de medida del concentrado, el agua debe contar con una temperatura (max. 25°C), antes de utilizar el producto tenga en cuenta la tabla de dilución para que utilice la cantidad exacta del producto. Para dosificar el producto puede utilizar tazas, bombas de dosificación, al igual que dispositivos de mezcla descentralizados. Limpie adecuadamente las superficies, y déjelas secar sin frotarlas con paños. No lo mezcle con aldehídos.																																																																										
TIEMPOS DE EXPOSICIÓN	CONCENTRATIONS AND EXPOSURE TIMES <table><tr><th>Efficacy</th><th>Test Norms</th><th>1 min</th><th>5 min</th><th>15 min</th><th>30 min</th><th>60 min</th></tr><tr><td>Bacteria & Yeasts</td><td>EN 16615</td><td></td><td>2.0%</td><td>1.0%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mycobacteria</td><td>EN 16615</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3.0%</td></tr><tr><td>Bacteria</td><td>EN 13727</td><td>3.0%</td><td>2.0%</td><td>1.0%</td><td>0.5%</td><td></td></tr><tr><td>Yeasts (C. albicans)</td><td>EN 13624</td><td>2.0%</td><td>0.5%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TbB (M. terrae)</td><td>EN 14348</td><td></td><td></td><td>2.0%</td><td></td><td>1.0%</td></tr><tr><td>Enveloped viruses (incl. HBV, HCV, HIV)</td><td>EN 14476</td><td></td><td>1.0%</td><td></td><td></td><td>0.5%</td></tr><tr><td>Adenovirus</td><td>EN 14476</td><td></td><td></td><td></td><td>1.5%</td><td></td></tr><tr><td>Norovirus (murine)</td><td>EN 14476</td><td></td><td></td><td>3.0%</td><td></td><td>2.0%</td></tr><tr><td>Rotavirus</td><td>DVV³⁾/ RKI⁴⁾</td><td></td><td>1.0%</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Efficacy	Test Norms	1 min	5 min	15 min	30 min	60 min	Bacteria & Yeasts	EN 16615		2.0%	1.0%			Mycobacteria	EN 16615					3.0%	Bacteria	EN 13727	3.0%	2.0%	1.0%	0.5%		Yeasts (C. albicans)	EN 13624	2.0%	0.5%				TbB (M. terrae)	EN 14348			2.0%		1.0%	Enveloped viruses (incl. HBV, HCV, HIV)	EN 14476		1.0%			0.5%	Adenovirus	EN 14476				1.5%		Norovirus (murine)	EN 14476			3.0%		2.0%	Rotavirus	DVV ³⁾ / RKI ⁴⁾		1.0%			
Efficacy	Test Norms	1 min	5 min	15 min	30 min	60 min																																																																					
Bacteria & Yeasts	EN 16615		2.0%	1.0%																																																																							
Mycobacteria	EN 16615					3.0%																																																																					
Bacteria	EN 13727	3.0%	2.0%	1.0%	0.5%																																																																						
Yeasts (C. albicans)	EN 13624	2.0%	0.5%																																																																								
TbB (M. terrae)	EN 14348			2.0%		1.0%																																																																					
Enveloped viruses (incl. HBV, HCV, HIV)	EN 14476		1.0%			0.5%																																																																					
Adenovirus	EN 14476				1.5%																																																																						
Norovirus (murine)	EN 14476			3.0%		2.0%																																																																					
Rotavirus	DVV ³⁾ / RKI ⁴⁾		1.0%																																																																								
CONTRAINDICACIONES	Mantener en recipientes herméticamente cerrados.Procurar que en el lugar de trabajo se disponga de una buena ventilación y de una salida de aire.Evitar el contacto con los ojos, la piel o las mucosas.																																																																										
ADVERTENCIAS	En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua y busca ayuda medica.En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Use ropa protectora adecuada, guantes y protección para los ojos / la cara. En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico CLA																																																																										
VIDA ÚTIL	NA			CLASIFICACION DE RIESGO	NA																																																																						
CERTIFICADO	2020002335		MODALIDAD	IMPORTAR Y VENDER	VIGENCIA	NA																																																																					
TITULAR	B. BRAUN MELSUNGEN AG-ALEMANIA		FABRICANTE	B. BRAUN MELSUNGEN AG- SUIZA																																																																							
CODIGO	19940 Hexaquart XL “West” 1000 ml oval 19941 Hexaquart XL “West” 5 LT 180097 HEXAQUART XL FASS "WEST" 200LT																																																																										
PRESENTACION COMERCIAL	UNIDAD																																																																										
ENVASE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA																																																																							
	Bidón	Polietileno baja densidad	1000 ml 5LT 200LT	Nombre.																																																																							
				Descripción del producto.																																																																							
				Lote, fecha de fabricación y expiración.																																																																							
				Titular																																																																							
CONDICIONES ALMACENAMIENTO	Almacenar a condiciones normales de temperatura.																																																																										
MÉTODO DE DESECHO O DISPOSICIÓN FINAL	Eliminación Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la deposición o incineración. Puede incinerarse si las normas locales lo permiten. Código de identificación de residuo-Desechos de residuos / producto no utilizado 070699 RESIDUOS DE LOS PROCESOS QUÍMICOS ORGÁNICOS; Residuos de la FFDU de grasas, jabones, detergentes, desinfectantes y cosméticos; Residuos no especificados en otra categoría. Eliminación de envases contaminados Eliminar los recipientes vacíos para la reutilización local, la recuperación o para la eliminación de los residuos. Envases/embalajes contaminados deben ser vaciados lo mejor posible; después, tras la correspondiente limpieza, pueden ser utilizados de nuevo. Envases/embalajes que no pueden ser limpiados deben ser eliminados de la misma forma que el producto contenido.																																																																										
BENEFICIOS AMBIENTALES	Los envases y empaques de este producto, presentan características de reciclaje, a partir de un adecuado proceso de separación en la fuente.																																																																										