

FICHA TECNICA

T-350-3.0



NOMBRE: Cánula de traqueostomía MINI Neonatal, sin balón No 3,0.

DESCRIPCIÓN:

Cánula de traqueostomía MINI Neonatal, sin balón No 3,0. Con placa ergonómica, lado inferior sesgado, de modo que consigue una forma de ajuste óptima y atraumática. Paredes muy delgadas manteniendo su estabilidad y forma. Tarjeta de identificación. Forma interior lisa, diseño en embudo del conector de 15 mm que permite la introducción sencilla de catéteres de aspiración. Cinta acolchada para sujeción, evita lesión en la piel. Diámetro Interno de 3,0mm Diámetro Externo de 4,3mm Longitud 32mm.

INDICACIONES DE USO:

Mantener permeable la vía aérea superior del paciente.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

Material termosensible, que se acomoda con la temperatura a la tráquea del paciente. Obturador con aro que permite mejor sujeción. Cinta acolchada para fijación al cuello. Línea radiopaca para visualizar con Rx

PRECAUCIONES:

No debe ser expuesta al calor intenso. Tiempo de uso en paciente: 29 días. Utilizar la talla de la cánula de acuerdo con el paciente.

CONTRAINDICACIONES:

Según criterio médico. No realizar proceso de esterilización. NO emplear NUNCA productos de limpieza agresivos, o desinfectantes que liberen cloro o productos para limpieza odontológica. NO hierva ni someta a vapor.

MATERIAL:

Polímero grado médico termosensible. Todos los materiales utilizados han sido homologados a nivel internacional para aplicaciones médicas. No contienen látex. Libre de DEHP.

CONDICIONES DE REPROCESAMIENTO:

De uso único por paciente. No debe hervir ni esterilizar a vapor.

METODO:	Oxido de Etileno
DISPOSICIÓN FINAL:	Relleno Sanitario
REGISTRO INVIMA:	2019DM-0020270
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	IIB
PRESENTACIÓN:	UNIDAD
FABRICANTE:	Tracoe Medical, Gmbh
MARCA:	TRACOE MEDICAL

INFORMACIÓN ADICIONAL:**Atención:**

Las cánulas no se deben limpiar con detergentes de uso doméstico, limpiadores de dentaduras postizas, cloro o alcohol concentrado ya que estos pueden tener un efecto adverso sobre la función de los productos. NO hierva ni someta estos productos a esterilización con vapor, ya que no se puede garantizar la seguridad del producto después esto.

Limpieza recomendada:

Por el tiempo de uso y patología del paciente se puede formar biofilm y acumulación de secreciones se recomienda sumergir en un detergente pentaenzimática (BioClean) para su limpieza por 5 minutos, enjuagar con agua destilada y dejar secar.