



## FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MÉDICOS

PRODUCTO	STABIMED ULTRA							
NOMBRE GENERICO	DESINFECTANTE PARA INSTRUMENTAL							
DESCRIPCIÓN	Desinfectante para la limpieza de instrumentos quirúrgicos, endoscopios rígidos y flexibles, equipos de laboratorio y anestesia.							
COMPOSICIÓN	* Sustancia activa: Ácido peracético 0.16 % in situ (diluido en agua 10 g/l) Percarbonato de sodio – carbonato disodio, compuesto con peróxido de hidrógeno (2:3) * Excipientes: Surfactantes, ácido cítrico, carbonato de sodio, colorantes							
DILUCIÓN	Taza dosificadora ∼ 75 ml				Listo para usar/Solución 3 L / 2 %			
	<ul> <li>~ 150 ml</li> <li>~ 200 ml</li> <li>160 g</li> <li>8 L / 2 %</li> <li>PASO 1: Llene el recipiente con el volumen requerido de agua tibia del grifo</li> <li>PASO 2: Añadir polvo en el agua con el tapón de medición</li> <li>PASO 3: Remover hasta que el polvo se disuelve para formar una solución clara (~ 10 min)</li> <li>PASO 4: Solución que se eliminará después de las 24 h o cuando esté visiblemente sucia</li> </ul>							
INDICACIONES DE USO	Desinfectante en polvo para la limpieza de instrumentos quirúrgicos, endoscopios rígidos y flexibles, equipos de laboratorio y anestesia. Adecuado para baño de ultrasonidos. Para el acondicionamiento y la desinfección final de instrumentos y aparatos termosensibles, p. ej. endoscopios flexibles. Activo contra bacterias, esporas bacterianas, micobacterias, hongos, y virus encapsulados y no encapsulados.							
CONTRAINDICACIONES	N/A							
ADVERTENCIAS	Puede incendiarse al calentarse. Nocivo en caso de ingestión. Provoca lesiones oculares graves.							
VIDA ÚTIL	2 años					CLASIFICACION I	E RIESGO	IIA
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2018DM-0017963			MOD	ALIDAD	IMPORTAR Y VENDER	VIGENCIA	4-may2018
TITULAR	B. BRAUN MEDICAL AG- SUIZA				ICANTE	B. BRAUN MEDICAL AG- SUIZA ANTEC INTERNATIONAL LIMITED-REINO UNIDO		
REFERENCIAS	19767 STABIMED ULTRA 800G 19812 STABIMED ULTRA 6 X 800G 19813 STABIMED ULTRA 4 KG 19939 STABIMED ULTRA 4 KG							
PRESENTACION COMERCIAL	Botella de polvo x 8	00g, Con	tenedor de polvo x	4 Kg, C	aja x 6 bo	tellas de polvo de 800g		
ENVASE	TIPO	MATER			DADES ENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA		
	Frasco	Frasco Polietileno			1	Nombre. Descripción del producto. Lote, fecha de fabricación y expiración. Titular		
EMPAQUE	TIPO	N	MATERIAL		DADES ENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA		DA
	Frasco Polietileno			1	Nombre. Descripción del producto. Lote, fecha de fabricación y expiración. Titular			
EMBALAJE	TIPO MATERIAL		MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS		INFORMACIÓN CONTENIDA		
	Caja		Cartón		Botellas	Nombre. Descripción del producto. Lote, fecha de fabricación y expiración. Titular		
CONDICIONES ALMACENAMIENTO	Almacenar a condiciones normales de temperatura.							
MÉTODO DE DESECHO O DISPOSICIÓN FINAL	Se debe establecer los mismos criterios de la sección 13 de la Hoja de seguridad del producto.  Adicionar: Los productos no usados o vencidos pueden ser remitidos a B. Braun Medical S.A. para la destrucción y disposición final.  Los empaques y embalajes del producto poseen características de aprovechamiento, tras un adecuado proceso de separación en la fuente.							
BENEFICIOS AMBIENTALES	Los envases y empaques de este producto, presentan características de reciclaje, a partir de un adecuado proceso de separación en la fuente.							