

Ficha Técnica

Código – Referencia	
NET2522-G5	
Edición	1
Fecha	2021-12-5

Inyector o aguja de Escleroterapia

Descripción

Una de las técnicas terapéuticas en la endoscopias es la esclerosis. Se introduce una aguja por el canal de trabajo y a través de ella se inyectan sustancias que ayudan en la hemostasia (cese del sangrado). Eso vale para úlceras o varices en el esófago, aunque en éstas últimas se prefiere la técnica de colocación de bandas que consiste en succionar la variz y colocar un "torniquete" en el cuello de la variz succionada.

Características

NET2522-G5, Inyectores o Aguja de Escleroterapia. Longitud de la aguja 5 mm, Aguja Ø 0,7 mm/22 G, Catéter 2,3 mm Ø, Longitud 230 cm

Almacenamiento

Debe almacenarse a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, no debe almacenarse a luz directa del sol, ni compromiso de objetos que afecten su integridad y su esterilidad



Marca:
Endo-Flex

País de Fabricación:
Alemania

Registro INVIMA:
2015DM-0013461

Prueba funcional

Los dispositivos médicos deben ser revisados antes de su uso con respecto a los siguientes aspectos:

- Fecha de caducidad
- Embalaje en buen estado
- Que no hayan daños en el producto (fisuras, torceduras, deformaciones)

Presentación

caja

5 Aguja de inyección SU (Solo uso)
empaquetado estéril individual

1 manual de instrucciones

Especificaciones

Las agujas de inyección que ofrece ENDO-FLEX consisten en una aguja distal de acero inoxidable que se conecta proximalmente a un conector Luer-Lock a través de un tubo de plástico interno. Este conector Luer-Lock es móvil y está conectado al mango proximal del tubo exterior para extender la aguja distal fuera del tubo exterior de plástico en la dirección distal para estabilizar la aguja durante el tratamiento. El diámetro exterior del tubo es de 2,3 mm. Las agujas de acero inoxidable varían en longitud (4 a 6 mm) y diámetro (0,5 a 1,0 mm) según la aplicación. La longitud total de las agujas varía entre 160 y 230 cm para diferentes tipos de endoscopios. El conector Luer-Lock está conectado al mango por medio de un mecanismo de enganche. El catéter exterior tiene una punta metálica cónica distal. El mango está equipado con un dispositivo de seguridad para evitar que la aguja se extienda.

Instrucciones de Uso

Nota Importante: Las agujas de inyección solo se pueden insertar en el canal de trabajo del endoscopio utilizando la aguja introducida en el tubo de plástico. Por lo tanto, se debe observar el diámetro correspondiente de la aguja de inyección y del canal de trabajo (ver etiqueta del artículo).

- ¡Las agujas de inyección no deben doblarse!

1. Coloque el extremo distal de la aguja de inyección frente al sitio de inyección. Coloque la jeringa de inyección llena en el conector Luer Lock.
2. Al empujar lentamente el conector Luer Lock hacia adelante, tire de la aguja completamente fuera del tubo de teflón para que el conector encaje.
3. Inserte la aguja en el tejido e inyecte el líquido lentamente aplicando una presión uniforme al émbolo de la jeringa.

Vida Útil:

La vida útil del producto suele ser de 2 años a partir de la fecha de fabricación en condiciones normales

Precauciones:

Se recomienda el uso sólo por personal calificado

Observaciones:

El producto solo se puede utilizar una vez.

No se debe volver a esterilizar después de que haya expirado la vida útil, es decir,

el producto debe desecharse de acuerdo con las normas clínicas.

4. Una vez completada la inyección, retraiga completamente la aguja nuevamente hasta que se enganche el conector Luer Lock.

Características

Metal tip protection; needle lock mechanism (one hand).

Catalogue No.	Needle Diameter (mm/Gauge)	Needle Length (mm)	Sheath Outer Diameter (mm)	Working Length (cm)	Min. Accessory Channel (mm)
NET2522-B4	0.7/22	4	2.3	160	2.8
NET2522-B6	0.7/22	6	2.3	160	2.8
NET2522-C4	0.7/22	4	2.3	180	2.8
NET2522-C5	0.7/22	5	2.3	180	2.8
NET2522-C6	0.7/22	6	2.3	180	2.8
NET2522-G4	0.7/22	4	2.3	230	2.8
NET2522-G5	0.7/22	5	2.3	230	2.8
NET2522-G6	0.7/22	6	2.3	230	2.8

Presentación	Empaque estéril sellado					
Tipo de Dispositivo	Descartable	X	Reusable		Clasificación	Ila



Símbolo para "Número de artículo"



Icono "Código de lote"



Icono de "fabricante"



Icono "Fecha de fabricación"



Símbolo para "observar las instrucciones de uso"



Símbolo de "esterilizado con óxido de etileno"



Icono de no reutilizar



No reesterilizar icono



No usar si el paquete está dañado símbolo



Usar por icono



Mantenga el icono seco



Proteger del símbolo de la luz solar



icono de precaución



No utilizar en el icono de campos de MR



ENDO-FLEX[®]
MANUFACTURED FOR LIFE



Cl. 49 N° 13 – 33 Of. 1302
Bogotá - Colombia
Tel: 3144024045 - (601)7910502
info@innovid.com.co
WWW.INNOVID.COM.CO