

Ficha Técnica

Código – Referencia	
N1522-G35	
Edición	1
Fecha	2021-12-5

Bolsa de extracción de polipos

Descripción

Está destinado a ser utilizado para recuperar pólipos extirpados y muestras de tejido durante procedimientos de endoscopia flexible y rígida. La pequeña red de recuperación endoscópica está diseñada para recuperar el tejido vital, manteniendo al mismo tiempo la integridad de la muestra adquirida.

Características

N1522-G35, Cesta Recuperador de cuerpos extraños, pólipos *EasyCollect* Bolsa 35 mm Ø, Catéter 2,3 mm, Longitud 230 cm. (endoscópica extracción pólipos intestinales)

Almacenamiento

Debe almacenarse a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, no debe almacenarse a luz directa del sol, ni compromiso de objetos que afecten su integridad y su esterilidad



Marca:
Endo-Flex

País de Fabricación:
Alemania

Registro INVIMA:
2015DM-0013461

Prueba funcional

Los dispositivos médicos deben ser revisados antes de su uso con respecto a los siguientes aspectos:

- Fecha de caducidad
- Embalaje en buen estado
- Que no hayan daños en el producto (fisuras, torceduras, deformaciones)

Presentación

caja
1 manual de instrucciones

Especificaciones

"EasyCollect": Bolsa de recogida para la extracción segura de pólipos cortados y cuerpos extraños aspirados en el tracto digestivo humano.

- bolsa de plástico termoformada ovalada
- sin látex
- Giratorio 360°
- Bolsa con depósito perforado para drenar líquidos

Vida Útil:

La vida útil del producto suele ser de 2 años a partir de la fecha de fabricación en condiciones normales

Precauciones:

Se recomienda el uso sólo por personal calificado

Observaciones:

El producto solo se puede utilizar una vez.

No se debe volver a esterilizar después de que haya expirado la vida útil, es decir,

el producto debe desecharse de acuerdo con las normas clínicas.

Instrucciones de Uso

Nota Importante: Este dispositivo está diseñado para un solo uso. Los intentos de reprocesar, reesterilizar y/o reutilizar pueden provocar fallas en el dispositivo y/o transmisión de enfermedades. Este dispositivo se suministra sin esterilizar y, por lo tanto, no debe utilizarse en un campo estéril.

1. Con la cesta completamente retraída en la vaina, inserte el dispositivo en un canal de accesorios del endoscopio. Haga avanzar el dispositivo a través del canal en pequeños incrementos hasta que la funda de la cesta salga del endoscopio.
2. Visualice endoscópicamente el pólipo que se va a extirpar y avance la cesta hasta la posición adecuada
3. Coloque la funda de la cesta más allá del objetivo y extienda lentamente la cesta para atrapar el pólipo. nota: puede ser necesario mover la canasta hacia adelante y hacia atrás a lo largo del objetivo para capturar el pólipo.

4. Retire la canasta dentro de la vaina mientras mantiene el atrapamiento. Apoye el pólipo contra el endoscopio del paciente. Mantenga la visualización endoscópica para asegurar el atrapamiento continuo del pólipo. Mientras retira el dispositivo del endoscopio, limpie las secreciones de la vaina exterior.
5. Prepare la muestra extraída según las pautas institucionales.

Presentación	Empaque estéril sellado					
Tipo de Dispositivo	Descartable	X	Reusable		Clasificación	Ila



Símbolo para "Número de artículo"



Icono "Código de lote"



Icono de "fabricante"



Icono "Fecha de fabricación"



Símbolo para "observar las instrucciones de uso"



Símbolo de "esterilizado con óxido de etileno"



Icono de no reutilizar



No reesterilizar icono



No usar si el paquete está dañado símbolo



Usar por icono



Mantenga el icono seco



Proteger del símbolo de la luz solar



icono de precaución



No utilizar en el icono de campos de MR



ENDO-FLEX[®]
MANUFACTURED FOR LIFE



Cl. 49 N° 13 – 33 Of. 1302
Bogotá - Colombia
Tel: 3144024045 - (601)7910502
info@innovid.com.co
WWW.INNOVID.COM.CO