

T.V.P.

No-Varix

MEDIAS DE COMPRESIÓN PROGRESIVA
ANTITROMBÓTICAS - ANTIEMBRÓTICAS
 Para determinar la talla correcta de las medias T.V.P.[®],
 tenga en cuenta estas medidas.

Talla

Punto de medida	Small / Chica / Pequeña	Medium / Mediana	Large / Grande	X-Large / Extra Grande
A. Circunferencia Pantorrilla	Máx. 31,4 cm	31,8 cm a 36,2 cm	36,6 cm a 41,9 cm	42,3 cm a 47 cm
B. Largo pierna	73,7 cm a 76,7 cm	73,7 cm a 78,7 cm	73,7 cm a 76,7 cm	76,7 cm a 78,7 cm

Recomendaciones:

- Las heridas abiertas deben estar cubiertas con un apósito adecuado antes de usar el dispositivo.
- Siga las instrucciones de uso para evitar daños por mala manipulación y afectación en la calidad del producto.
- Use las medias de compresión progresiva de acuerdo a su prescripción médica.

Indicaciones:

- Diseñadas para la recuperación de pacientes en reposo.
- Antitrombóticas, antiembólicas, pre y post quirúrgicas en la prevención de trombosos venosa profunda, tromboembolismo pulmonar.
- Uso hospitalario.

Contraindicaciones:

- Insuficiencia arterial severa
- Infecciones en la piel
- Úlceración activa
- Deformidad severa de la extremidad

Manejado en Colombia por:

Texpon SA

Parque Industrial La Aljuela K 2, con acceso es
 vía Troncal - Socorro, lote 18, 17e A - finca
 Teléfono: (071) 825 9838

R.S. NIT# 201994-200325-41

NIT: 84.005.415-7

Importador para Ecuador por: Ortopedicon S.A.

Dirección: Avenida R2-17 y Avenida de los
 Quindios Ecuador, 2566 - P.O. Box 1211

www.novavix.com

DESTAPE ÚNICAMENTE
AL MOMENTO DE SER UTILIZADA

Contenido de Texpon por: Novavix S.A.
 20% Descuento / Unidad.
Condiciones de almacenamiento:
 Almacenar en lugar fresco y seco, alejado de la luz
 directa del sol.

Precaución: Las medias de compresión pro-
 gresiva son un dispositivo médico. No debe usarse en
 el paciente indicado para efectos de diagnóstico.



La talla a utilizar
 dependerá de
 la medida de la
 pantorrilla.

No utilizar
 la medida de la
 pantorrilla.

No utilizar
 la medida de la
 pantorrilla.

No utilizar
 la medida de la
 pantorrilla.

No utilizar
 la medida de la
 pantorrilla.