




Tapabocas desechable 5 Capas KN95

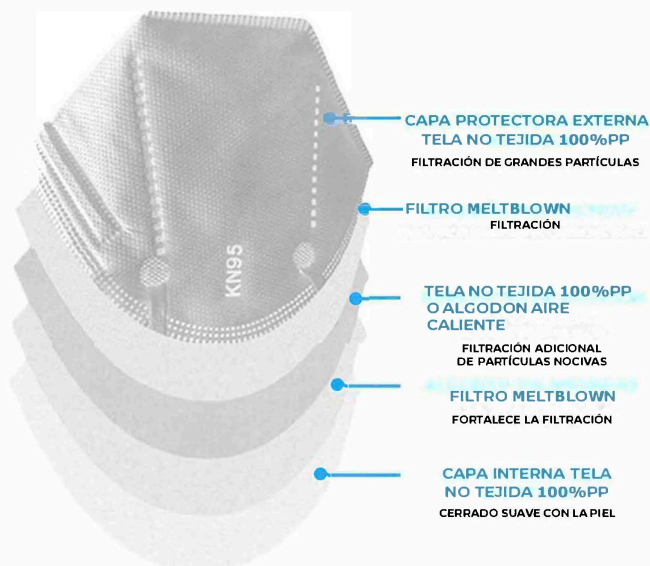

USO MÉDICO

BFE ≥ 95%

COMPOSICIÓN DEL TAPABOCAS 5 CAPAS

CAPA EXTERNA: Tela no tejida 50-70 gr/m2

CAPAS DE FILTRACIÓN: Meltblown y/o Hot Air
Cotton, Tela no tejida. 25-60 gr/m2

CAPA INTERNA: Tela no tejida 25-30 gr/m2

BANDAS ELÁSTICAS

Sujetadas a las orejas o cabeza.

AJUSTE NASAL

Moldeable para proporcionar una mayor firmeza.

CONDICIONES DE ALMACENAJE:

Almacenar en un lugar bien ventilado y sin humedad.
Evite las altas temperaturas y la exposición al fuego.

COLORES: Blanco, negro, gris, rosado.

TAMAÑOS: Adultos y Kids

UNIDADES POR CAJA: 20 Unidades

UNIDADES POR CAJA MASTER: 27 cajas

ADULTOS Y NIÑOS



INSTRUCCIONES DE USO

1. Lávese las manos.
2. Coloque las bandas elásticas en la parte de atrás de las orejas o cabeza, ubicando el ajuste nasal en la parte de arriba y el tapabocas sobre boca y nariz.
3. Doble el ajuste nasal para que coincida con la forma de la nariz para una mayor firmeza.
4. Tire del tapabocas hasta el mentón para producir un sello hermético.