


Uso médico

GOVENANT



Tapabocas desechable

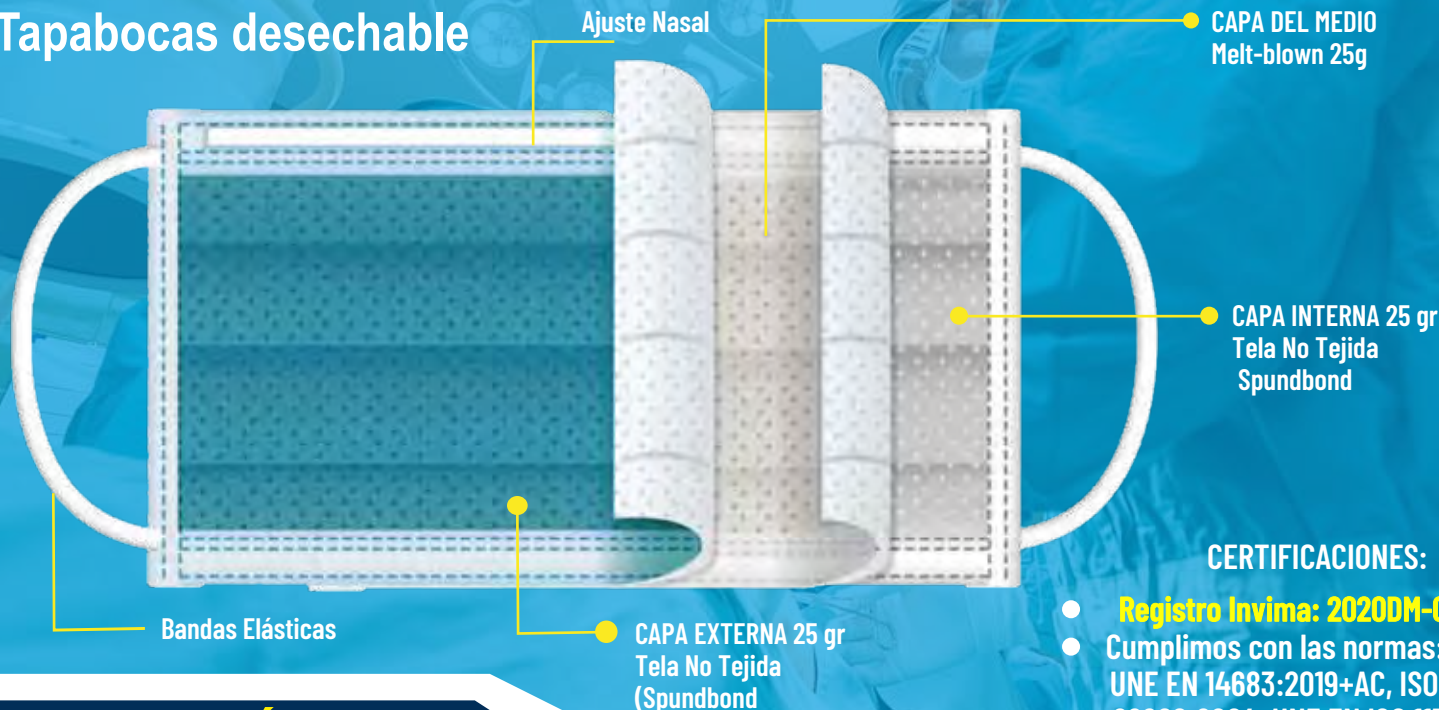

CERTIFICACIONES:

- **Registro Invima: 2020DM-0022272**
- Cumplimos con las normas: UNE EN 14683:2019+AC, ISO 22609:2004, UNE EN ISO 11737-1:2018 y la Norma Técnica Colombiana 1733.

USO MÉDICO

BFE $\geq$ 98% Type IIR

Tamaño Adulto: 175 mm x 95 mm. +/-5 mm

Tamaño Kids: 145 mm x 95 mm. +/-5 mm

BANDAS ELÁSTICAS

Compuesto por Spandex y Nailon.

AJUSTE NASAL

Alambre de metal con revestimiento de plástico.

APLICACIÓN:

Protege contra la exposición a patógenos y gotas de líquido suspendidas en el aire cumpliendo una función de barrera microbiana.

FEHA DE CADUCIDAD:

Dos años después de producido.

EMBALAJE:

50 piezas por caja. Empaque Individual Opcional.

CONDICIONES DE ALMACENAJE:

Almacenar en un lugar bien ventilado y sin humedad.
Evite las altas temperaturas y la exposición al fuego.

ADVERTENCIA:

1. No lo use si el paquete está dañado. Por favor, consulte las instrucciones antes de usar. Para uso exclusivo de adultos.
2. Solo para un solo uso, destruya y deseche de acuerdo con las normas después de su uso.
3. El tapabocas no elimina por completo el riesgo de contraer ninguna enfermedad o infección.
4. Si no usa y mantiene este producto de manera adecuada, podría provocar enfermedades o incluso la muerte. Úselo dentro del período de validez.
5. No lavar.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Lávese las manos.
2. Coloque las bandas elásticas en la parte de atrás de las orejas, ubicando el ajuste nasal en la parte de arriba y el tapabocas sobre boca y nariz.
3. Doble el ajuste nasal para que coincida con la forma de la nariz para una mayor firmeza.
4. Tire del tapabocas hasta el mentón para producir un sello hermético.



FOTOS Y EMPAQUE



60
Cajas

Adulto: 3.000 und x caja Máster.

Kids: 4.000 und x caja Máster.

Peso bruto: 12.5 Kg

Largo: 60 cm Ancho: 42,5 cm



80
Cajas



50
Unidades



50
Unidades



Unidad



Km 1 Vía Siberia Funza Zona
Franca Permanente Intexzona
Lt 72 Bd 4 Tercer Piso



350 5217879
350 2280447




COVENANT ZF SAS
Nit: 901.385.346-3

Resumen de la PRUEBA DE LABORATORIO basados en las normas (UNE EN 14683 / ISO 22609).

Test	Type I ^a	Type II	Type IIR	Tapabocas Covenant
Eficiencia de Filtración Bacteriana (BFE), (%)	≥95	≥98	≥98	98,61 ✓
Respirabilidad (Pa/cm ²)	<40	<40	<60	9,5 ✓
Resistencia a Salpicaduras (kpa)	No Requiere	No Requiere	≥16,0	20,3 ✓
Limpieza Microbiana (cfu/g)	≤30	≤30	≤30	22 ✓

Resultado de las pruebas en los tapabocas de Covenant

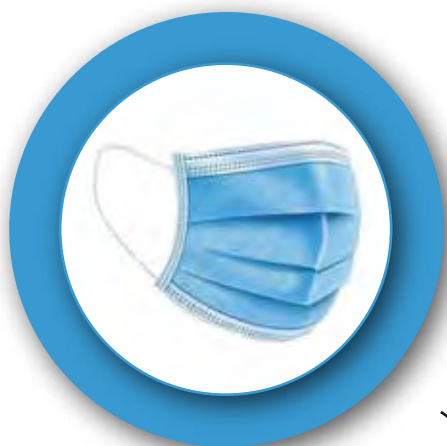

Filtración bacteriana ✓



Respirabilidad ✓



Resistencia a las salpicaduras ✓



Limpieza microbiana ✓

Los resultados de eficiencia se encuentran dentro de los requisitos para mascarillas tipo II y IIR de la norma UNE EN 14683 / ISO 22609.



Km 1 Vía Siberia Funza Zona
Franca Permanente Intexzona
Lt 72 Bd 4 Tercer Piso



350 5217879
350 2280447



COVENANT ZF SAS
Nit: 901.385.346-3