



MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA LMI

REF:
LM86-20256

TALLA:
6



Fecha de Fabricación:
2023-01-05

Temperatura de
Almacenamiento:
15°C - 25°C

LOT

20221206042



Fecha de Vencimiento:
2026-01-05



(01)17707063539774(17)260105(10)20221206042

Contiene: 1. Uno (1) Máscara facial

Diseñado para usar en equipos de reanimación, anestesia y equipo de ventilación.

Material: PVC, PC para el marco de la máscara y PP para araña de sujeción.

PRECAUCIONES:

- * Esta máscara está diseñada para ser utilizada bajo la dirección del personal clínico especializado.
- * Para obtener el mejor rendimiento, utilícelo en un plazo de 3 años a partir de la fecha de fabricación.
- * No usar en presencia de anestésicos inflamables.
- * Esta máscara está diseñada para acoplarse con un accesorio estándar de 22 mm de diámetro interno.
- * El dispositivo es de un solo uso y no debe reutilizarse. La reutilización puede provocar una infección cruzada y reducir la fiabilidad y la funcionalidad del producto.



INSTRUCCIONES DE USO:

1. Inspeccione la almohadilla para ver si tiene la presión de inflado adecuada.
2. Conecte la máscara a un circuito de respiración o dispositivo de reanimación.
3. Asegúrese de que las conexiones estén seguras.
4. Si existe la preocupación de que la máscara falle, reemplácela inmediatamente.



Importado por LMI Instruments S.A.
Cr. 68D # 25 B - 86 Of. 518
Bogotá - Colombia
Registro INVIMA: 2022DM-0025738

T PBX: (571) 427 2000 E info@lmistruments.com.co

www.lmistruments.com.co

Manufactured by
HSINER
NO. 312, JINSHAN
SHANGHAI, CHINA
Taiwan