

LM instruments S.A.

Ref. LM-86-777

CE
2460



1. Destape el micro-nebulizador. Deposite en él la medicación a nebulizar.

2. Asegure la tapa del micronebulizador.
 3. Conecte la línea de oxígeno al regulador y a una fuente de gas.
 4. Coloque el micronebulizador en el adaptador de la máscara.
 5. Verifique que las conexiones estén seguras.
 6. Asegure la máscara a la cara del paciente ajustando la banda elástica por detrás de la cabeza.
- Si el dispositivo presenta alguna falla, reemplácelo inmediatamente.

2019-09-17

2024-09-17

TEL: (571) 427-2000 FAX: (571) 427-2000
www.lincolnstruments.com