

AIRWAY EXCHANGE CATHETER

CARACTERÍSTICAS

El catéter de intercambio para vía aérea de Cook está indicado para el intercambio fácil y atraumático de tubos endotraqueales. Es un catéter radiopaco de punta roma con marcas de centímetros que facilitan la colocación. El catéter se suministra con un adaptador RapiFit (con un conector de 15 mm o un conector Luer Lock), que permite utilizar dispositivos de ventilación durante el procedimiento de intercambio.

COMPOSICIÓN

- ~ 1 catéter de Intercambio
- ~ 1 adaptador RapiFit 15mm
- ~ 1 adaptador RapiFit (conector Luer Lock)

Nota: Tubo endotraqueal no incluido. Longitudes y calibres varían según la referencia.



RECOMENDACIONES

Otras especificaciones del producto:

- C-CAE-8.0-45 (diámetro interior de 1,6mm): Para la sustitución de tubos endotraqueales con un diámetro interior de 3mm o mayor.
- C-CAE-11.0-83 (diámetro interior de 2,3mm): Para la sustitución de tubos endotraqueales con un diámetro interior de 4mm o mayor.
- C-CAE-14.0-83 (diámetro interior de 3mm): Para la sustitución de tubos endotraqueales con un diámetro interior de 5mm o mayor.
- C-CAE-19.0-83 (diámetro interior de 3,4mm): Para la sustitución de tubos endotraqueales con un diámetro interior de 7mm o mayor.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

No se han descrito contraindicaciones para este dispositivo, sin embargo, se debe:

- Tener cuidado para introducir el catéter en la vía aérea del paciente a la profundidad adecuada y para asegurarse de que el tubo endotraqueal sustituto quede colocado correctamente en el interior de la tráquea. Las marcas del catéter de intercambio para vía aérea de Cook indican la distancia desde la punta del catéter. El catéter y el tubo endotraqueal no deben hacerse avanzar más allá de la carina.
- Comprobar que el tamaño del catéter de intercambio para vía aérea de Cook es adecuado para el interior de un tubo endotraqueal de doble luz. En caso contrario, es posible que durante la extracción del catéter de intercambio para vía aérea de Cook se corten y se desprendan pequeños fragmentos.

- Para evitar barotraumatismos, asegúrese de que la punta del catéter de intercambio para vía aérea de Cook esté siempre por encima de la carina, a poder ser 2-3 cm por encima de ella.

POSIBLES REACCIONES ADVERSAS

Barotraumatismo, perforación de los bronquios o del parénquima pulmonar.

PRECAUCIONES

Este producto no está indicado para uso intravascular.

DATOS ADICIONALES

- **Vida Útil:** 36 meses
- **Clasificación de Riesgo:** IIa
- **Registro Sanitario:** 2018DM-0018861
- **Vigencia:** 31 octubre de 2028
- **Fabricante:** COOK INCORPORATED
- **Certificaciones:** FDA

TABAL DE REFERENCIAS				
Referencias	Descripción	Catéter (Fr)	Longitud del catéter (cm)	Diámetro interno del catéter (mm)
C-CAE-8.0-45	Cook Airway Exchange Catheter	8	45	1.6
C-CAE-11.0-83	Cook Airway Exchange Catheter	11	83	2.3
C-CAE-14.0-83	Cook Airway Exchange Catheter	14	83	3.0
C-CAE-19.0-83	Cook Airway Exchange Catheter	19	83	3.4

PRESENTACIÓN

El producto se suministra esterilizado con óxido de etileno en envases de apertura pelable. Producto indicado para un solo uso. El producto se mantendrá estéril si el envase no está abierto y no ha sufrido ningún daño. No utilice el producto si no está seguro de que esté estéril.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco, seco y oscuro. Evitar una exposición prolongada a la luz. Controlar condiciones macroambientales del área de almacenamiento: temperatura y humedad relativa.