

ROCATUB CATHETER: URETERAL CATHETER STRAIGHT OPEN 2 EYES "ROTA"

CARACTERÍSTICAS

Los RocaTub son catéteres de poliuretano termosensible estériles y están diseñadas para un solo uso. Los catéteres uretrales RocaTub de ROCAMED ponen a su disposición una amplia gama de catéteres con diferentes configuraciones de borde distal.

COMPOSICIÓN	
Los catéteres Rocatub se utilizan en caso de cateterismo uretral, drenaje, opacificación de las vías urinarias altas (ureteropielografía retrógrada) e irrigación Catéter de poliuretano termosensible Hidrorecubierto, graduado y radiopaco	

RECOMENDACIONES

- Catéter uretral hecho con poliuretano termosensible, son catéteres uretrales destinados a ser utilizados para drenaje y la opacificación del tracto urinario superior y lavado. Así, esta familia engloba dispositivos no invasivos de un solo uso, diseñados para un uso temporal.
- Extraer el dispositivo RocaTub de su embalaje estéril doble, respetando las normas de asepsia habituales.
- Comprobar visualmente la integridad del dispositivo y la movilidad del mandril para garantizar su posible retirada posteriormente.
- Asegurarse de que el mandril no sobresale del borde distal antes de introducir el catéter. Sumergir el borde distal del catéter en suero fisiológico o agua estéril durante unos segundos para revelar el recubrimiento hidrófilo.
- Cuidado con el sistema de ventilación o climatización del quirófano, ya que puede secar rápidamente el recubrimiento hidrófilo.
- Procurar que el recubrimiento esté perfectamente revelado al practicar la introducción; si es necesario, sumergir de nuevo el catéter. A continuación, introducir el catéter siguiendo la técnica habitual.
- Los catéteres, utilizados normalmente en endoscopia, se colocan en su sitio mediante control visual y/o bajo fluoroscopia y/o radioscopia.
- Una vez introducido y colocado en posición, se retira el mandril.
- En caso de que el mandril se haya introducido con guía, éste podrá retirarse antes de su introducción.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Punta distal	4 francos	5 francos	6 francos	7 francos	8 francos
Recto/Abierto - 2 Ojos	ROTA4200ST	ROTA5200ST	ROTA6200ST	ROTA7200ST	ROTA8200ST

DATOS ADICIONALES

- **Vida Útil:** 36 Meses
- **Clasificación de Riesgo:** IIa
- **Registro Sanitario:** 2022DM-0025982
- **Vigencia:** 09 septiembre 2032
- **Fabricante:** ROCAMED
- **Certificaciones:** FDA

PRESENTACIÓN

Embalaje

Empaquetado individualmente / Estéril / Dispositivo de un solo uso / Caja de 10

Esterilización

El producto se suministra esterilizado con óxido de etileno en envases de apertura pelable. Producto indicado para un solo uso. El producto se mantendrá estéril si el envase no está abierto y no ha sufrido ningún daño. No utilice el producto si no está seguro de que esté estéril.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco, seco y oscuro. Evitar una exposición prolongada a la luz. Controlar condiciones macroambientales del área de almacenamiento: temperatura y humedad relativa.

