

MELKER EMERGENCY CRICOTYROTOMY CATHETER SET

CARACTERÍSTICAS

Se recomienda utilizar el set de cricotirotomía de emergencia cuando no es posible acceder a la vía aérea mediante intubación endotraqueal del paciente. La longitud y diámetros del catéter varía según la referencia.

COMPOSICIÓN	
~ 1 aguja introductora ~ 1 aguja introductora de catéter PTFE ~ 1 guía y dilatador curvado	

RECOMENDACIONES

El catéter de urgencia para la vía aérea que posee un diámetro interno de 6mm permite la utilización de técnicas de ventilación por presión positiva y también permite la respiración espontánea en pacientes adultos.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

No se han descrito contraindicaciones para este dispositivo, sin embargo, hay que tener en cuenta las siguientes advertencias:

- Este dispositivo no está diseñado para pacientes pediátricos.
- Antes de utilizarlo, tener en cuenta las siguientes afecciones médicas y anatómicas tales como: configuración anatómica distorsionada, absceso subcutáneo, hematoma, existencia de cicatrices o radicación posoperatoria; coagulopatías o tratamientos con trombolíticos sistémicos.

PRECAUCIONES

- los pacientes que necesiten de una cricotirotomía pueden sufrir de lesiones medulares de consideración.
- Se recomienda inmovilizar la columna vertebral durante todo el procedimiento, en lo posible, si es una paciente que ha sufrido de traumatismos de consideración.
- Siempre que sea posible, utilice un método aséptico y anestesia local en el procedimiento.

DATOS ADICIONALES

- **Vida Útil:** 36 meses
- **Clasificación de Riesgo:** IIa
- **Registro Sanitario:** 2018DM-0018861
- **Vigencia:** 31 octubre de 2028
- **Fabricante:** COOK INCORPORATED
- **Certificaciones:** FDA

TABLA DE REFERENCIAS				
Referencias	Descripción	Longitud del catéter (cm)	diámetro interno del catéter (mm)	diámetro externo del catéter (mm)
C-TCCS-350	Melker Emergency Cricothyrotomy Catheter Set	3.8	3.5	5.1
C-TCCS-400	Melker Emergency Cricothyrotomy Catheter Set	4.2	4	5.9
C-TCCS-600	Melker Emergency Cricothyrotomy Catheter Set	7.5	6	8.8

PRESENTACIÓN

El producto se suministra esterilizado con óxido de etileno en envases de apertura pelable. Producto indicado para un solo uso. El producto se mantendrá estéril si el envase no está abierto y no ha sufrido ningún daño. No utilice el producto si no está seguro de que esté estéril.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco, seco y oscuro. Evitar una exposición prolongada a la luz. Controlar condiciones macroambientales del área de almacenamiento: temperatura y humedad relativa.