

	· ·			
UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN				
ENVASE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES QUE CONTIENE	INFORMACIÓN
	Bolsa	Plástico	1 Unidad	
EMPAQUE O PRESENTACIÓN	Empaque		1 unidad	
EMBALAJE	Caja	Cartón	20 unidades	
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar lejos de luz solar, con temperatura recomendada entre 0°C y 50°C, y humedad relativa entre 20% y 80%.			
ESPECIFICACIÓN DE CALIDAD	ISO 5356-1 Equipo respiratorio y de anestesia. Conectores cónicos. Parte 1: Conectores macho y hembra.			

GUIA RAPIDA DE USO

- 1. Abra el paquete arrancándolo de la abertura en forma de V del borde inferior, NO use tijeras o cortador para abrir el paquete para evitar daños en el producto
- 2. Antes de conectar el producto al paciente, sujete de forma segura todas las conexiones girándolas para garantizar un ajuste perfecto y sin
- 3. Siguiendo las instrucciones de la máquina para probar el producto, asegúrese de que el producto sea compatible con la máquina utilizada y confirme que el producto no tiene fugas ni oclusión.
- 4. Asegúrese de que los puertos del producto, como el puerto de muestreo de gas, el puerto de presión y el puerto de temperatura, estén cerrados cuando no estén conectados a la línea de monitoreo.
- 5. El paciente debe ser monitoreado constantemente siempre que el producto esté en uso.
- 6. Luego de su uso realice la disposición final del producto según protocolo de la institución.