

 RAÚL SENDOYA BAENA S.A.S.	FICHA TÉCNICA PARA CLIENTES	Código: Fecha Efectividad: Próxima Revisión: Versión:	INS 2017 – 01 – 01 2018 – 01 – 01 001
PRODUCTO: INCENTIVO RESPIRATORIO RSB®			
Elaborado: Juliana Sarmiento Sendoya _____ Asistente Administrativa Fecha: Enero 01 de 2017	Revisado: Ma. Victoria Sendoya O. _____ Gerente Administrativa Fecha: Enero 01 de 2017	Aprobado: Raúl Sendoya Baena _____ Gerente General Fecha: Enero 01 de 2017	



INFORMACIÓN GENERAL	
NOMBRE:	Incentivo Respiratorio RSB®
FABRICANTE:	RAÚL SENDOYA BAENA S.A.S.
MARCA:	RSB ®
VIDA UTIL:	1 año
PAÍS DE ORIGEN:	Colombia
REGISTRO SANITARIO INVIMA:	2021DM-0007444-R1
VIGENCIA:	Octubre 2031
CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	Clase I
SEO (Palabras Claves):	Incentivo Respiratorio, Respiración, Terapia Física, Terapia Online, Terapeuta, Respiración, Respira mejor, Respira Bien, Respira Bien Vive Mejor, Rehabilitación Pulmonar, Terapia Respiratoria, Ejercitador Respiratorio, Pulmones Saludables.
CLASE DE IMPUESTO (IVA):	IVA 19%
PESO (g):	100 g
DIMENSIONES DEL PRODUCTO:	5 cm de profundidad x 12 cm de ancho x 22 cm de altura

 RAÚL SENDOYA BAENA S.A.S.	FICHA TÉCNICA PARA CLIENTES	Código: Fecha Efectividad: Próxima Revisión: Versión:	INS 2017 – 01 – 01 2018 – 01 – 01 001
PRODUCTO: INCENTIVO RESPIRATORIO RSB®			
Elaborado: Juliana Sarmiento Sendoya _____ Asistente Administrativa Fecha: Enero 01 de 2017	Revisado: Ma. Victoria Sendoya O. _____ Gerente Administrativa Fecha: Enero 01 de 2017	Aprobado: Raúl Sendoya Baena _____ Gerente General Fecha: Enero 01 de 2017	

MARCA:	RSB®
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	Es un dispositivo diseñado para ejercitar los músculos inspiratorios; estimulando una respiración profunda y controlada, para expandir y llenar los pulmones de aire.
MODO DE EMPLEO:	Procure que el paciente se siente derecho y esté tan cómodo como sea posible. Mantenga de manera vertical el Incentivo Respiratorio RSB® mientras realiza el ejercicio. • Una vez armado el dispositivo, deslice la columna indicadora verticalmente y ponga su borde a nivel (1) de la escala. • Coloque la boquilla en la boca sin tapar el orificio con los dientes o la lengua, y ajuste firmemente con los labios. • Inhale (Inspire) profunda, sostenida y fuertemente, observando que el estímulo (la bolita) asciende al nivel indicado y sosténgalo por algunos segundos. • Suelte la boquilla y exhale el aire contenido en forma natural. También puede toser. • Repita el ejercicio las veces que sean necesarias, de acuerdo con las instrucciones de su médico, enfermera y/o terapeuta respiratorio. • Suba el nivel de exigencia, de acuerdo con su capacidad física. • Lave el dispositivo con agua y jabón después de cada sesión.
USO Y/O FINALIDAD:	El uso del Incentivo Respiratorio RSB® ayudará al paciente a incrementar su capacidad pulmonar, abrir las vías respiratorias y evitar que se acumulen líquidos o mucosidad en los pulmones. Todo esto hará que respirar sea mucho más fácil. Este dispositivo fue creado para ayudar al paciente a tener: • Pulmones más fuertes y resistentes.

 RAÚL SENDOYA BAENA S.A.S.	FICHA TÉCNICA PARA CLIENTES	Código: Fecha Efectividad: Próxima Revisión: Versión:	INS 2017 – 01 – 01 2018 – 01 – 01 001
PRODUCTO: INCENTIVO RESPIRATORIO RSB®			
Elaborado: Juliana Sarmiento Sendoya _____ Asistente Administrativa Fecha: Enero 01 de 2017	Revisado: Ma. Victoria Sendoya O. _____ Gerente Administrativa Fecha: Enero 01 de 2017	Aprobado: Raúl Sendoya Baena _____ Gerente General Fecha: Enero 01 de 2017	

	• Una respiración más fuerte y adecuada. • Mejor rendimiento y mayor resistencia física. • Menos fatiga.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO:	• Es un dispositivo médico no invasivo, no tóxico, no irritante de la piel. • El Incentivo Respiratorio RSB® NO es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños. • Por higiene y salud, el Incentivo Respiratorio RSB® es de uso personal; reutilizable en un solo paciente. • Es un producto NO ESTERIL.

COMPONENTES DEL PRODUCTO		
PIEZAS	MATERIAL	CARACTERÍSTICAS
Tubo principal	Resina K.	• Transparente. • El Tubo principal tiene marcada escala de posición para el estímulo y logotipo de la empresa.
Columna indicadora	Polipropileno PP.	• Blanco Natural.
Codo	Polipropileno PP.	• Verde Aguamarina. • Logotipo de la empresa en altorrelieve.
Plato / Base	Polipropileno PP.	• Verde Aguamarina. • Logotipo de la empresa en altorrelieve.
Manguera corrugada	Polietileno de baja densidad.	• Blanco Natural. • La pieza es parte de un

 RAÚL SENDOYA BAENA S.A.S.	FICHA TÉCNICA PARA CLIENTES	Código: Fecha Efectividad: Próxima Revisión: Versión:	INS 2017 – 01 – 01 2018 – 01 – 01 001
PRODUCTO: INCENTIVO RESPIRATORIO RSB®			
Elaborado: Juliana Sarmiento Sendoya _____ Asistente Administrativa Fecha: Enero 01 de 2017	Revisado: Ma. Victoria Sendoya O. _____ Gerente Administrativa Fecha: Enero 01 de 2017	Aprobado: Raúl Sendoya Baena _____ Gerente General Fecha: Enero 01 de 2017	

		rollo continuo, separado por tramos; con puntos de corte. • Flexible.
Boquilla	Polipropileno PP.	• Blanco Natural. • Tiene impreso el logo de la empresa.
Estímulo (bolita)	Celuloide (Según proveedor).	• Azul Claro. • Tiene impreso el logo de la empresa.

ACONDICIONAMIENTO	
PRESENTACIÓN Y UNIDAD DE EMPAQUE:	Caja individual.
UNIDADES DE EMBALAJE:	Cajas por 50 y 100 unidades.
IDENTIFICACIÓN:	Etiqueta adhesiva con información general del producto: Nombre Empresa, N° Lote y Fecha Vencimiento (Impresión negro).
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	• No colocar elementos pesados sobre la unidad de embalaje. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco; donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no alteren las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería u otro sistema de almacenamiento con el fin de evitar contaminación con paredes y pisos.