

 RAÚL SENDOYA BAENA S.A.S.	FICHA TÉCNICA PARA CLIENTES	Código: Fecha Efectividad: Próxima Revisión: Versión:	CA & CP 2017 – 01 – 01 2018 – 01 – 01 001
PRODUCTO: INHALOCÁMARA RSB® CORRIENTE			
Elaborado: Juliana Sarmiento Sendoya _____ Asistente Administrativa Fecha: Enero 01 de 2017	Revisado: Ma. Victoria Sendoya O. _____ Gerente Administrativa Fecha: Enero 01 de 2017	Aprobado: Raúl Sendoya Baena _____ Gerente General Fecha: Enero 01 de 2017	



INFORMACIÓN GENERAL	
NOMBRE:	Inhalocámara RSB® Corriente
FABRICANTE:	RAÚL SENDOYA BAENA S.A.S.
MARCA:	RSB ®
VIDA UTIL:	1 año
PAÍS DE ORIGEN:	Colombia
REGISTRO SANITARIO INVIMA:	2019DM-0004131-R1
VIGENCIA:	Julio 09 de 2029
CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	Riesgo I
SEO (Palabras Clave):	Inhalocámara, Epoc, Respira Bien Vive Mejor, Terapia Respiratorio, Terapia Respiratoria, Asma, Respiración, Inhaloterapia, Rehabilitación Pulmonar, Pulmones, Lungs, Respiratory Therapist, Neumología, Respiratory Care, Cuidado Respiratorio, Pico Respiratorio, Respira Mejor, Terapia En Casa, Dispositivos Medicos.
CLASE DE IMPUESTO (IVA):	IVA 19%

 RAÚL SENDOYA BAENA S.A.S.	FICHA TÉCNICA PARA CLIENTES	Código: Fecha Efectividad: Próxima Revisión: Versión:	CA & CP 2017 – 01 – 01 2018 – 01 – 01 001
PRODUCTO: INHALOCÁMARA RSB® CORRIENTE			
Elaborado: Juliana Sarmiento Sendoya _____ Asistente Administrativa Fecha: Enero 01 de 2017	Revisado: Ma. Victoria Sendoya O. _____ Gerente Administrativa Fecha: Enero 01 de 2017	Aprobado: Raúl Sendoya Baena _____ Gerente General Fecha: Enero 01 de 2017	

PESO (g):	80 g
DIMENSIONES DEL PRODUCTO:	8 cm de profundidad x 8 cm de ancho x 24 cm de altura
MARCA:	RSB®
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	La Inhalocámara RSB® Corriente es un dispositivo diseñado para la óptima dosificación de medicamentos en aerosol, permitiendo el paso de partículas terapéuticas más pequeñas a los pulmones; con el fin de prevenir la pérdida del medicamento durante la inhalación.
MODO DE EMPLEO:	• Agite el medicamento inhalador durante 30 segundos. • Retire la tapa y acomódelo en el anillo adaptador de la Inhalocámara RSB® Corriente. • Realice una inhalación profunda, desocupando el aire contenido en los pulmones. • Acomode suavemente la mascarilla sobre su cara, de modo que la boca y la nariz queden cubiertas para evitar escapes de medicamento. • Presione el inhalador y realice una inhalación lenta. • Mantenga la respiración de 5 a 10 segundos, tiempo necesario para que el medicamento se deposite en el pulmón. • Repita el procedimiento según las indicaciones dadas por el médico.
USO Y/O FINALIDAD:	Este dispositivo fue creado para: • Disminuir la presión de impacto del inhalador en la cavidad bucal y faríngea. • Prevenir infecciones por hongos en la boca (candidiasis). • Aumentar la cantidad de medicamento enviado a las vías respiratorias, incluso si tiene dificultad para usar el

 RAÚL SENDOYA BAENA S.A.S.	FICHA TÉCNICA PARA CLIENTES	Código: Fecha Efectividad: Próxima Revisión: Versión:	CA & CP 2017 – 01 – 01 2018 – 01 – 01 001
PRODUCTO: INHALOCÁMARA RSB® CORRIENTE			
Elaborado: Juliana Sarmiento Sendoya _____ Asistente Administrativa Fecha: Enero 01 de 2017	Revisado: Ma. Victoria Sendoya O. _____ Gerente Administrativa Fecha: Enero 01 de 2017	Aprobado: Raúl Sendoya Baena _____ Gerente General Fecha: Enero 01 de 2017	

	inhalador.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO:	- La Inhalocámara RSB® Corriente es un dispositivo médico no invasivo, no tóxico, no irritante de la piel. - La Inhalocámara RSB® Corriente NO es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños - Por higiene y salud Inhalocámara RSB® Corriente es de uso personal. - Es un producto NO ESTERIL.

COMPONENTES DEL PRODUCTO		
PIEZAS	MATERIAL	CARACTERÍSTICAS
Botella	Polipropileno para soplado.	- Azul semi-transparente. - La botella tiene plasmado el Logotipo de la empresa.
Mascarilla (Adulto / Pediátrica)	PVC atóxico.	- Aguamarina. - Con aroma a tutti-frutti.
Anillo adaptador	PVC atóxico.	- Aguamarina. - Anillo con ranura para adaptarse a la parte posterior de la botella. - Con aroma a tutti-frutti.

ACONDICIONAMIENTO	
PRESENTACIÓN Y UNIDAD DE EMPAQUE:	Caja individual.
UNIDAD DE EMBALAJE:	Cajas por 50 y 100 unidades.
IDENTIFICACIÓN:	Etiqueta adhesiva con información general del producto:

 RAÚL SENDOYA BAENA S.A.S.	FICHA TÉCNICA PARA CLIENTES	Código: Fecha Efectividad: Próxima Revisión: Versión:	CA & CP 2017 – 01 – 01 2018 – 01 – 01 001
PRODUCTO: INHALOCÁMARA RSB® CORRIENTE			
Elaborado: Juliana Sarmiento Sendoya _____ Asistente Administrativa Fecha: Enero 01 de 2017	Revisado: Ma. Victoria Sendoya O. _____ Gerente Administrativa Fecha: Enero 01 de 2017	Aprobado: Raúl Sendoya Baena _____ Gerente General Fecha: Enero 01 de 2017	
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	Nombre Empresa, N° Lote y Fecha Vencimiento (Impresión negro). • No colocar elementos pesados sobre la unidad de embalaje. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco; donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no alteren las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería u otro sistema de almacenamiento con el fin de evitar contaminación con paredes y pisos.		