

 RAÚL SENDOYA BAENA S.A.S.	FICHA TÉCNICA PARA CLIENTES	Código: Fecha Efectividad: Próxima Revisión: Versión:	FLEM 2018 – 01 – 01 2019 – 01 – 01 001
		PRODUCTO: MOVI-FLEM RSB®	
Elaborado: Juliana Sarmiento Sendoya Asistente Administrativa Fecha: Junio 01 de 2019	Revisado: Ma. Victoria Sendoya O. Gerente Administrativa Fecha: Junio 01 de 2019	Aprobado: Raúl Sendoya Baena Gerente General Fecha: Junio 01 de 2019	



INFORMACIÓN GENERAL	
NOMBRE:	MOVI-FLEM RSB®
FABRICANTE:	RAÚL SENDOYA BAENA S.A.S.
MARCA:	RSB ®
VIDA UTIL:	1 año
PAÍS DE ORIGEN:	Colombia
REGISTRO SANITARIO INVIMA:	2021DM-0007444-R1
CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	Clase I
SEO (Palabras Clave):	MoviFlem, Epoc, Respira Bien Vive Mejor, Terapia Respiratorio, Terapia Respiratoria, Asma, Respiración, Tabaquismo, Rehabilitación Pulmonar, Pulmones, Lungs, Respiratory Therapist, Neumología, Respiratory Care, Cuidado Respiratorio, Pico Respiratorio, Respira Mejor, Terapia En Casa, Dispositivos Medicos, Flutter, Pulmon.
CLASE DE IMPUESTOS (IVA):	IVA 19%
PESO (g):	65 g
DIMENSIONES DEL PRODUCTO:	5,5 cm de profundidad x 12,2 cm de ancho x 5,5 cm de altura
MARCA:	RSB®

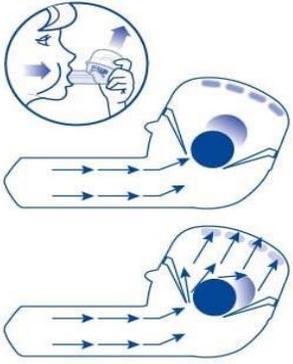


FICHA TÉCNICA PARA CLIENTES

Código: FLEM
 Fecha Efectividad: 2018 – 01 – 01
 Próxima Revisión: 2019 – 01 – 01
 Versión: 001

PRODUCTO: MOVI-FLEM RSB®

Elaborado: Juliana Sarmiento Sendoya Asistente Administrativa Fecha: Junio 01 de 2019	Revisado: Ma. Victoria Sendoya O. Gerente Administrativa Fecha: Junio 01 de 2019	Aprobado: Raúl Sendoya Baena Gerente General Fecha: Junio 01 de 2019
---	--	--

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	Dispositivo en forma de pipa diseñado para ejercitar los músculos espiratorios y ayudar a soltar, movilizar y eliminar secreciones (mucosidad) adheridas en el sistema respiratorio.
MODO DE EMPLEO: 	<p>Procure que el paciente se encuentre sentado (posición 90°) y esté tan cómodo como sea posible. Mantenga de manera horizontal el dispositivo Movi-Flem RSB® mientras realiza el ejercicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inhale normalmente sin llenar los pulmones. • Aguante la respiración por 2-3 segundos. • Coloque el dispositivo Movi-Flem RSB® en la boca y ajústelo con los labios. • Exhale a través del dispositivo Movi-Flem RSB® generando una vibración continua y sostenida de la esfera. • Repita el ejercicio entre 5-10 veces; de acuerdo con las instrucciones de su médico, enfermera y/o terapeuta respiratorio. • Lave y seque bien el dispositivo Movi-Flem RSB® después de cada sesión.
USO Y/O FINALIDAD:	El uso del dispositivo Movi-Flem RSB® ayudará al paciente a movilizar secreciones que se encuentren adheridas al sistema respiratorio, para que respirar sea mucho más fácil.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO:	<ul style="list-style-type: none"> • Es un dispositivo médico no invasivo, no tóxico, no irritante de la piel. • El dispositivo Movi-Flem RSB® NO ES UN JUGUETE. Manténgalo fuera del alcance de los niños. • Por higiene y salud, el dispositivo Movi-Flem RSB® es de uso personal; reutilizable en un solo paciente. • Es un producto NO ESTERIL.

**FICHA TÉCNICA PARA CLIENTES**

Código: FLEM
Fecha Efectividad: 2018 – 01 – 01
Próxima Revisión: 2019 – 01 – 01
Versión: 001

PRODUCTO: MOVI-FLEM RSB®

Elaborado: Juliana Sarmiento Sendoya Asistente Administrativa Fecha: Junio 01 de 2019	Revisado: Ma. Victoria Sendoya O. Gerente Administrativa Fecha: Junio 01 de 2019	Aprobado: Raúl Sendoya Baena Gerente General Fecha: Junio 01 de 2019
---	--	--

COMPONENTES DEL PRODUCTO

PIEZAS	MATERIAL	CARACTERÍSTICAS
Cuerpo principal - Pipa	Polietileno.	<ul style="list-style-type: none">• Verde Aguamarina.• La “pipa” tiene marcado el logotipo de la empresa (RSB).
Embudo	Polipropileno PP.	<ul style="list-style-type: none">• Transparente - Natural.
Tapa perforada	Polipropileno PP.	<ul style="list-style-type: none">• Transparente - Natural.
Esfera de acero inoxidable	Acero inoxidable	<ul style="list-style-type: none">• Acero inoxidable de alta densidad

ACONDICIONAMIENTO

PRESENTACIÓN Y UNIDAD DE EMPAQUE:	Caja individual.
IDENTIFICACIÓN:	<ul style="list-style-type: none">• Plegadiza de empaque con información del producto e instrucciones de uso.• Etiqueta adhesiva con N° Lote y Fecha Vencimiento (cuando aplique).
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	<ul style="list-style-type: none">• No colocar elementos pesados sobre la unidad de embalaje.• Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco; donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no alteren las características físicas del mismo.• Se debe utilizar estibas, estantería u otro sistema de almacenamiento con el fin de evitar contaminación con paredes y pisos.



FICHA TÉCNICA PARA CLIENTES

Código:
Fecha Efectividad:
Próxima Revisión:
Versión:

FLEM
2018 – 01 – 01
2019 – 01 – 01
001

PRODUCTO: MOVI-FLEM RSB®

Elaborado: Juliana Sarmiento Sendoya Asistente Administrativa Fecha: Junio 01 de 2019	Revisado: Ma. Victoria Sendoya O. Gerente Administrativa Fecha: Junio 01 de 2019	Aprobado: Raúl Sendoya Baena Gerente General Fecha: Junio 01 de 2019
---	--	--