

(SYR-60S) JERINGA ENFIT AVNS ESTERIL 60ML, UNIDAD

Información General

Categoría/Clasificación Dispositivo Medico

Fórmula/Composición JERINGAS DE POLIPROPILENO

Descripción del producto: JERINGAS DE POLIPROPILENO

Registro Sanitario/Registro Invima/Notificación Sanitaria Obligatoria
INVIMA 2019DM-0019984

Código ATC

Descripción ATC:

CUM: N.A.

Indicaciones/modo de uso 1. Para la apertura del paquete y el uso de los contenidos, siga las instrucciones del médico o el protocolo del hospital. 2. Utilice siempre técnicas que minimicen el riesgo de infección. La jeringa se debe conectar a un conector ENFit® macho durante el llenado y la remoción de las burbujas de aire para disminuir el riesgo de imprecisiones en el volumen de las dosis. 3. Apriete el émbolo por completo antes de llenar la jeringa. Extraiga el líquido (por ejemplo, la fórmula o el medicamento) con la jeringa. Para lograr una medición precisa, utilice el borde distal negro del pistón ubicado cerca de la punta del émbolo. No llene ni intente suministrar más allá de la marca de graduación máxima. 4. Para eliminar el exceso de burbujas de aire, sostenga la jeringa con la punta hacia arriba. Golpee la parte lateral de la jeringa para hacer que las burbujas suban hacia la punta. Retraiga un poco el émbolo y luego presiónelo hacia arriba para liberar el aire del tubo y la punta. Repita hasta que se hayan eliminado las burbujas y verifique la dosis nuevamente. 5.

Para las jeringas de 5 mL de volumen o menos, asegúrese de que la concavidad de la punta de la jeringa esté libre de líquido y verifique la dosis (repita según sea necesario). Nota: El uso de adaptadores o tubos para los frascos mejora la precisión de las dosis y la eliminación de aire. 6. Las jeringas con puntas para dosis bajas se deben golpear suavemente o sacudir para sacar el líquido que pueda estar por fuera de la vía del líquido. 7. En caso de requerirse, colóquele el capuchón (vendido por separado) a la jeringa y etiquétela hasta que esté lista para usarse (etiqueta no incluida). 8. Antes de la administración, mezcle bien los suplementos o aditivos hasta obtener una consistencia uniforme para así minimizar la posibilidad de obstrucción. 9. Descarte la jeringa según los protocolos hospitalarios y las normativas locales o nacionales.

Precauciones y advertencias

Contraindicaciones

Almacenamiento N.A.

Vida útil 1825

Fecha vencimiento Invima 2029-06-26 00:00:00.000000

Laboratorio Fabricante

Propiedades farmacocinéticas

Datos preclínicos sobre seguridad:

Clasificación toxicidad:

DI50

• Datos clínicos

Posología y forma de administración:

Sobredosis:

Reacciones adversas:

Interacción con otros medicamentos y formas de interacción:

Fertilidad, embarazo y lactancia:

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas:

• Datos farmacéuticos

Lista de Excipientes:

Incompatibilidades:

Precauciones especiales de conservación:

Naturaleza y contenido del envase:

Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones:

Estrecho margen terapéutico: