

Fabricado por:

HISTO S.A.
Av Gral Paz 315 – CP 1674 –
Villa Raffo – Buenos Aires –
Argentina.

Tel./Fax: (+5411) 4712 5941 • 4757 1437 •
www.histo.com.ar • info@histo.com.ar

Agujas de Localización Pre-quirúrgica Mamaria

MAMAWIRE / MAMAWIRE PLUS

MODELO	DESCRIPCION	CORRELACION SEGUN MODELO:
xx2005	20 Ga x 5 cm (alambre localizador: 15cm)	21xxxx: Mamawire
xx2007	20 Ga x 7 cm (alambre localizador: 17cm)	31xxxx: Mamawire Plus
xx2010	20 Ga x 10 cm (alambre localizador: 20cm)	



NO RE-ESTERILIZAR

INDUSTRIA
ARGENTINA

NO UTILIZAR SI EL ENVASE PRIMARIO ESTÁ ABIERTO O DAÑADO

Director Técnico: Farm. Nicolás Maidana (M.P. N° 20.079)

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS
AUTORIZADO POR LA ANMAT PM- 588-2

USO INDICADO

Las agujas de localización se emplean para la ubicación mastológica en procedimientos pre-quirúrgicos en tejido mamario.

CONTRAINDICACIONES - Importante

- Producto no Apto para uso en ambientes de Resonancia Nuclear Magnética RNM.
- Está contraindicada su utilización en cualquier aplicación que se encuentre fuera del uso Indicado.
- Almacenar a temperatura ambiente protegido de luz solar directa.

INSTRUCCIONES / PRECAUCIONES

INSTRUCCIONES: Verifique que el pouch se encuentra en perfecto estado.
Abra el pouch y retire el protector de la aguja respetando las normas asépticas.
Asegúrese que la aguja se encuentra sin desperfectos, de ser así, proceda a utilizarla.
Frente a cualquier consulta, conserve el pouch original.

PRECAUCIONES:

Los marcadores MAMAWIRE y MAMAWIRE PLUS, son instrumentos para ser utilizados una única vez y en un solo paciente.-

Son **descartables**: Luego de su utilización desecharlo, según normas vigentes.-

- Una vez que el anzuelo ha sido desplegado dentro de la mama, el alambre deberá ser removido quirúrgicamente. No intente reposicionar, mover o tirar del alambre, esto dañaría el anzuelo y podría romperse.
- Observe cuidado durante la práctica quirúrgica a fin de no cortar el alambre con el escalpelo.
- No intente re-doblar el anzuelo del alambre: provocaría la fractura del mismo.
- Si el anzuelo está deformado, o aparenta estar doblado incorrectamente, no use el producto.
- El avance rápido de la aguja sobre tejido denso de la mama, no es aconsejable. Proceda sobre el mismo con cuidado.


IMPORTANTE:

- Se recomienda efectuar la marcación en un plazo de 60 minutos previos a la intervención.

PRESENTACIÓN: Disponibles en cajas con 10 (diez) unidades.

- Cada aguja se presenta envasada en pouch de Tyvek por unidad.

MAMAWIRE PLUS :

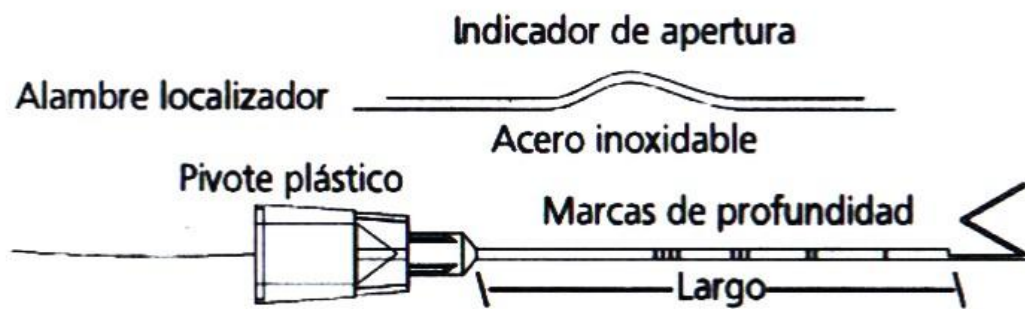

MAMAWIRE PLUS :

