

Fabricado por:

HISTO S.A.
Av Gral Paz 315 – CP 1674 –
Villa Raffo – Buenos Aires –
Argentina.

Tel./Fax: (+5411) 4712 5941 • 4757 1437 •
www.histo.com.ar • info@histo.com.ar

Aguja de Anestesia Prostática

BLO-K

MODELO	DESCRIPCION
812020	20 Ga x 20 cm. de largo
812025	20 Ga x 25 cm. de largo



NO RE-ESTERILIZAR

**INDUSTRIA
ARGENTINA**

NO UTILIZAR SI EL ENVASE SE ENCUENTRA ABIERTO O DAÑADO

Director Técnico: Farm. Nicolás Maidana (M.P. N° 20.079)

Autorizado por la ANMAT PM- 588-4

Venta Exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias

USO INDICADO:

La Aguja para bloqueo prostático BLO-K se utiliza para bloqueo pre-biopsia en próstata.

PRESENTACIÓN: Disponibles en cajas con 10 (diez) unidades.

Cada aguja se presenta envasada en pouch de Tyvek por unidad.

Importante:

- Producto no Apto para uso en ambientes de Resonancia Nuclear Magnética RNM
- Almacenar a temperatura ambiente protegido de luz solar directa.

INSTRUCCIONES: Verifique que el pouch se encuentra en perfecto estado.

Abra el pouch y retire el protector de la aguja respetando las normas asépticas.

Asegúrese que la aguja se encuentra sin desperfectos, de ser así, utilícela.

Frente a cualquier consulta, conserve el pouch original.

Se utiliza a través de la guía de biopsia de su transductor, previo a introducir la aguja de biopsia.-

Permite utilizar todos los tipos de jeringas.-

PRECAUCIONES: Las agujas BLO-K, son instrumentos para ser utilizados una única vez y en un solo paciente.-

Son **descartables**: Luego de su utilización desecharlo, según normas.-