



MINI WHISKERS STICKY WHISKERS TENDER GRIP FICHA TÉCNICA

DISPOSITIVOS DE SUJECION

- 1. MINI WHISKERS**
- 2. STICKY WHISKERS**

-
- 1. USO EN PREMATURO
MENOR DE 2000 GR.**
 - 2. USO EN NEONATO
MAYOR DE 2000 GR.**
-

**ASEGURA CANULAS
NASALES Y TUBOS DE
ALIMENTACION,
ELABORADO EN
HIDROCOLOIDE**



www.minervamedical.com.co

[Facebook.com/minervamedicalco](https://www.facebook.com/minervamedicalco)


La sobrevivencia de los recién nacidos extremadamente prematuros aumentó notablemente en los últimos años debido a la mejoría del cuidado perinatal, en especial, mayor utilización de corticoides prenatales, adecuada recepción en sala de partos, optimización de los cuidados iniciales, utilización de surfactante y mejores técnicas de asistencia respiratoria. El conjunto de estrategias en el cuidado neonatal realizadas por médicos y profesionales de la salud han logrado la diferencia en la morbilidad y mortalidad de los más pequeños. Durante la estadía en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), muchas de las intervenciones de los profesionales clínicos son necesarias para la sobrevivencia de los recién nacidos pretérmino (RNPT) sin embargo atentan la integridad de la piel. Una lesión en la piel puede ser puerta de entrada para microorganismos, potenciando la morbilidad, y aún la mortalidad en ésta primera etapa de la vida.

Es importante considerar la trascendencia de éste órgano como barrera contra las infecciones, protección de los órganos internos, colaborador en el mantenimiento de la temperatura y regulador de agua y electrolitos. La piel es también un órgano sensorial, que facilita el contacto inicial, la relación entre él y su madre. Las sensaciones táctiles de dolor, de temperatura, de presión son recibidas a través de la piel y transmitidas al cerebro. La piel es el órgano de mayor extensión en el recién nacido pretérmino. La relación superficie corporal con respecto al peso es cinco veces mayor que en el adulto, representando el 13% de su peso corporal comparado con el 3% respectivamente.

Debido a la importancia de la piel, es fundamental prevenir las lesiones epidérmicas, utilizando elementos que ayuden a evitar la presión sobre los tejidos, evitar los productos que se adhieran firmemente a la piel, utilizar apósitos transparentes o hidrocoloides en las zonas de apoyo como rodillas y codos.

MINI WHISKERS-STICKY WHISKERS-TENDER GRIP

Son un sistema de fijación suave, para las cánulas nasales y tubos de alimentación, elaborados en material hidrocoloide, con un tiempo de duración de entre 24 y 36 horas. Las tiras de velcro ayudan a mantener en posición los dispositivos, reducen la fricción en la piel y permite ajustes fáciles, cuando sea necesario.

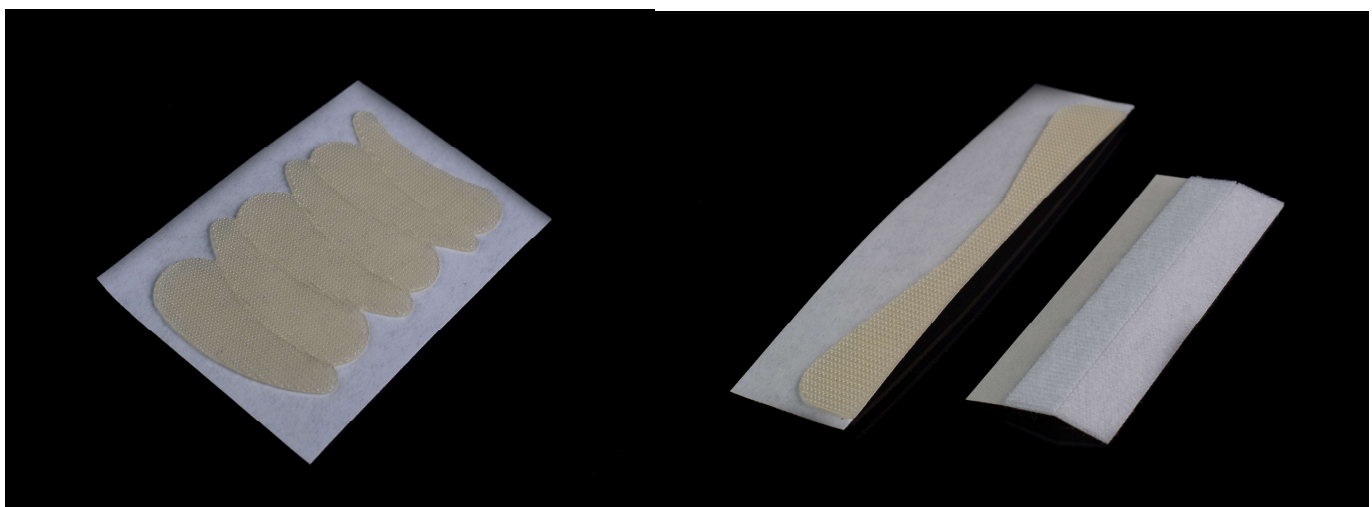

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

CARACTERÍSTICAS

1. Elaborado en hidrocoloide
2. Mini Wiskers, usado en pacientes menores de 2000 gr.
3. Sistema con Tiras de velcro
4. Sticky Wiskerst, usado en pacientes mayores de 2000 gr.
5. Tiempo de duracion para cambio 24 horas a 36 horas.

VENTAJAS

1. material suave e hipoalergenico
2. Diseño que permite fijar utilizando la menor superficie facial, en pacientes prematuros.
3. Mantiene los tubos en posicion adecuada..
4. asegura que el tamaño se ajuste de acuerdo al peso del paciente.
5. Fácil retiro de los hidrocólidos, no requiere productos adicionales al realizar este procedimiento.

BENEFICIOS

1. PREVIENE la irritacion de la piel.
- 1.2. CUIDA la piel con una adhesion suave y segura.
2. INTEGRIDAD para la piel del prematuro.
3. PROTEJE la friccion de la piel y permite ajustes faciles de los dispositivos cuando sea necesario.
4. CONFORT para el paciente y SEGURIDAD para el clínico.
5. EVITA la irritación y laceracion de la piel.
- 5.1 CALIDAD a la hora de elegir esta fijacion para proteger la piel del recién nacido.

HIDROCOLOIDE CON
TIRA DE VELCRO.

SUAVE E
HIPOALERGENICO

PACIENTES MENORES Y
MAYORES DE 2000 GR.



REFERENCIAS	NÚMERO	CONTENIDO
MINI WHISKERS	MW 100-0-120	CAJA X 120 UDS
STICKY WHISKERS	SW 102-0-25	CAJA X 25 UDS
TENDER GRIP	1005-0-25	CAJA X 25 UDS



REGISTRO INVIMA: 2016DM-0014740

NIVEL DE RIESGO: I

ENVASE: BOLSA

EMPAQUE: CAJA

ESTADO: NO ESTÉRIL

ROTULADO: DE LEY

DESECHO: INCINERAR DESPUES DE UTILIZAR, NO ESTERILIZAR

ALMACENAMIENTO: CONSERVAR EN UN LUGAR LIMPIO Y FRESCO

USO: ÚNICO

CONTENIDO: - MINI WISKERS. - STICKY WISKERST