



	AxSos Sistema de Placa de Fijación Fémur distal Lateral	Ficha Técnica N.1
		Versión 1

1. Descripción General del Producto:


El sistema de placa de Fijación AxSOS está diseñado para tratar fracturas periarticulares o intra-articulares de Fémur distal, Húmero Proximal, Tibia Proximal y Tibia Distal. El diseño del sistema se basa en aportes clínicos de un panel internacional de cirujanos experimentados, datos de publicaciones y pruebas tanto prácticas como biomecánicas. La forma anatómica, la trayectoria del tornillo fijado, y la alta calidad de la superficie toman en cuenta las exigencias actuales de los médicos clínicos respecto a la fijación apropiada, alta resistencia a la fatiga y daño mínimo a las partes blandas.

2. Características y Beneficios:


Sistema: La Placa Distal Femoral está diseñada con trayectorias de tornillos de ángulo fijo optimizadas que brindan una mejor estabilidad biomecánica y mejor resistencia a la extracción. El patrón metafisiario de los tornillos también evita toda interferencia en la escotadura intercondilar y ayuda a evitar la pérdida de reducción.


Instrumentos: Técnica simple, fácil instrumentación con los mínimos componentes. Compatible con la técnica MIPO (placa de osteosíntesis mínimamente invasiva) usando instrumentación de última generación.

Rango: Las placas más largas cubren un rango más amplio de fracturas.

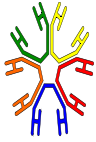

	AxSos Sistema de Placa de Fijación Fémur distal Lateral	Ficha Técnica N.1
		Versión 1

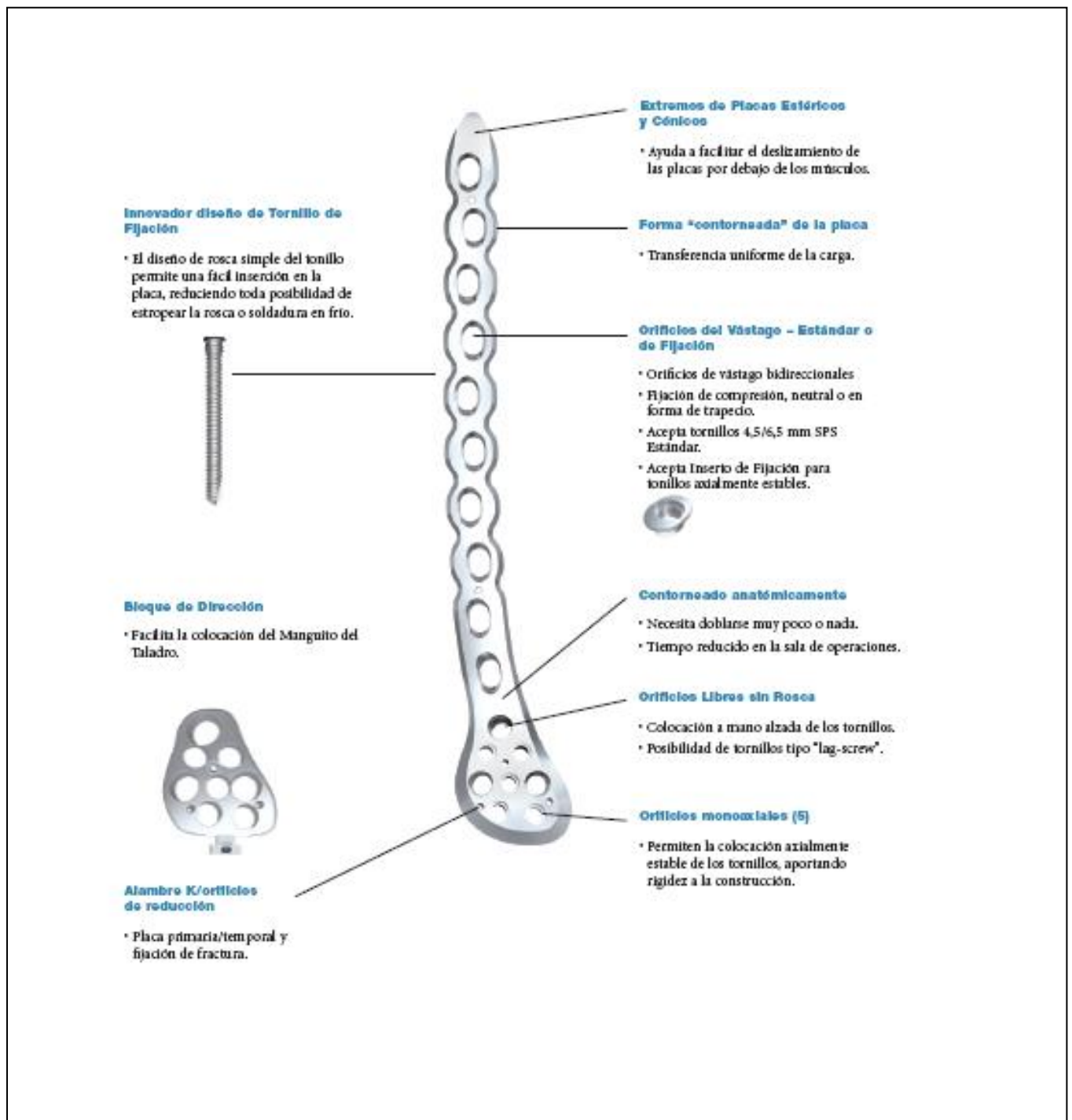

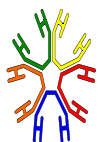

	AxSos Sistema de Placa de Fijación Fémur distal Lateral	Ficha Técnica N.1
		Versión 1

3. Indicaciones y Contraindicaciones Relativas:

Indicaciones: La indicación para el uso de este dispositivo de fijación interna incluye fracturas metafisiarias extra e interarticulares así como fracturas periprotésicas del fémur distal.

Contraindicaciones Relativas: Se debe confiar en la educación, capacitación y criterio profesional del médico para elegir el dispositivo y el tratamiento más apropiado. Las siguientes contraindicaciones pueden ser de naturaleza relativa o absoluta y el cirujano tratante debe tomarlas en cuenta:

- Cualquier tipo de infección activa o que se sospeche que esté en periodo de incubación o marcada inflamación local en o próxima al área afectada.
- Afectación de vascularización que podría inhibir el suministro adecuado de sangre a la fractura o al sitio quirúrgico.
- Densidad ósea afectada por enfermedad, infección o implante previo que no pueda proporcionar soporte adecuado y/o fijación de los dispositivos.
- Sensibilidad del material documentada o que se sospeche.
- Obesidad: Un paciente obeso o con sobrepeso puede producir cargas en el implante que pueden provocar la falla de la fijación del dispositivo o del dispositivo mismo.
- Pacientes con cobertura tisular inadecuada en el sitio quirúrgico.
- Utilización del implante que interfiera con las estructuras anatómicas o el desempeño fisiológico.
- Cualquier trastorno mental o neuromuscular que pudiera originar un riesgo inaceptable de falla de la fijación o complicaciones en la atención post-operatoria.
- Otras afecciones médicas o quirúrgicas que puedan impedir los beneficios posibles del procedimiento quirúrgico.

Se incluye información detallada en las instrucciones de uso que vienen con cada implante. Consulte el folleto del paquete para encontrar una lista completa de los posibles efectos secundarios y contraindicaciones.

El cirujano debe hablar con el paciente sobre todos los riesgos relevantes, incluyendo la vida útil finita del dispositivo, cuando sea necesario.

Precaución: Los tornillos para hueso no están diseñados para el ajuste o fijación a los elementos posteriores (pedículos) de la columna cervical, torácica o lumbar.



	AxSos Sistema de Placa de Fijación Fémur distal Lateral	Ficha Técnica N.1
		Versión 1

Ficha Técnica		AxSos Sistema de Placa de Fijación Fémur distal Lateral			
Nombre:		AxSos Sistema de Placa de Fijación Fémur distal Lateral			
Marca:		Stryker			
Fábrica:		Stryker			
Registro Sanitario:		2003V-0002239			
Composición:		Acero Inoxidable de alta resistencia			
País Origen:		Suiza			
Placas -Fémur Distal Lateral					
Referencias		Largo de placa	Orificios de Vástago	Orificios de Fijación	Orificios de Bloqueo
Izquierda	Derecha				
437504	437524	130mm	4	5	2
437506	437526	166mm	6	5	3
437508	437528	202mm	8	5	4
437510	437530	238mm	10	5	5
437512	437532	274mm	12	5	6
437514	437534	310mm	14	5	7
437516	437536	343mm	16	5	8
Tornillo de Fijación de 5.0mm Autorroscante					
Referencia			Largo de Tornillo		
370314			14mm		
370316			16mm		
370318			18mm		
370320			20mm		
370322			22mm		
370324			24mm		
370326			26mm		
370328			28mm		
370330			30mm		
370332			32mm		
370334			34mm		
370336			36mm		
370338			38mm		
370340			40mm		



	AxSos Sistema de Placa de Fijación Fémur distal Lateral	Ficha Técnica N.1
		Versión 1

Ficha Técnica	AxSos Sistema de Placa de Fijación Fémur distal Lateral	
	370342	42mm
	370344	44mm
	370346	46mm
	370348	48mm
	370350	50mm
	370355	55mm
	370360	60mm
	370365	65mm
	370370	70mm
	370375	75mm
	370380	80mm
	370385	85mm
	370390	90mm
	370395	95mm
Tornillo Cortical de 4.5mm Autorroscante		
Referencia	Largo de Tornillo	
	340614	14mm
	340616	16mm
	340618	18mm
	340620	20mm
	340622	22mm
	340624	24mm
	340626	26mm
	340628	28mm
	340630	30mm
	340632	32mm
	340634	34mm
	340636	36mm
	340638	38mm
	340640	40mm
	340642	42mm
	340644	44mm
	340646	46mm
	340648	48mm



	AxSos Sistema de Placa de Fijación Fémur distal Lateral	Ficha Técnica N.1
		Versión 1

Ficha Técnica	AxSos Sistema de Placa de Fijación Fémur distal Lateral	
	340650	50mm
	340652	52mm
	340654	54mm
	340656	56mm
	340658	58mm
	340660	60mm
	340662	62mm
	340664	64mm
	340666	66mm
	340668	68mm
	340670	70mm
Tornillo Esponjoso de 6.5mm R.16mm		
	Referencia	Largo de Tornillo
	341030	30mm
	341035	35mm
	341040	40mm
	341045	45mm
	341050	50mm
	341055	55mm
	341060	60mm
	341065	65mm
	341070	70mm
	341075	75mm
	341080	80mm
	341085	85mm
	341090	90mm
	341095	95mm
	341100	100mm
	341105	105mm
	341110	110mm
Tornillo Esponjoso de 6.5mm R.C		
	Referencia	Largo de Tornillo
	343020	20
	343025	25



	AxSos Sistema de Placa de Fijación Fémur distal Lateral	Ficha Técnica N.1
		Versión 1

Ficha Técnica	AxSos Sistema de Placa de Fijación Fémur distal Lateral	
	343030	30
	343035	35
	343040	40
	343045	45
	343050	50
	343055	55
	343060	60
	343065	65
	343070	70
	343075	75
	343080	80
Tornillo Esponjoso de 6.5mm R.32mm		
	Referencia	Largo de Tornillo
	342045	45mm
	342050	50mm
	342055	55mm
	342060	60mm
	342065	65mm
	342070	70mm
	342075	75mm
	342080	80mm
	342085	85mm
	342090	90mm
	342095	95mm
	342100	100mm
	342105	105mm
	342110	110mm
Tornillo Periprotésico de Fijación 5.0mm Autorroscante		
	Referencia	Largo de Tornillo
	370110	10mm
	370112	12mm
	370114	14mm
	370116	16mm
	370118	18mm



AMAREY NOVA MEDICAL S.A.

stryker[®]

	AxSos Sistema de Placa de Fijación Fémur distal Lateral	Ficha Técnica N.1
		Versión 1

Ficha Técnica	AxSos Sistema de Placa de Fijación Fémur distal Lateral	
	370120	20mm
Inserto de Fijación		
	Referencia	Sistema mm
	370003	5mm