



	AxSOS Sistema de Placa de Fijación Humero Proximal	Ficha Técnica N.3
		Versión 1

1. Descripción General del Producto:

El sistema de placa de Fijación AxSOS está diseñado para tratar fracturas periarticulares o intra-articulares de fracturas de Humero Proximal, Fémur distal, Tibia Proximal y Tibia Distal, El diseño del sistema se basa en aportes clínicos de un panel internacional de cirujanos experimentados, datos de publicaciones y pruebas tanto prácticas como biomecánicas. La forma anatómica, la trayectoria del tornillo fijado, y la alta calidad de la superficie toman en cuenta las exigencias actuales de los médicos clínicos respecto a la fijación apropiada, alta resistencia a la fatiga y daño mínimo a las partes blandas.

2. Características y Beneficios:


Sistema: La Placa Humeral Proximal está diseñada con trayectorias de tornillos de ángulo fijo optimizadas divergentes que brindan una mejor estabilidad biomecánica y mejor resistencia a la extracción. Esto ayuda a evitar la pérdida de reducción.

Instrumentos: Técnica simple, fácil instrumentación con los mínimos componentes. Compatible con la técnica MIPO (placa de osteosíntesis mínimamente invasiva) usando instrumentación de última generación.

Rango: Las placas más largas cubren un rango más amplio de fracturas.



	AxSos Sistema de Placa de Fijación Húmero Proximal	Ficha Técnica N.3
		Versión 1

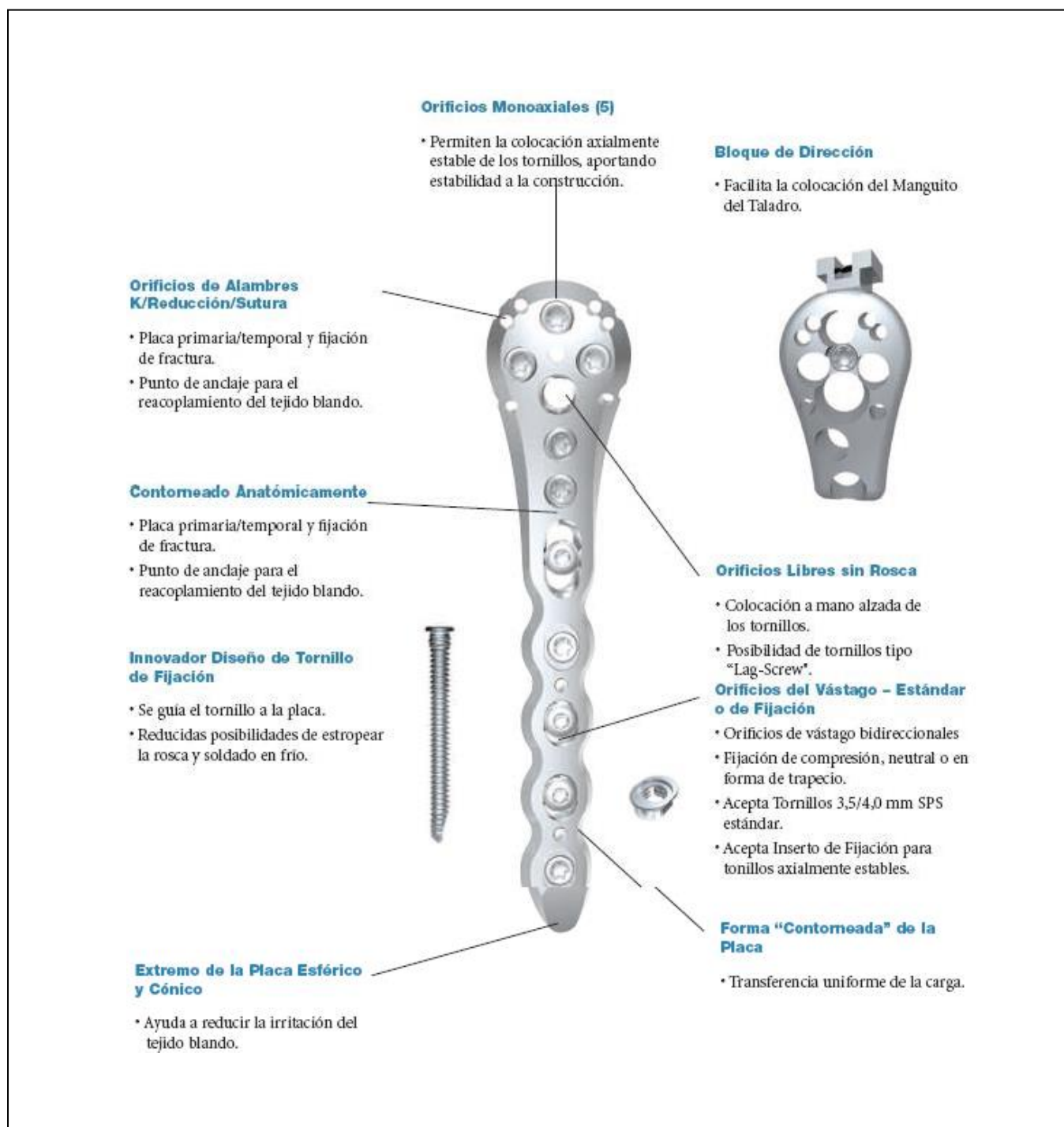



	Axsos Sistema de Placa de Fijación Húmero Proximal	Ficha Técnica N.3
		Versión 1

3. Indicaciones y Contraindicaciones Relativas:

Indicaciones: La indicación para el uso de este dispositivo de fijación interna incluye fracturas de humero proximal.

Contraindicaciones Relativas: Se debe confiar en la educación, capacitación y criterio profesional del médico para elegir el dispositivo y el tratamiento más apropiado. Las siguientes contraindicaciones pueden ser de naturaleza relativa o absoluta y el cirujano tratante debe tomarlas en cuenta:

- Cualquier tipo de infección activa o que se sospeche que esté en periodo de incubación o marcada inflamación local en o próxima al área afectada.
- Afectación de vascularización que podría inhibir el suministro adecuado de sangre a la fractura o al sitio quirúrgico.
- Densidad ósea afectada por enfermedad, infección o implante previo que no pueda proporcionar soporte adecuado y/o fijación de los dispositivos.
- Sensibilidad del material documentada o que se sospeche.
- Obesidad: Un paciente obeso o con sobrepeso puede producir cargas en el implante que pueden provocar la falla de la fijación del dispositivo o del dispositivo mismo.
- Pacientes con cobertura tisular inadecuada en el sitio quirúrgico.
- Utilización del implante que interfiera con las estructuras anatómicas o el desempeño fisiológico.
- Cualquier trastorno mental o neuromuscular que pudiera originar un riesgo inaceptable de falla de la fijación o complicaciones en la atención post-operatoria.
- Otras afecciones médicas o quirúrgicas que puedan impedir los beneficios posibles del procedimiento quirúrgico.

Se incluye información detallada en las instrucciones de uso que vienen con cada implante. Consulte el folleto del paquete para encontrar una lista completa de los posibles efectos secundarios y contraindicaciones.

El cirujano debe hablar con el paciente sobre todos los riesgos relevantes, incluyendo la vida útil finita del dispositivo, cuando sea necesario.

Precaución: Los tornillos para hueso no están diseñados para el ajuste o fijación a los elementos posteriores (pedículos) de la columna cervical, torácica o lumbar.



	AxSOS Sistema de Placa de Fijación Húmero Proximal	Ficha Técnica N.3
		Versión 1

Ficha Técnica		Axsos Sistema de Placa de Fijación Húmero Proximal			
Nombre:		Axsos Sistema de Placa de Fijación Humero Proximal			
Marca:		Stryker			
Fábrica:		Stryker			
Registro Sanitario:		2013DM - 0010034			
Composición:		Acero Inoxidable de alta resistencia			
País de Origen:		Suiza			
Placas –Humero Proximal					
Referencias		Largo de placa	Orificios de Vástago	Orificios de Fijación	Orificios de Bloqueo
Izquierda	Derecha				
437103	437123	86mm	3	5	1
437105	437125	112mm	5	5	2
437108	437128	150mm	8	5	4
Tornillo de Fijación de 4.0mm Autorroscante					
Referencia			Largo de Tornillo		
370514			14mm		
370516			16mm		
370518			18mm		
370520			20mm		
370522			22mm		
370524			24mm		
370526			26mm		
370528			28mm		
370530			30mm		
370532			32mm		
370534			34mm		
370536			36mm		
370538			38mm		
370540			40mm		
370542			42mm		
370544			44mm		
370546			46mm		
370548			48mm		



	Axsos Sistema de Placa de Fijación Húmero Proximal	Ficha Técnica N.3
		Versión 1

Ficha Técnica	Axsos Sistema de Placa de Fijación Húmero Proximal	
	370550	50mm
	370555	55mm
	370560	60mm
	370565	65mm
	370570	70mm
	370575	75mm
	370580	80mm
	370550	50mm
	370555	55mm
	370560	60mm
	370565	65mm
	370585	85mm
	370590	90mm
	370595	95mm
Tornillo Cortical de 3.5mm Autorroscante		
	Referencia	Largo de Tornillo
	338610	10mm
	338612	12mm
	338614	14mm
	338616	16mm
	338618	18mm
	338620	20mm
	338622	22mm
	338624	24mm
	338626	26mm
	338628	28mm
	338630	30mm
	338632	32mm
	338634	34mm
Tornillo Esponjoso de 4.0mm Rosca Parcial		
	Referencia	Largo de Tornillo
	345510	10mm
	345512	12mm



AMAREY NOVA MEDICAL S.A.

stryker

	AxSos Sistema de Placa de Fijación Húmero Proximal	Ficha Técnica N.3
		Versión 1

Ficha Técnica	Axsos Sistema de Placa de Fijación Húmero Proximal	
	345514	14mm
	345516	16mm
	345518	18mm
	345520	20mm
	345522	22mm
	345524	24mm
	345526	26mm
	345528	28mm
	345530	30mm
	345532	32mm
	345534	34mm
	345536	36mm
	345538	38mm
	345540	40mm
	345545	45mm
	345550	50mm
	345555	55mm
	345560	60mm
Tornillo Esponjoso de 4.0mm Rosca Completa		
	Referencia	Largo de Tornillo
	345410	10mm
	345412	12mm
	345414	14mm
	345416	16mm
	345418	18mm
	345420	20mm
	345422	22mm
	345424	24mm
	345426	26mm
	345428	28mm
	345430	30mm
	345432	32mm
	345434	34mm



AMAREY NOVA MEDICAL S.A.

stryker®

	Axsos Sistema de Placa de Fijación Húmero Proximal	Ficha Técnica N.3
		Versión 1

Ficha Técnica	Axsos Sistema de Placa de Fijación Húmero Proximal	
	345436	36mm
	345438	38mm
	345440	40mm
	345445	45mm
	345450	50mm
	345455	55mm
	345460	60mm
Inserto de Fijación		
	Referencia	Sistema mm
	370002	4mm