



	BAJA NUDOS/CORTADOR – CÁNULA RANURADA AIR	Ficha Técnica

1. Descripción General del Producto

El conjunto de empujador de nudos/cortador de sutura y cánula ranurada Stryker 2-0 es un **DISPOSITIVO DE UN SOLO USO DESTINADO** a utilizarse durante la cirugía artroscópica de rodilla para manipular y cortar suturas de tamaño 2-0.

2. Indicaciones:

El conjunto de empujador de nudos/cortador de sutura y cánula ranurada Stryker 2-0 está destinado a usarse en aplicaciones artroscópicas de menisco.

3. Contraindicaciones:

Procedimientos quirúrgicos distintos de los enumerados en las indicaciones.

4. Advertencias:

Este producto está diseñado para un solo uso. Deseche cualquier producto abierto o no utilizado.

5. Empaque, etiquetado y esterilización:

1. Este dispositivo se suministra estéril. NO REESTERILIZAR. La reesterilización de este dispositivo puede tener como resultado la contaminación o la pérdida de funcionalidad.
2. Los productos estériles de Stryker deberán aceptarse únicamente si el embalaje y el etiquetado de fábrica llegan intactos. Antes de usar el producto, compruebe si su embalaje presenta signos de manipulación, daños o contaminación por agua.
3. Póngase en contacto con el representante local de Stryker si el embalaje ha sido abierto o modificado.

6. Compatibilidad:

Compatible con el dispositivo de reparación del menisco para técnica "todo dentro" AIR™ de Stryker (P/N 4720) únicamente.



	BAJA NUDOS/CORTADOR – CÁNULA RANURADA AIR	Ficha Técnica

7. Descripción General del Producto

El conjunto de empujador de nudos/cortador de sutura y cánula ranurada Stryker 2-0 es un dispositivo de un solo uso destinado a utilizarse durante la cirugía artroscópica de rodilla para manipular y cortar suturas de tamaño 2-0.

8. Indicaciones:

El conjunto de empujador de nudos/cortador de sutura y cánula ranurada Stryker 2-0 está destinado a usarse en aplicaciones artroscópicas de menisco.

9. Contraindicaciones:

Procedimientos quirúrgicos distintos de los enumerados en las indicaciones.

10. Advertencias:

ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA UN SOLO USO. DESECHE CUALQUIER PRODUCTO ABIERTO O NO UTILIZADO.

11. Empaque, etiquetado y esterilización:

1. Este dispositivo se suministra estéril. NO REESTERILIZAR. La reesterilización de este dispositivo puede tener como resultado la contaminación o la pérdida de funcionalidad.
2. Los productos estériles de Stryker deberán aceptarse únicamente si el embalaje y el etiquetado de fábrica llegan intactos. Antes de usar el producto, compruebe si su embalaje presenta signos de manipulación, daños o contaminación por agua.
3. Póngase en contacto con el representante local de Stryker si el embalaje ha sido abierto o modificado.

12. Compatibilidad:

Compatible con el dispositivo de reparación del menisco para técnica "todo dentro" AIR™ de Stryker (P/N 4720) únicamente.



	BAJA NUDOS/CORTADOR – CÁNULA RANURADA AIR	Ficha Técnica

13. Instrucciones de uso:

1. Ubique la cánula ranurada dentro del espacio articular.
2. Pase el dispositivo de reparación del menisco para técnica "todo dentro" AIR™ a través de la guía ranurada y despliegue el dispositivo de reparación del menisco para técnica "todo dentro" AIR™.
3. Fuera del espacio articular, enhebre el extremo libre de la sutura del dispositivo de reparación del menisco para técnica "todo dentro" AIR™ a través del aro enhebrador y use la lengüeta de extracción para enhebrar la sutura a través de la punta distal del empujador de nudos/cortador de sutura.
4. Mantenga la sutura ligeramente tensa y empuje el empujador de nudos cortador de sutura hacia abajo hasta el nudo.
5. Empuje el nudo mientras tira hacia atrás de la sutura hasta que se note una tensión adecuada. Advertencia: Un exceso de tensión puede provocar daños en los tejidos.
6. Despliegue el émbolo para cortar el extremo libre de la sutura. Advertencia: No despliegue el émbolo hasta que esté listo para cortar la sutura. Un despliegue demasiado precoz puede provocar un corte accidental de la sutura.
7. Repita los pasos según sea necesario para realizar la reparación.
8. Retire el empujador de nudos/cortador y la cánula ranurada cuando finalice la reparación.



AMAREY NOVA MEDICAL S.A.

stryker[®]

Ficha Técnica	BAJA NUDOS/CORTADOR – CÁNULA RANURADA		
Nombre:	AIR		
Marca:	Stryker		
Fábrica:	Stryker		
Registro Sanitario:	2010 DM - 0006055		
Composición:			
País Origen:	USA		
Referencias		Descripción	
4721		Cortador - bajanudos	



AMAREY NOVA MEDICAL S.A.

stryker®