

Ficha Técnica Inhalocámara

•La inhalocámara AEROMEDIC

- Fue diseñada para garantizar el mejor aprovechamiento de los medicamentos inhalados y con características que permiten una fácil utilización para todos los pacientes.

Disponible en las siguientes presentaciones:

Inhalocámara con máscara para adultos

Inhalocámara con máscara pediátrica

Inhalocámara para bebés

Inhalocámara sin máscara

Inhalocámara traqueostomía

Cámara Espaciadora



Dispositivo médico desechable que minimiza el impacto del aerosol en la orofaringe, facilitando la reducción del volumen de las partículas de aerosol, hasta alcanzar el tamaño óptimo para ingresar al árbol bronquial donde debe actuar

Materiales

Las máscaras y el adaptador universal son elaboradas en un material suave que se adapta a la anatomía de la cara con un efecto hermético, sin lastimar la piel, minimizando los riesgos de alergias, es de color translúcido de fondo blanco.

El cuerpo de la Inhalocámara está elaborado en un material resistente, translúcido, que permite visualizar el interior de la cámara para verificar la salida del aerosol del inhalador y/o presencia de un cuerpo extraño dentro de la cámara.

Componentes Inhalocámara

Componentes Cámara Espaciadora

❖ Cámara con válvula

❖ Cámara sin válvula

❖ Boquilla, Adaptador universal

❖ Boquilla, Adaptador universal

❖ Máscara

Volumen

Para las presentaciones de adulto (9 años en adelante) y pediátrica (3 a 8 años) las inhalocámaras tienen un volumen de 510 c.c. y para las inhalocámaras de bebé (0 meses a 2 años) un volumen de 235 c.c. La presentación para la Cámara Espaciadora para adulto tiene un volumen de 500 c.c. Estos volúmenes permiten una adecuada distribución del aerosol para ser inhalado eficientemente.

Empaque

La presentación y el empaque de la Inhalocámara es de forma individual en su respectiva caja y en bolsa, donde están consignadas las instrucciones para su uso.

La presentación y el empaque de la Cámara Espaciadora es de forma individual en su respectiva bolsa, donde están consignadas las instrucciones para su uso.

Limpieza

Para uso personal: Se deben separar las dos piezas y limpiar con un paño humedecido en agua jabonosa, se deja secar y se empaqueta haciendo presión hasta que quede hermética, nuevamente para su uso.

Para reúso: Se deben separar las dos piezas y se recomiendan emplear compuestos con un alto grado de propiedades antisépticas para la desinfección aprobadas; se deja secar y se empaqueta haciendo presión hasta que quede hermética, nuevamente para su uso.

