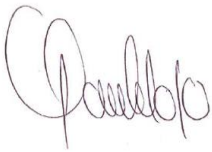
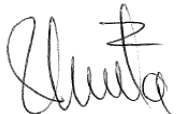


1. Nombre del producto		
T.V.P® No-Varix® Medias de compresión progresiva antiémbricas - antitrombóticas		
2. Descripción del producto		
2.1. Descripción		
Medias de compresión antiémbricas - antitrombóticas con puntera abierta para inspección. Opaca. Ideal en Post-operatorios y pacientes convalecientes por largos periodos. Línea Hospitalaria.		
2.2. Características		
* Médicamente recomendadas a pacientes no ambulatorios para reducir la posibilidad de embolia pulmonar. * Refuerzo superior muy confortable sin caucho que evita oprimir el músculo, manteniendo la media en su posición (en la media hasta la rodilla). * Refuerzo de expansión que ayuda a mantener la circulación del área femoral (en la media hasta el muslo y hasta la cadera). * Cómodo cinturón graduable a la cintura (en la media hasta la cadera). * Fibras de excelente elongación, recuperación y durabilidad garantizando constante compresión. * Tejido circular para un mejor ajuste anatómico. * Libre de látex. * Contiene suavizante textil que le da elasticidad y facilidad en la postura. * Contiene antibacterial que ayuda a evitar la aparición de hongos, bacterias y ácaros.		
2.3. Referencias		2.4. Usos
101097 - Media hasta la rodilla 101098 - Media hasta el muslo 101099 - Media hasta la cadera		Prevención y tratamiento de trombosis venosa profunda
2.7. Registro sanitario		2.8. Clasificación de riesgo
INVIMA 2019DM-0003826-R1 vigente hasta el 26 febrero de 2029		Clase I
2.9. Composición Textil		
Nailon / Nylon	80%	
Elastano / Spandex	20%	
2.10. Controles	Método de Análisis	Tolerancia
Compresión	Hatra y Salzmán Mesh MST	15 - 20 mmHg
Color	Espectofotómetro	De 0 a 1
Talla	Long strech / Cross strech	+/- 4 cm
Estilo	Visual	N/A
Textura	Visual	N/A
2.11. Empaque		
Empaque primario	Bolsa de polietileno blanca y azul, de baja densidad x 1 par	
Empaque secundario	No aplica	
Empaque terciario	No aplica	
2.12. Condiciones de almacenamiento		
Almacenar en lugar fresco y seco evitando la exposición directa a la luz solar y la concentración de polvo. Temperatura hasta 30°C y Humedad relativa hasta 75%		

2.13. Garantía	
5 años a partir de la fecha de fabricación almacenado bajo condiciones especificadas y 6 meses a partir del uso siguiendo cuidados e instrucciones de uso	
2.14. Vida útil	2.15. Esterilización
No aplica	No estéril
3. Información de seguridad	
3.1. Recomendaciones	
* Las heridas abiertas deben estar cubiertas con un apósito adecuado antes de usar el dispositivo. * Siga las instrucciones de uso para evitar daños por mala manipulación y afectación en la calidad del producto. * Use las medias de compresión progresiva de acuerdo a su prescripción médica. * Si tiene alguna duda o el problema persiste consulte a su médico.	
3.2. Indicaciones	
* Diseñadas para la recuperación de pacientes en reposo. * Antitrombóticas, antiembólicas, pre y post quirúrgicas en la prevención de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. * Uso hospitalario.	
3.3. Contraindicaciones	
* Insuficiencia arterial severa. * Infecciones en la piel. * Ulceración activa. * Deformidad severa de la extremidad.	
3.4. Cuidados de la prenda	
* Manipule las medias únicamente con la yema de los dedos. * No use joyas cuando se coloque la media. * No aplicar cremas, aceites, o talco en la piel que tiene contacto con la silicona porque ésta pueda afectar su adherencia. * Lave las medias después de cada uso con jabón suave o de tocador y sin suavizante, deje secar sin retorcer.	
3.5. Disposición final	
No arrojar a fuentes hídricas, tratar como residuo sólido no peligroso	
3.6. Recomendaciones de lavado	
 Lavado a mano Temperatura máxima 40 °C  No usar blanqueador  No secar en máquina  Secado en tendedero a la sombra  No planchar	
3.7. Instrucciones de uso	
1. Introducir delicadamente la media en el pie y ajuste en el talón 2. Deslice la media cuidadosamente hacia arriba de modo circular asegurando que no queden arrugas o acumulación de tejido. 3. Sujete la media, extienda y deslice suavemente hacia arriba, hasta lograr su posición correcta sin arrugas. 4. Asegurarse que el refuerzo de la media quede ubicado hacia la parte interna del muslo.	
 1.  2.  3.  4.	

3.8. Propiedades inflamables o combustibles					
No aplica					
3.9. Peligros médicos					
No aplica					
3.10. Peligro de incendio y acción de emergencia					
Agentes extintores de fuego: Dióxido de carbono, químico seco. Restricciones: No aplica Fuego/amenaza explosión: No aplica Gas de combustión: No aplica Protección personal: No aplica					
3.11. Precaución al transportar					
No aplica					
3.12. Primeros auxilios					
a. Inhalación: No aplica b. Contacto con la piel: No aplica c. Contacto con los ojos: No aplica d. Ingestión: No aplica					
4. Información general					
4.1 Nombre, dirección y número telefónico del Fabricante legal					
TEXPON S.A. Parque industrial La Argelia Km2 vía funza-siberia, lote 1, bodega 1, manzana A. Funza, Cundinamarca - Colombia - Teléfono: 8 269838 / 8 269839					
4.2. Certificados de Gestión de Calidad					
ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016					
Elaboro	Reviso	Aprobo	Día de revisión		
			Día	Mes	Año
 Paola Andrea Rojo Director Técnico 16/12/2020	 Martha Alarcón Gestor calidad y medio ambiente 16/12/2020	 Alvaro Pongutá Castro Gerente 16/12/2020	16	12	2020