

## Ficha datos y seguridad del producto

**LEUKOMED®** 

No. de Ficha	FS - 547			
N° Revisión:	4			
Fecha de	Día	Mes	Año	
creación	26	10	11	

1. Nombre del producto	LEUKOMED®			
2. Descripción del producto				
2.1 Descripción	Leukomed es un apósito blanco que consiste en un sustrato de poliéster no tejido elástico, el cual es cubierto por un lado con adhesivo de poliacrilato curado UV.  Una almohadilla blanca absorbente para heridas se coloca en el centro del adhesivo.  El lado del adhesivo y la almohadilla están completamente cubiertos con un papel protector el cual contiene silicona por un solo lado. El papel inferior tiene un pliegue que se superpone por el papel superior.  El producto es cortado con los bordes redondeados, sellado individualmente en bolsas de papel impreso y empacado en cajas plegadizas.  Los apósitos Leukomed® son una variedad de apósitos			
2.2 Características	<ul> <li>estériles para heridas.</li> <li>No se adhiere a la herida</li> <li>Permite que la herida respire, reducción de riesgo de maceración, permeable al aire</li> <li>Esterilizado con Oxido de Etileno (ETO)</li> <li>Amigable con la piel, bien tolerado incluso en piel sensible</li> <li>Buen poder adhesivo</li> <li>Buena capacidad de absorción</li> <li>Radio transparente</li> </ul>			
2.3 Intención de Uso	Vendaje estéril para cubrir y proteger heridas superficiales de menor a mediano tamaño o mínimamente invasivas, heridas después de cirugía.			
2.4 Instrucciones de uso	<ul> <li>Instrucciones de uso no necesarias para productos Clase I</li> <li>Antes de usar la el apósito, lavar, limpiar y desinfectar la piel, de acuerdo a los protocolos de la institución.</li> <li>Dejar secar completamente las soluciones antisépticas y protectoras de la piel antes de colocar el apósito, para prevenir la irritación de la piel y mejorar la adhesividad.</li> <li>Abrir el sobre y retirar el papel protector del apósito.</li> <li>Colocar el apósito de tal manera que la almohadilla quede sobre la herida.</li> <li>Realizar fricción durante varios segundos en todos los extremos para activar la función del adhesivo.</li> <li>Únicamente de uso externo.</li> <li>Usar sobre la piel libre de grasa, suciedad y cualquier sustancia química que pueda afectar el desempeño del adhesivo.</li> <li>Este producto es estéril y es usado también en instituciones de salud.</li> </ul>			



## Ficha datos y seguridad del producto **LEUKOMED®**

No. de Ficha	FS - 547			
N° Revisión:	4			
Fecha de	Día	Mes	Año	
creación	26	10	11	

2.5 Clasificación de Código (GMDN)	riesgo	Clas 4499					
2.6 Duración de la a Periodo de uso	plicación /	Un día o varios días, dependiendo del estado de la herida y la condición de la piel.					
2.7 Composición	Substrato: Poliéster blanco no tejido elástico.  Apósito: Almohadilla absorbente no tejida blanca de Polipropileno con una capa de Polietileno por una cara.  Masa Adhesiva: de Poliacrilato						
2.8 Látex en el prod material de emp	•	Composición del producto: No contiene Látex Material de empaque: No contiene Látex					
2.9 Ftalatos en el pr material de emp			contiene ftalatos en el producto. contiene ftalatos en el empaque				
2.10 Controles	Producto terminado: - Control Microbiológico - Poder adhesivo en acero - Permeabilidad al aire - Esterilización - Color del material						
2.11 Gama de produ				<b>-</b>			
Código del producto	Tamaño	)	Empaque	Embalaje			
72380-00	5 cm x 7,2 cm 8 cm x10 cm		50 unidades por caja plegadiza	8 Plegadizas por caja corrugada			
72380-01			50 unidades por caja plegadiza	6 Plegadizas por caja corrugada			
72380-02	8 cm x 15	cm	50 unidades por caja plegadiza	6 Plegadizas por caja corrugada			
72380-03	10 cm x 20	cm	50 unidades por caja plegadiza	8 Plegadizas por caja corrugada			
72380-04	10 cm x 25	cm	50 unidades por caja plegadiza	8 Plegadizas por caja corrugada			
72380-05	10 cm x 30	cm	50 unidades por caja plegadiza	8 Plegadizas por caja corrugada			
72380-06	10 cm x 35	cm	50 unidades por caja plegadiza	8 Plegadizas por caja corrugada			
72380-07	5 cm x 7,2 cm		5 unidades por caja plegadiza	3 <b>6</b> Plegadizas por caja corrugada			
72380-08	8 cm x 10 cm		5 unidades por caja plegadiza	3 <b>6</b> Plegadizas por caja corrugada			
72380-11	10 cm x 25	cm	5 unidades por caja plegadiza	36 Plegadizas por caja corrugada			
72380-12	10 cm x 30 cm		5 unidades por caja plegadiza	36 Plegadizas por caja corrugada			
72380-13	10 cm x 35 cm		m 5 unidades por caja plegadiza 36 Plegadizas po corrugada				



## Ficha datos y seguridad del producto **LEUKOMED®**

No. de Ficha **FS - 547** N° Revisión: Mes Año Día Fecha de 26 creación 10 11

	79952-03	5cm X 7.2	ст	5 unidades por caja plegadiza	36 Plegadizas por caja corrugada			
	79952-04	8cm X 10	ст	5 unidades por caja plegadiza	36 Plegadizas por caja corrugada			
2.12 Condiciones de almacenaje			Lugar seco y fresco, protegido de la luz directa del sol. Temperaturas no mayores a 35°C y humedad relativa no mayor a 85%.					
	2.13 Vida útil / tiemp almacenamient		5 años (60 meses)					
	2.14 Esterilización			lucto esterilizado con Óxido de E na ISO 11135: DIN EN ISO 11135	Etileno de acuerdo a la			
3.	Información de Seg	uridad						
				usar en pacientes con intoler ponentes del producto (por ejemplo				
	3.1 Advertencias y	uso	Consulte la información en el empaque ubicada a través de símbolos:					
	precauciones de uso			<ul> <li>No reutilizar.</li> <li>No lo use si la bolsa está dañada.</li> <li>Mantener alejado de la luz solar.</li> <li>Mantener seco.</li> </ul>				
	3.2 Propiedades infloor combustibles	amables o	Sólido combustible.					
	3.3 Peligros médicos	S	Ningún peligro medico previsto durante un manejo normal del producto.					
	3.4 Contraindicacion	nes	No hay contraindicaciones conocidas para este producto.					
	3.5 Peligro de incenero acción de emerg		En caso de incendio cualquier extintor puede ser usado.					
	3.6 Precaución al tra	ansportar	No aplica					
	3.7 Primeros auxilios		b. C	nhalación: No aplica Contacto con la piel: No aplica Contacto con los ojos: No aplica ngestión: No aplica				
	3.8 Disposición		No debe ser arrojado a fuentes de agua.  Depositar en el recipiente indicado para desechos sólidos.  La disposición final debe ser acorde con las normas de medio ambiente y salud locales.					
4. Información general								
	4.1 Nombre, direcció número telefónio Fabricante legal.	o del	BSN medical GmbH Quickbornstraße 24 D-20253 Hamburgo Alemania Tel. ++ 49 40 4909-909 Fax ++ 49 40 4909-6666					



## Ficha datos y seguridad del producto **LEUKOMED®**

No. de Ficha	FS - 547			
N° Revisión:	4			
Fecha de	Día	Mes	Año	
creación	26	10	11	

4.2 Certificados de Gestión de Calidad			Certificado acc. ISO 13485 (organismo notificado: Dekra)						
Autor del documento Revisa			nor	Aprobada por		Fecha de Revisión			
Autor dei documento	Kev	Revisada por			Aprobada por		Día	Mes	Año
Diana Marcela Montes Senior Regulatory Affairs Specialist Fecha Día Mes Año	Leidy L Auxiliar T Re		Asuntos	Geren	Martínez te Técnico, A os y Producc Fecha Mes	suntos	25	10	2021