

Ficha datos y seguridad del producto

No. de Ficha	FS - 602			
N° Revisión:	3			
Fecha de creación	Día	Mes	Año	
	26	05	15	

1. Nombre del producto	CO-PLUS® LF - VENDA COHESIVA FLEXIBLE LATEX FREE			
2. Descripción del producto				
2.1 Descripción	La venda autoadhesiva CO-PLUS® LF es una combinación de fibras de nylon de alta resistencia e hilos elásticos recubiertos con un compuesto libre de látex con propiedades cohesivas y es adecuado para el uso donde se requiere un soporte ligero o de compresión. Vendaje ideal para obtener una sujeción efectiva, a la vez que un cierto grado de funcionalidad.			
2.2 Características	 Mantiene constante soporte y compresión. Mantiene su tamaño original, no se encoje con el tiempo. Reduce las posibilidades de maceración de la piel. Seguro, antideslizante, mantiene la cohesión. Permeable al aire, permite que la piel respire y es cómodo de llevar. No se adhiere a la piel, por lo que se puede retirar sin causar dolor. 			
2.3 Intención de Uso	Venda cohesiva (autoadhesiva) flexible indicada para aumentar el nivel de sujeción, y es apto para lesiones deportivas (esguinces, contracturas musculares, contusiones) y para sostener apósitos y otros tipos de curas.			
2.4 Instrucciones de uso	 Al iniciar el uso del vendaje, para asegurar su estabilidad, sobreponer dos vueltas de la venda sobre si misma sin estirarla completamente. Estirar aproximadamente el 50% de la venda y cubrir la zona afectada del miembro en cuestión describiendo una espiral. No estirar el vendaje en su totalidad. Para asegurarse de que el vendaje se mantiene firme en su sitio, solapar cada vuelta con el 50% de la siguiente. Cortar lo que sobre de la venda y aplicar una ligera presión al final del vendaje para asegurarse de que se mantiene firme en su sitio. Nota: para su uso en rodillas, tobillos o muñecas, consultar los ejemplos ilustrados 4a, 4b y 4c respectivamente. En caso necesario, consultar al médico, farmacéutico u otro profesional de la salud. Ejemplos: 			



Ficha datos y seguridad del producto

No. de Ficha	FS - 602			
N° Revisión:	3			
Fecha de creación	Día	Mes	Año	
	26	05	15	

2.5 Clasificación de ri Código (GMDN)	esgo	Clase I GMDN 4	8126	
2.6 Duración de la apl Periodo de uso	licación /	Acorde a recomendación del médico		
2.7 Composición		Compuesto por caucho sintético libre de látex, Poliamida/fibras de Polipropileno, hilos de Poliuretano.		
2.8 Látex en el produc material de empac	•	Composición del producto: No contiene Látex Material de empaque: No contiene Látex		
2.9 Ftalatos en el proc material de empac	•	No contiene ftalatos en el producto. No contiene ftalatos en el empaque		
2.10 Controles	-	-Color -Apariencia -Empaque -Etiquetado		
2.11 Gama de produc	tos			
Código del producto	Tam	año	Empaque	Embalaje
72100-14	2.5cm	x 2m	Bolsa x 1 unidad	60 bolsas
72100-16	5cm x	c 2m	Bolsa x 1 unidad	36 bolsas
72100-17	7.5cm	x 2m	Bolsa x 1 unidad	24 bolsas
72100-18	10cm x 2m		Bolsa x 1 unidad	18 bolsas
72100-19	15cm	x 2m	Bolsa x 1 unidad	12 bolsas
72100-20	7.5cm	x 2m	Bolsa x 1 unidad	24 bolsas
72100-21	10cm	x 2m	Bolsa x 1 unidad	18 bolsas
72100-22	7cm x	(3m	Plegadiza x 1 unidad	24 plegadizas
72100-25	7cm x	c 3m	Plegadiza x 1 unidad	24 plegadizas



Ficha datos y seguridad del producto

No. de Ficha	FS - 602			
N° Revisión:	3			
Fecha de	Día	Mes	Año	
creación	26	05	15	

72100-26	10cm x	3.5m	Plegadiza x 1 unidad	18 plegadizas	
72100-27	10cm x	3.5m	Plegadiza x 1 unidad	18 plegadizas	
72100-28	2.5cm x 2m		Bolsa x 1 unidad	72 bolsas	
72100-29	5cm x 2m		Bolsa x 1 unidad	36 bolsas	
72100-30	7.5cm	x 2m	Bolsa x 1 unidad	24 bolsas	
72100-31	10cm	x 2m	Bolsa x 1 unidad	16 bolsas	
72100-32	15cm	x 2m	Bolsa x 1 unidad	12 bolsas	
72100-33	5cm >	k 2m	Bolsa x 1 unidad	36 bolsas	
72100-34	7.5cm	x 2m	Bolsa x 1 unidad	24 bolsas	
72100-35	10cm	x 2m	Bolsa x 1 unidad	16 bolsas	
72100-36	7.5cm	x 2m	Bolsa x 1 unidad	24 bolsas	
72100-37	10cm	x 2m	Bolsa x 1 unidad	16 bolsas	
			eco y fresco, protegido de la luz turas no mayores a 30°C y humedad r		
2.13 Vida útil / tiempo almacenamiento		3 años (36 meses)			
2.14 Esterilización		Producto	no estéril.		
3. Información de Segur	ridad				
3.1 Advertencias y precauciones de uso Para e efecto : Si el v volver comple			Para evitar alteraciones de la circulación periférica o incluso el efecto torniquete, no estirar demasiado la venda. Si el vendaje provocara entumecimiento u hormigueo, retirar y volver a colocarlo menos apretado. No se debe estirar completamente. Para esguinces graves o roturas musculares, consultar a un médico u otro profesional de la salud capacitado.		
3.2 Propiedades inflamables o					
3.3 Peligros médicos No se conocen riesgos para la salud durante el manejo no adecuado de este producto.			manejo normal y		
3.4 Contraindicacione	es	No se co	nocen contraindicaciones.		
3.5 Peligro de incendi acción de emerge		En caso de incendio se puede usar cualquier extintor estándar.			
3.6 Precaución al tran	sportar	ar No aplica			
3.7 Primeros auxilios		a. Inhalación: No aplicab. Contacto con la piel: No aplicac. Contacto con los ojos: No aplicad. Ingestión: No aplica			
3.8 Disposición		el recipie La dispo	venda no debe ser arrojada a fuentes de agua, depositarla en ecipiente indicado para desechos sólidos. disposición final debe ser acorde con las normas de medio piente y salud locales.		



Ficha datos y seguridad del producto

No. de Ficha	FS - 602		
N° Revisión:	3		
Fecha de creación	Día	Mes	Año
	26	05	15

4. Información general	
4.1 Nombre, dirección y número telefónico del Fabricante legal.	BSN medical GmbH Schützenstraße 1-3 22761 Hamburgo – Alemania
	Tel. ++ 49 40 4909-909 Fax ++ 49 40 4909-6666
4.2 Certificados de Gestión de Calidad	EN ISO 13485 (organismo notificado: Dekra)

Autor del documento	Pavisada nor	da por Aprobada por		Fecha de Revisión		
Autor dei documento	Revisada por			Mes	Año	
Leslie Fernández Cabrera Auxiliar Técnica y Asuntos Regulatorios	Cristian Camilo Gama Líder de Operaciones	Karen Milena Martinez Senior Regulatory Affairs Specialist – Dirección Técnica DC	22	01	2024	