

FICHA TÉCNICA - DISPOSITIVO MÉDICO

INFORMACIÓN GENERA					
NOMBRE COMERCIAL:	Cánister				
NOMBRE GENÉRICO:	Recipiente Colector - Cánister 800 mL				
REGISTRO SANITARIO:	2023DM-0009550-R1		VIGENCIA	20/09/2033	
ESTÉRIL	No		MÉTODO:	No se recomienda esterilizar	
CLASIFICACIÓN DE RIESGO:		IIA	VIDA ÚTIL:	2 años	
TIPO DE DISPOSITIVO:		No Invasivo			



FABRICANTE: 4L HEALTH CO. LTD		PAÍS DE ORIGEN:	CHINA	
NUMERO DE US	OS PERMITIDOS:	Uno (1)	PRESENTACION COMERCIAL:	Bolsa plástica

CARACTERISTICAS				
DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO	El cánister de 800 mL ForYou, está destinado para ser empleado como un dispositivo de uso único para almacenamiento temporal de fluido de aspiración médico/quirúrgico o residuos líquidos. Dirigido a pacientes con heridas crónicas, agudas, traumáticas, subagudas y dehiscentes, quemaduras de espesor parcial, úlceras (tales como diabéticas o por presión), colgajos e injertos. Instrucciones para el uso del canister. 1. Encajar la tapa en el borde del contenedor para sellar firmemente la periferia alrededor de todo el borde. 2. Ensamblar el tubo de vacío al "puerto de la Aspiradora" sobre la tapa. 3. Conectar el tubo del paciente al "puerto del paciente". 4. Comience la succión después de seguir los pasos 1-3			
USO INDICADO	Recolección del exudado de heridas tratadas con el dispositivo FORYOU NPWT.			
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			
CA32	CANISTER 800 ML			

PARTES	MATERIAL CONSTITUTIVO	
Тара	Polipropileno (PP)	
Recipiente	Poliestireno estándar (GPPS)	
CONSUMIBLES REQUERIDOS PARA SU USO:	Tubo conector, accesorios del dispositivo y dispositivo FORYOU NPWT	

CUIDADOS EN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO					
Temperatura recomendada (°C):	-10 - 50	Humedad recomendada (%):	5 - 85		
	Almacenar en un lugar limpio y seco cumpliendo los parámetros establecidos. Procure mantener la integridad del empaque y del dispositivo.				

CO01-03 V02