

		FICHA TÉCNICA - DISPOSITIVO MÉDICO	
INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE COMERCIAL: Grapadora Circular Stapler tipo delfín			
NOMBRE GENÉRICO: Grapadora Circular Laparoscópica			
REGISTRO SANITARIO: 2023DM-0009607-R1	VIGENCIA: 11/09/2033		
ESTÉRIL: Si	MÉTODO: No se recomienda esterilizar		
CLASIFICACIÓN DE RIESGO: IIB	VIDA ÚTIL: 5 Años		
TIPO DE DISPOSITIVO: Invasivo quirúrgico			
FABRICANTE: B.J.ZH. PANTHER MEDICAL EQUIPAMET CO. LTD		PAÍS DE ORIGEN: CHINA	
NUMERO DE USOS PERMITIDOS: Uno (1)		PRESENTACION COMERCIAL: Unidad en Blíster	
CARACTERÍSTICAS			
DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO	La grapadora circular tipo delfín, esta diseñada para usarse en procedimientos quirúrgicos abiertos o por laparoscopia, colocando una fila circular de grapas de titanio escalonadas dobles mientras se reseca el tejido y se crea una anastomosis circular, cortando y uniendo al mismo tiempo. La combinación única de altura variable de la grapa con yunque inclinable proporciona una anastomosis segura en una amplia gama de tejidos, con una extracción posterior a la cocción fácil y segura. Tiene doble seguridad (Dual Safety) interna y externa para ofrecer una operación más segura previniendo el disparo en el momento erróneo; e incorporación de la arandela de corte, la cual ofrece una respuesta táctil y audible al cirujano después de haber producido el disparo del instrumento. Doble velocidad: en las últimas etapas del procedimiento de cierre, el cierre por cada vuelta de la tuerca será más lento que en el inicio del procedimiento. La velocidad diferente de cierre proporcionará un mejor control evitará daños en los tejidos.		
USO INDICADO	Realizar anastomosis en procedimiento quirúrgicos abiertos o por laparoscopia.		
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN ADICIONAL	
FCSME24	GRAPADORA CIRCULAR 24 MM	Diámetro externo 24 mm Altura de la grapa 4.8 mm Cierre de la grapa 1.4 - 2.2 mm	
FCSME26	GRAPADORA CIRCULAR 26 MM	Diámetro externo 26 mm Altura de la grapa 4.8 mm Cierre de la grapa 1.6 - 2.4 mm	
FCSME29	GRAPADORA CIRCULAR 29 MM	Diámetro externo 29 mm Altura de la grapa 4.8 mm Cierre de la grapa 1.6 - 2.4 mm	
FCSME32	GRAPADORA CIRCULAR 32 MM	Diámetro externo 32 mm Altura de la grapa 5 mm Cierre de la grapa 1.8 - 2.6 mm	
PARTES		MATERIAL CONSTITUTIVO	
Grapadora		Resina Polimérica y acero inoxidable	
CUIDADOS EN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO			
Temperatura recomendada (°C):	15 - 40	Humedad recomendada (%):	75
Recomendaciones Especiales	Almacenar en un lugar limpio y seco cumpliendo los parámetros establecidos. Procure mantener la integridad del empaque y del dispositivo.		