

Pieza en T ergonómica



PIEZA EN T ERGONÓMICA DE USO INDIVIDUAL **NEOPUFF DE F&P**

La pieza en T ergonómica de Fisher & Paykel Healthcare es un circuito de reanimación para lactantes que se puede utilizar con el dispositivo de reanimación con pieza en T para lactantes Neopuff™ de F&P

El diseño de la pieza en T ergonómica incorpora una válvula de presión espiratoria final positiva (PEEP) que permite controlar las respiraciones de manera fácil y cómoda.

La pieza en T ergonómica incorpora un puerto de pico de pato de silicona. Esto permite aplicar el surfactante mediante un tubo endotraqueal durante la administración de la PEEP. Asimismo, puede funcionar como puerto de succión.



PIEZA EN T ERGONÓMICA | CARACTERÍSTICAS


La pieza en T ergonómica es un circuito de reanimación de lactantes diseñado para el dispositivo de reanimación con pieza en T para lactantes Neopuff™ de F&P. Ofrece un amplio abanico de funciones, como una válvula de PEEP que permite seleccionar con precisión el nivel deseado de PEEP, un puerto de pico de pato integrado y un conducto de 1,6 m (63") de longitud.

Ergonomía de la válvula de PEEP

El diseño de la pieza en T ergonómica incorpora una mejor orientación de la válvula de presión espiratoria final positiva (PEEP) que permite controlar manualmente las respiraciones de manera cómoda mediante distintas posiciones.

Puerto de pico de pato

El puerto de pico de pato integrado permite aplicar el surfactante durante el suministro de la PEEP. Una PEEP uniforme contribuye a abrir los pulmones del lactante con el fin de establecer la capacidad residual funcional (CRF).

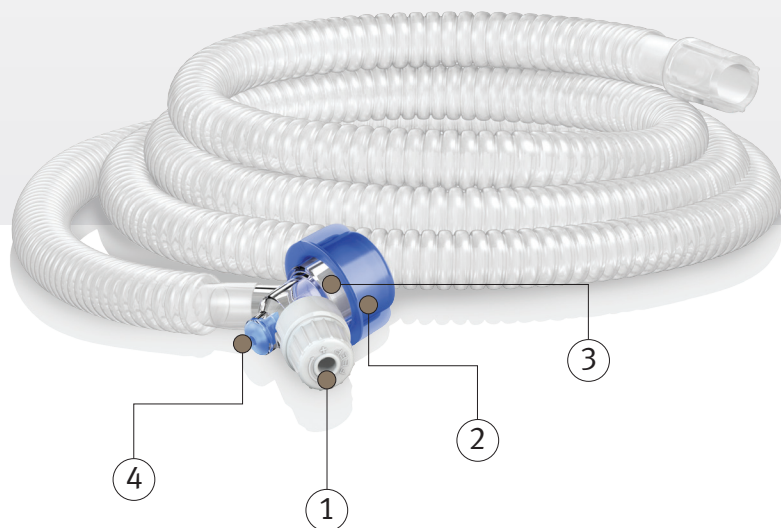

1. Ergonomía de la válvula de PEEP regulable

- Permite controlar las distintas posiciones manualmente y con comodidad
- Una mayor estabilidad en el ajuste de la válvula de PEEP con el fin de evitar cambios imprevistos en la PEEP

2. Práctica tapa de la pieza en T

- Configuración y comprobación fiable de la presión
- Se puede retirar y acoplar a una máscara o tubo endotraqueal
- Protege la pieza en T mientras el dispositivo se encuentra inactivo

3. Conexión versátil de la pieza en T

- Dos opciones de conexión que permiten su acoplamiento a una máscara y a un tubo endotraqueal (hembra de 15 mm y macho de 22 mm)

4. Puerto exclusivo de pico de pato

- Permite la administración de surfactante durante la PEEP
- Permite mantener colocada la pieza en T durante procesos de succión

PIEZA EN T ERGONÓMICA

	RD1300-10	RD1301-10
Cantidad de la caja	10 piezas en T ergonómicas	10 piezas en T ergonómicas 10 conductos de suministro de aire de 2,1 m (82,7")
Longitud del tubo	1,6 m (63")	
Puerto de pico de pato	5 Fr a 8 Fr (1,7-2,7 mm de D.E., 0,06"-0,11" de D.E.)	
Material	El producto no contiene DEHP ni látex y dispone de un puerto de pico de pato de silicona	
Limpieza	Uso individual (un solo paciente); el material suministrado no está debidamente esterilizado	
Eliminación	Elimínese de acuerdo con el protocolo del hospital	

Nota: Fisher & Paykel Healthcare ofrece también las opciones de circuito con pieza en T humidificado y clásico Consulte el catálogo de productos de reanimación de lactantes.

www.fphcare.com

Manufacturer ■ Fisher & Paykel Healthcare Ltd, 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, PO Box 14 348 Panmure, Auckland 1741, New Zealand Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Email: info@fphcare.co.nz Web: www.fphcare.com **Australia** Fisher & Paykel Healthcare Pty Limited, 36-40 New Street, PO Box 167, Ringwood, Melbourne, Victoria 3134, Australia Tel: +61 3 9879 5022 Fax: +61 3 9879 5232 **Austria** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22 **Benelux** Tel: +31 40 216 3555 Fax: +31 40 216 3554 **China** Tel: +86 20 3205 3486 Fax: +86 20 3205 2132 **France** Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221 **Germany** Tel: +49 7181 98599 0 Fax: +49 7181 98599 66 **India** Tel: +91 80 4284 4000 Fax: +91 80 4123 6044 **Irish Republic** Tel: 1800 409 011 **Italy** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japan** Tel: +81 3 3661 7205 Fax: +81 3 3661 7206 **Northern Ireland** Tel: 0800 132 189 **Spain** Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379 **Sweden** Tel: +46 8 564 76 680 Fax: +46 8 36 63 10 **Switzerland** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **Taiwan** Tel: +886 2 8751 1739 Fax: +886 2 8751 5625 **Turkey** Tel: +90 312 354 34 12 Fax: +90 312 354 31 01 **UK** (EU Authorised Representative) Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Unit 16, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 7BU, UK Tel: +44 1628 626 136 Fax: +44 1628 626 146 **USA/Canada** Tel: 1800 446 3908 or +1 949 453 4000 Fax: +1 949 453 4001