

CIRCUITOS DESECHABLES

Crossvent2



Referencia 40011 Circuito pediátrico desechable
Referencia 20011 Circuito neonatal desechable

Recomendaciones:

Siempre utilice un filtro de paciente en el circuito respiratorio de paciente para prevenir contaminación cruzada.

Debe tenerse un cuidado extremo para asegurar que los componentes del circuito de paciente se encuentren conectados correctamente. Una conexión inadecuada puede causar mal funcionamiento.

Al usar el circuito infantil, la configuración es esencialmente la misma. El neumotacógrafo debe ser ubicado en la Y del paciente al final de circuito.

Al usar un filtro de paciente, conéctelo directamente al conector de paciente al lado del Crossvent (o en la T de O₂, si se utiliza el sensor), y luego conecte el circuito del paciente (o la manguera de 24" si se utiliza un humidificador) al filtro.

Para utilizar con un brazo de soporte, agarre el brazo de sujeción a la válvula exhalatoria como se muestra aquí, y luego capture la esfera con el brazo de soporte.

Al utilizar un humidificador, utilice la manguera de 24" entre el equipo y el humidificador. Luego conecte el circuito a la salida del humidificador y realice las conexiones como normalmente haría.

