

Juego de tubo

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Conecte cada tramo del WYE a las fuentes de gas, proporcionando rangos de flujo.
2. Conecte el Neo-Tee al WYE.
3. Ajuste cada dispositivo de flujo con el rango de flujo deseado. **NOTA:** Los flujos de cada dispositivo producen un flujo combinado en la salida.

ADVERTENCIAS:

1. En la salida del WYE, los flujos están combinados.
2. Si se utiliza una mezcla de gases (p. ej. aire/O₂), consulte la tabla que figura a continuación:

Tasa de flujo del oxígeno en LPM

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tasa de flujo del aire en LPM	0 LPM						5L, 100%	6L, 100%	7L, 100%	8L, 100%	9L, 100%	10L, 100%	11L, 100%	12L, 100%	13L, 100%	14L, 100%	15L, 100%
	1 LPM					5L, 84%	6L, 87%	7L, 89%	8L, 90%	9L, 91%	10L, 92%	11L, 93%	12L, 93%	13L, 94%	14L, 94%	15L, 95%	
	2 LPM				5L, 80%	6L, 84%	7L, 87%	8L, 89%	9L, 90%	10L, 91%	11L, 92%	12L, 93%	13L, 93%	14L, 94%	15L, 94%		
	3 LPM			5L, 53%	6L, 60%	7L, 66%	8L, 70%	9L, 74%	10L, 76%	11L, 78%	12L, 80%	13L, 82%	14L, 83%	15L, 84%			
	4 LPM		5L, 37%	6L, 47%	7L, 55%	8L, 60%	9L, 65%	10L, 68%	11L, 71%	12L, 74%	13L, 76%	14L, 77%	15L, 79%				
	5 LPM	5L, 21%	6L, 34%	7L, 44%	8L, 51%	9L, 56%	10L, 60%	11L, 64%	12L, 67%	13L, 70%	14L, 72%	15L, 74%					
	6 LPM	6L, 21%	7L, 32%	8L, 41%	9L, 47%	10L, 53%	11L, 57%	12L, 60%	13L, 64%	14L, 66%	15L, 68%						
	7 LPM	7L, 21%	8L, 31%	9L, 39%	10L, 45%	11L, 50%	12L, 54%	13L, 57%	14L, 60%	15L, 63%							
	8 LPM	8L, 21%	9L, 30%	10L, 37%	11L, 43%	12L, 47%	13L, 51%	14L, 55%	15L, 58%								
	9 LPM	9L, 21%	10L, 29%	11L, 35%	12L, 41%	13L, 45%	14L, 49%	15L, 53%									
	10 LPM	10L, 21%	11L, 28%	12L, 34%	13L, 39%	14L, 44%	15L, 47%										
	11 LPM	11L, 21%	12L, 28%	13L, 33%	14L, 38%	15L, 42%											
	12 LPM	12L, 21%	13L, 27%	14L, 32%	15L, 37%												
	13 LPM	13L, 21%	14L, 27%	15L, 31%													
	14 LPM	14L, 21%	15L, 26%														
	15 LPM	15L, 21%															

NOTA: LOS DATOS SE ENUMERAN COMO L PARA LA "TASA DE FLUJO EN LITROS POR MINUTO", % PARA LA "CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO"

NOTA 2: LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO SE BASA EN AIRE QUE CONTIENE 20,95 % DE OXÍGENO

3. No supere los 15 LPM de flujo total.
4. Controle siempre los flujos de salida con el analizador de oxígeno para confirmar la concentración de oxígeno.
5. Para evitar una restricción o resistencia de flujo, no use conectores o rótulas adicionales.
6. Todo incidente grave que se haya producido en relación con el producto se deberá notificar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.



2797
EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



No reutilizar



No estéril



DINP



Este producto no ha sido fabricado con látex de caucho natural



Solo con receta



RM condicional