



Sistema CPAP nasal Miniflow



Miniflow es un generador CPAP que puede utilizarse en modo CPAP con respiradores. Para ello, Miniflow pueden conectarse a tubos de inspiración y espiración y, a través de ellos, a un respirador. El respirador regula los parámetros CPAP y suministra el gas necesario a Miniflow.

Miniflow se conecta al tubo de inspiración y al tubo de espiración; se puede integrar en la conexión una pieza en T para medir la presión en caso de que sea necesario medir la presión del paciente (REF 4010).


Para ajustar los parámetros CPAP, se deben cerrar los adaptadores de cánulas de Miniflow, por ejemplo, con los dedos. Si no es posible, se debe comprobar si existen fugas en las conexiones.

Miniflow requiere además el uso de una cánula o una mascarilla. Debe seleccionarse una cánula o mascarilla que se ajuste a la nariz del paciente; después, se insertará en los adaptadores de cánulas de Miniflow. Se debe tener en cuenta que:

- se selecciona siempre la cánula más grande posible para evitar fugas
- se alterna periódicamente entre el uso de cánula y de la mascarilla
- la cánula se inserta solamente hasta la mitad de la nariz del paciente



Importante: Miniflow es un producto de un solo uso para un único paciente.

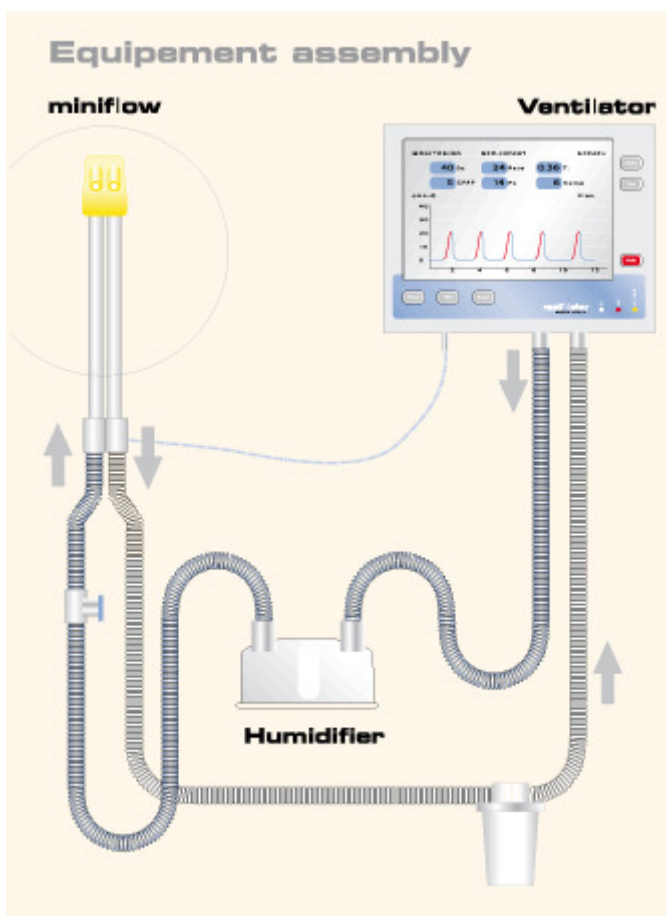

Miniflow se fija en un gorro con el tamaño adecuado para el paciente. Se abre el cierre de velcro, se pasan las cintas a través de los orificios de la cánula o de la mascarilla.

A continuación, Miniflow se coloca con la cánula o la mascarilla correspondiente en la nariz del bebé y las cintas se fijan en el gorro por detrás de las orejas, de manera que no queden encima de los ojos.

Asegúrese de que las cintas no estén demasiado apretadas. Para sujetarlo se utilizan los tubos de Miniflow, que quedan fijados con el cierre de velcro. A pesar de ello, debe comprobarse periódicamente la posición de Miniflow, de la cánula o la mascarilla y el gorro.

Ventajas de Miniflow:

- Mínimo espacio muerto
- Separación del gas de inspiración y del gas de espiración
- Compatible con los accesorios de Medijet®
- Reducción del trabajo respiratorio
- Adaptador de cánulas flexible para una colocación óptima
- Silencioso
- Fácil de usar

<i>DESCRIPCION</i>	<i>REF</i>	<i>IMAGEN</i>	<i>UNIDAD MINIMA</i>
SISTEMA MINIFLOW	4000		10 UNID
CANULA NASAL MICRO	1200-01		10 UNID
CANUALA NASAL PEQUEÑA	1200-21		10 UNID
CANULA NASAL MEDIANA	1200-02		10 UNID
CANULA NASAL GRANDE	1200-22		10 UNID
CANULA NASAL X- GRANDE	1200-03		10 UNID
MASCARILLA PEQUEÑA	1200-04		10 UNID
MASCARILLA MEDIANA	1200-05		10 UNID
MASCARILLA GRANDE	1200-06		10 UNID

GORRO TALLA S	1215-10		10 UNID
GORRO TALLA M	1216-10		10 UNID
GORRO TALLA L	1217-10		10 UNID
GORRO TALLA XL	1218-10		10 UNID

