

HOJA DE ESPECIFICACIONES




INTERFAZ NEONATAL FLEXITRUNK DE F&P

Fisher & Paykel Healthcare ha desarrollado la interfaz neonatal para su uso con el sistema CPAP de burbujas de F&P y otros sistemas nCPAP y de apoyo no invasivo.

La interfaz se ha diseñado para facilitar la administración de CPAP con comodidad para el neonato y de forma que ayude en las prácticas actuales de cuidados en el desarrollo.

La interfaz neonatal de F&P consiste en el tubo nasal FlexiTrunk™, cánulas nasales o máscaras y gorro o arnés para neonatos. También hay disponibles correas para la barbilla para evitar fugas en la zona de la boca.

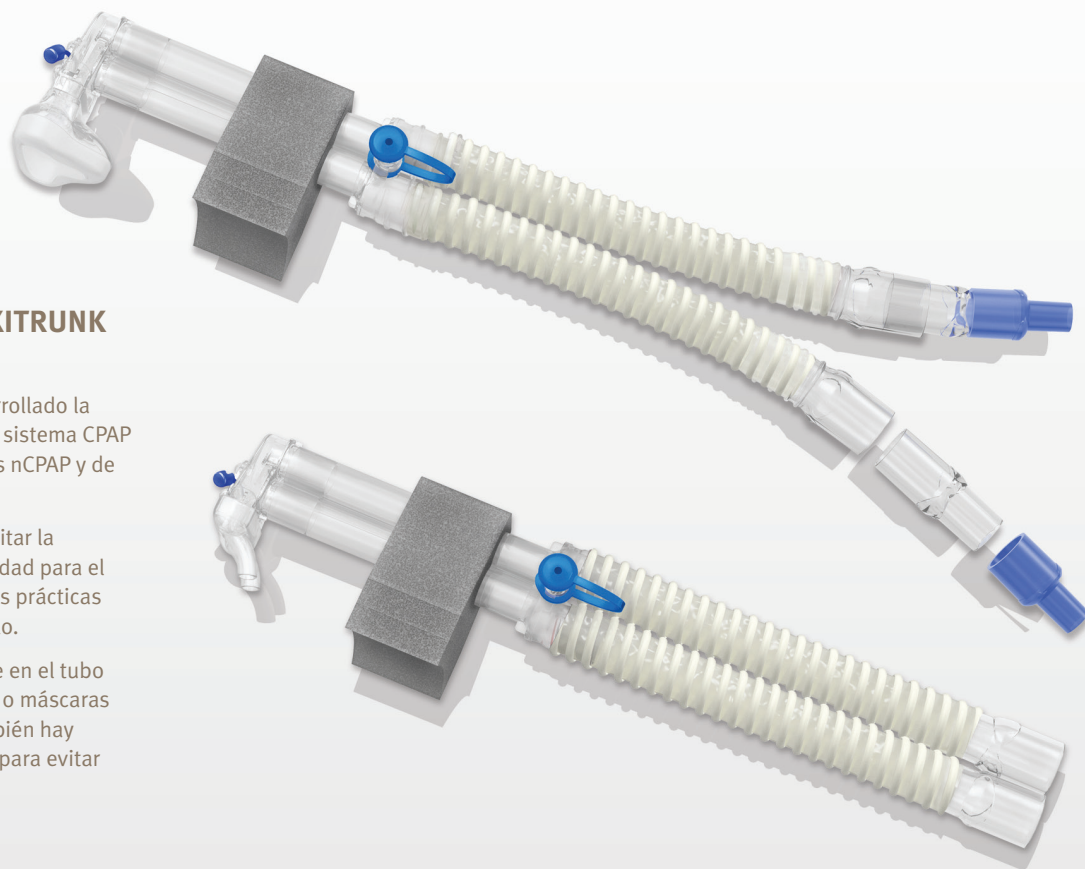

Gama ideal de interfaces

La gama de interfaces para prácticas de cuidados en el desarrollo FlexiTrunk™ ofrece una serie de características únicas. Mediante la combinación de diseños inteligentes con funcionalidad y comodidad, los componentes de la interfaz crean una interfaz que se complementa con el sistema CPAP de burbujas de F&P y con configuraciones de ventilador nCPAP y otros dispositivos de ventilación no invasivos.



1. Máscara nasal neonatal

- Diseñada con una tecnología de escaneo facial de neonatos en 3D para un ajuste y sellado óptimos
- Suave, de silicona y con forma anatómica
- Tamaño y profundidad ideales que evitan que la máscara toque la punta de la nariz*
- Requiere menos fuerza para el sellado
- Se conecta de forma intercambiable con cánulas en el FlexiTrunk™




2. Cánulas nasales neonatales

- Suaves, de silicona, maleables y delicadas con las narinas
- Anatómicamente curvado para un cómodo ajuste
- Corte para el tabique nasal, diseñado para evitar lesiones en el mismo



3. Correa para la barbilla neonatal

- Eleva las mandíbulas de los bebés prematuros para aprovechar al máximo el efecto de la CPAP y reducir al mínimo las fugas en la zona de la boca
- Material suave y maleable

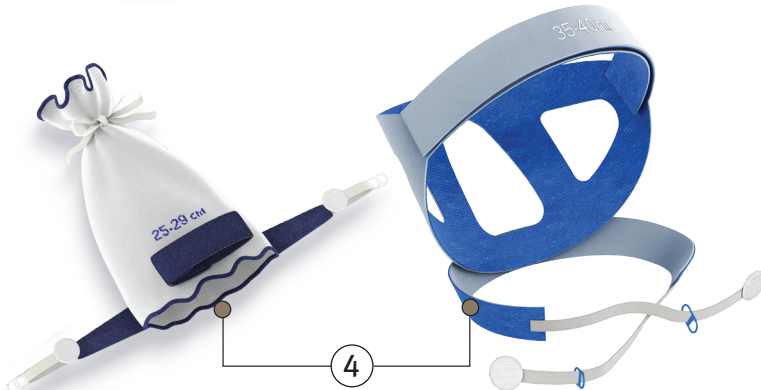


4. Gorro y arnés neonatal

- Acceso abierto en la parte superior del gorro para procedimientos clínicos
- Fijación en 3 puntos para un ajuste estable
- El arnés está fabricado con un material suave y elástico y se ha diseñado para neonatos de mayor tamaño.

* Si se escoge el tamaño adecuado de máscara

FlexiTrunk™ UN VISTAZO A LAS Características

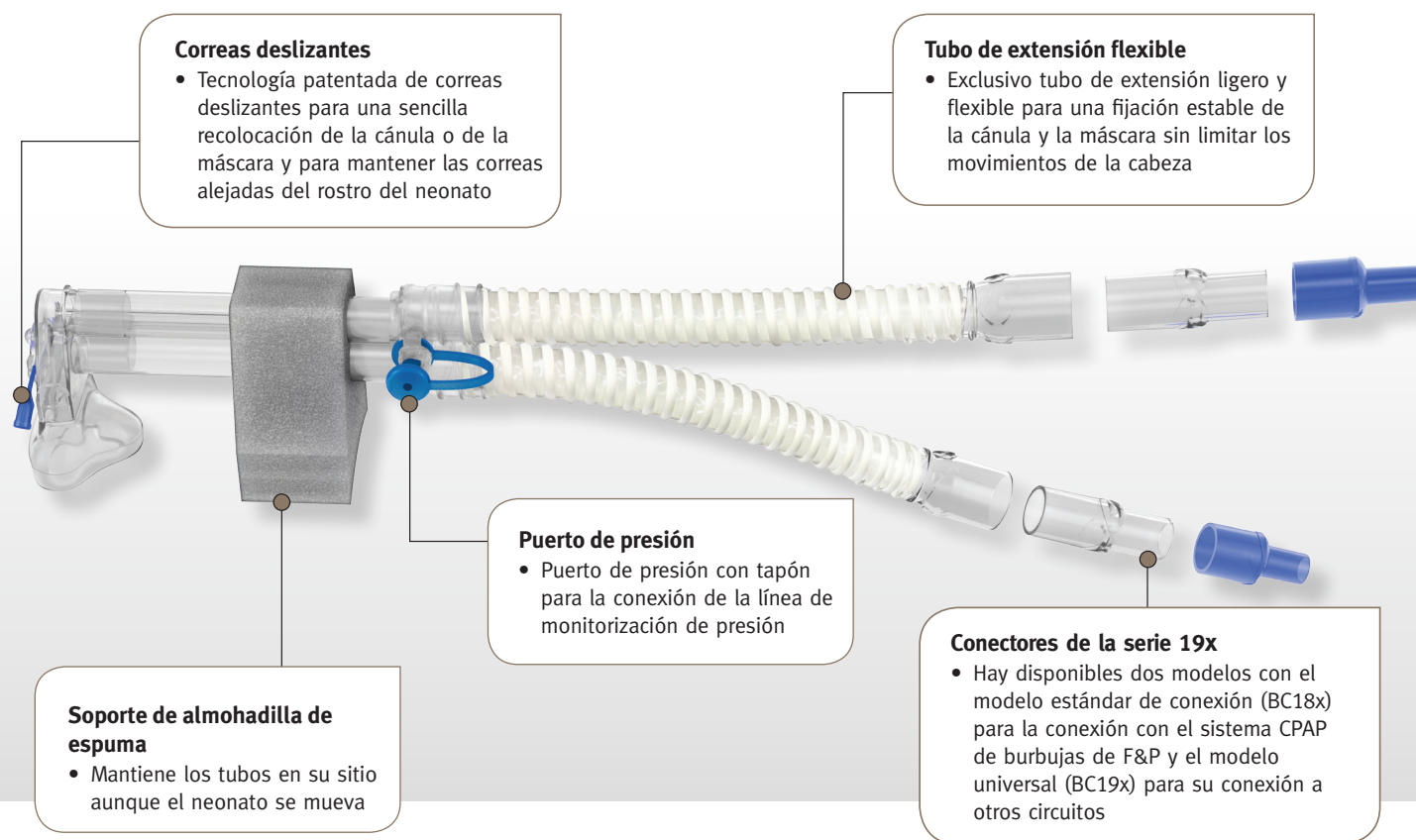

Especificaciones de la interfaz neonatal de F&P



TUBOS NAALES, CANULAS NAALES Y MÁSCARA NASAL PARA NEONATOS				
Tubo nasal	Código de producto	Resistencia al flujo	Longitud total	Longitud de lumen triple
	BC180-05 / BC190-05	0,52 cmH ₂ O a 6 L/min	207 mm	50 mm
	BC181-05 / BC191-05	0,53 cmH ₂ O a 6 L/min	227 mm	70 mm
	BC182-05 / BC192-05	0,54 cmH ₂ O a 6 L/min	257 mm	100 mm
Cánulas nasales	Código de producto	Resistencia al flujo	Material	
	BC4030-10	1,13 cmH ₂ O a 6 L/min	Silicona (no contiene látex)	
	BC6570-10	0,10 cmH ₂ O a 6 L/min		
Máscara nasal	Código de producto	Resistencia al flujo	Material	
	BC800-10	0,05 cmH ₂ O a 6 L/min	Silicona (no contiene látex)	
	BC801-10	0,03 cmH ₂ O a 6 L/min		
	BC802-10	< 0,03 cmH ₂ O a 6 L/min		

GORRO, ARNÉS Y CORREA PARA LA BARBILLA PARA NEONATOS	
Descripción del producto	Material
Gorro neonatal	Mezcla de algodón/nylon (no contiene látex)
Arnés neonatal	Laminado de nylon/neopreno (no contiene látex)
Correa para la barbilla neonatal	Laminado de nylon/poliuretano (no contiene látex)

Nota: todos los componentes de la anterior lista son para su uso en un único paciente.

Interfaz neonatal de F&P | TAMAÑOS

La guía siguiente ilustra la gama de tamaños que se puede utilizar en neonatos, agrupados por peso. Cada neonato es distinto. Deben realizarse mediciones reales para obtener un ajuste ideal y lograr la mejor administración de la terapia.

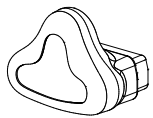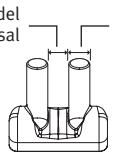	CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO DEL PRODUCTO	TAMAÑO DEL NEONATO (APROX.)		
			< 1000 G	≤ 2500 G	> 2500 G
 Estándar (serie BC18x) Universal (serie BC19x) con conectores	BC180-05/BC190-05	50 mm	•		
	BC181-05/BC191-05	70 mm	•	•	
	BC182-05/BC192-05	100 mm		•	•
	BC300-05	17-22 cm	•		
	BC303-05	22-25 cm	•	•	
	BC306-05	25-29 cm		•	
	BC309-05	29-36 cm		•	•
	BC325-05	29-36 cm			•
	BC328-05	35-40 cm			•
	BC331-05	40-45 cm			•
	BC800-10	Pequeño	•		
	BC801-10	Mediano		•	
	BC802-10	Grande			•
 Separación del tabique nasal Diámetro de narinas *3,0 mm/2,0 mm Diámetro de narinas/ Separación del tabique nasal	BC3020-10	3,0 mm/2,0 mm *	•		
	BC3520-10	3,5 mm/2,0 mm	•		
	BC4030-10	4,0 mm/3,0 mm	•	•	
	BC4540-10	4,5 mm/4,0 mm		•	
	BC5040-10	5,0 mm/4,0 mm		•	
	BC5050-10	5,0 mm/5,0 mm		•	•
	BC5550-10	5,5 mm/5,0 mm		•	•
	BC5560-10	5,5 mm/6,0 mm			•
	BC6060-10	6,0 mm/6,0 mm			•
	BC6070-10	6,0 mm/7,0 mm			•
	BC6570-10	6,5 mm/7,0 mm			•

Nota: consulte el catálogo de productos del sistema CPAP de burbujas de F&P o póngase en contacto con su representante local de Fisher & Paykel Healthcare para una información completa sobre los pedidos.