

DESCRIPCIÓN GENERAL

El Limpiador Multientzimático es un detergente enzimático poco espumante para uso en aplicaciones de limpieza manual, ultrasónica y automatizada. Este producto se puede utilizar en instrumentos quirúrgicos, endoscopios y otros dispositivos médicos para la remoción de sangre, proteínas, carbohidratos, moco y lípidos. El Limpiador Multientzimático es compatible con acero inoxidable, plásticos, elastómeros y metales blandos, incluido el aluminio.

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

Sistema multientzimático	Contiene 6 tipos de enzimas que incluyen: proteasa, lipasa, mananasa, celulasa, Amilasa y pectato liasa para la limpieza de amplio espectro. Contiene 8 enzimas totales.
Color agregado	La alta visibilidad del producto en el fregadero / ultrasonidos asegura que la química se agregue con cada uso
Sistema enzimático/detergente eficaz	Eficaz en la sangre, grasa, moco y otras suciedades.
Inhibidores de corrosión/pH neutro	Compatibilidad de sustrato de amplio espectro que incluye aluminio, aluminio anodizado y plásticos
Poco espumante	Fácil de enjuagar
Biodegradable	Cuidado del medio ambiente

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Forma.....	Líquida
Color.....	Azul
Olor.	Suave
pH típico	7,0
Gravedad específica típica.....	1,02

INSTRUCCIONES PARA USO

Aplicaciones Manuales/Ultrasónicas: Llene el fregadero o la cubeta con agua tibia al nivel adecuado para sumergir completamente los instrumentos quirúrgicos. Diluya el producto en 2 ml a 7,5 ml por litro (1/4 a 1 onza líquida por galón) de agua tibia, dependiendo de la carga sucia. Limpie por un mínimo de 1 a 5 minutos. Los tiempos de limpieza pueden ser más largos con el secado de la suciedad. No exceda 55°C (130°F). después de la limpieza, todas las superficies deben enjuagarse bien con agua tibia. Las soluciones deben desecharse diariamente o cuando estén visiblemente sucias.

Lavadoras/ Termodesinfectadoras automatizadas: alimiente automáticamente a 2 ml a 7,5 ml por litro (1/4 a 1 onza líquida por galón), dependiendo de la calidad del agua y la carga sucia.

Consulte las instrucciones de reprocesamiento recomendadas por el fabricante para determinar cualquier procedimiento adicional necesario para limpiar su dispositivo médico en particular.

Los dispositivos médicos deben esterilizarse o desinfectarse por medios apropiados en un paso posterior separado.

Este es un producto completo. No agregue otros productos químicos, como blanqueador o detergentes. Los químicos añadidos pueden destruir la efectividad de este producto.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO

Almacene en un lugar fresco (por debajo de 90°F [32°C]). Mantener fuera del alcance de los niños. Desechar de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales. Los recipientes vacíos deben enjuagarse y desecharse en un recipiente para desechos o, de ser posible, ofrecerse para su reciclaje. No utilice los recipientes vacíos para otros fines.

SOPORTE

Servicio

El servicio es una de las formas más importantes de verificar la calidad constante del desempeño y la operación de la instalación. Un programa de servicio personalizado de STERIS brinda operaciones efectivas y sin problemas.

Técnico

Póngase en contacto con STERIS en el número 800 que se indica a continuación para obtener información sobre las aplicaciones del producto, el producto por general o copias de la Hoja de Datos de Seguridad (SDS). En caso de emergencia, llame al grupo de asuntos regulatorios St. Louis Operations de STERIS al 314- 535-1395.

Para más información, póngase en contacto:



STERIS Corporation
Avenida Bem Te Vi, 77
3º andar, Moema – São Paulo – SP
Cód. postal 04524-030 • BRASIL
(55 11) 3372-9499
www.sterislatam.com

Este documento está destinado al uso exclusivo de los clientes de STERIS, incluidos arquitectos o diseñadores. Queda prohibida la reproducción total o parcial por parte de un tercero que no sea un Cliente