

DESCRIPCIÓN GENERAL

La Cinta Indicadora VERIFY **VH202** es un indicador de proceso Tipo 1 conforme definido por la American National Standards Institute/Association for the Advancement of Medical Instrumentation/International Standards Organization (ANSI/AAMI/ISO) 11140-1.¹ La Cinta Indicadora VERIFY **VH202** se destina a mantener seguros los artículos empaquetados en materiales sintéticos hasta su uso y diferenciar entre las unidades procesadas y no procesadas a través del cambio del color del color inicial (rosado) al color durazno, amarillo o más claro.

La cinta puede usarse en los siguientes ciclos de esterilización:

- Ciclos Sin Lumen, Flexible y con Lumen de los Esterilizadores a Baja Temperatura V-PRO® 1, 1 Plus, maX y 60
- Ciclo Estándar del Esterilizador* STERRAD® 100S
- Ciclos Estándar y Avanzado del Esterilizador STERRAD® NX
- Ciclos Estándar, Express, Flex Scope y Duo del Esterilizador STERRAD® 100NX

APLICACIÓN

La Cinta Indicadora VERIFY **VH202** se destina a mantener seguros los artículos empaquetados en materiales sintéticos.

CARACTERÍSTICAS

Indicador Químico Tipo 1

Una cinta puede usarse para los Esterilizadores V-PRO y Esterilizadores STERRAD® 100S, NX y 100NX

Fabricada sin plomo, metales pesados, látex de caucho natural y caucho natural seco

Puede usarse con un dispensador de cinta con un núcleo de 3"

BENEFICIOS

El cambio nítido del color proporciona identificación inmediata de las cargas procesadas y no procesadas

Reduce el stock y ayuda a estandarizar los procesos

Sin preocupaciones por la toxicidad del plomo u otro metal pesado y alergias al látex

Fácil almacenamiento y uso

PROPIEDADES TÉCNICAS

Los datos de pruebas demuestran que el Indicador Químico VERIFY **VH202** cumple con los requisitos de rendimiento establecidos para un indicador de proceso Tipo 1 **VH202** de acuerdo con ANSI/AAMI/ISO) 11140-1.1

Indicador Químico: Para uso en sistemas de esterilización a baja temperatura por peróxido de hidrógeno gaseoso.

Tabla 1: Aplicaciones de la Cinta Indicadora VERIFY **VH202**

Esterilizador	Ciclo del Esterilizador
Esterilizador V-PRO	Ciclo con Lumen
Esterilizador V-PRO	Ciclo sin Lumen y con Lumen
Esterilizador V-PRO	Ciclo Flexible, sin Lumen y con Lumen
Esterilizador V-PRO	Ciclo Flexible, sin Lumen y con Lumen
Esterilizador STERRAD 100S	Ciclo Estándar
Esterilizador STERRAD	Ciclo Estándar y Avanzado
Esterilizador STERRAD	Ciclo Estándar, Express, Flex Scope y Duo

Ancho de la cinta: 19 mm (3/4 in.)

Longitud de la cinta: aproximadamente 55 m (60 yardas)

Diámetro interior aproximado del rollo de cinta: 76 mm (3 in.)

Componentes: papel crepe especialmente tratado, adhesivo, indicador químico sensible al peróxido de hidrógeno, embalaje de aluminio

INSTRUCCIONES DE USO

Adjunte los artículos a esterilizar en un embalaje apropiado de material sintético. Abroche el paquete con la Cinta Indicadora VERIFY **VH202**. Tras el proceso de esterilización, observe la cinta indicadora. Verifique que se haya producido un claro cambio de color en la tinta del indicador VERIFY **VH202** de rosado (color inicial) a durazno, amarillo o más claro. Si la tinta no cambia, es posible que la exposición al proceso de esterilización no se haya producido debido a un mal funcionamiento del equipo o un error de procedimiento en el proceso de esterilización.

Un dispensador de cinta múltiplo (número de pieza PD004) está disponible en STERIS para uso con la Cinta Indicadora VERIFY **VH202**.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantenga la cinta no utilizada a 16° a 24°C (61-75°F) y Humedad Relativa de 30 a 60% lejos de la luz directa. No almacene la cinta indicadora cerca del calor, humedad, agentes oxidantes, ácidos/álcalis o agentes de limpieza/desinfección.

SERVICIO

Ventas

El servicio es una de las maneras más importantes de verificar la calidad consistente del rendimiento y funcionamiento del equipo. Un programa personalizado de servicios por STERIS Corporation brinda operaciones eficaces y libre de problemas.

Servicios Técnicos

STERIS Corporation se complace de ofrecer un laboratorio de servicios técnicos totalmente equipado y con todo el personal capaz de realizar las pruebas necesarias y proporcionar atención por teléfono o presencial cuando sea necesario. Obtenga más detalles de cómo ese servicio puede ser beneficioso en una situación particular de su instalación mediante solicitud.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción	Cantidad	Número de Pedido
Cinta Indicadora VERIFY VH202	1 rollo/caja	PCC070
Cinta Indicadora VERIFY VH202	6 rollos/caja	PCC071
Dispensador de cinta	Cada	PD004

Referencias:

1. Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). Sterilization of health care products – Chemical Indicators – Part 1: General requirement. ANSI/AAMI/ISO 11140-1-1:2014

* STERRAD es una marca registrada de Johnson and Johnson Corporation.

Para más información, póngase en contacto:

STERIS®



STERIS Corporation
Avenida Bem Te Vi, 77
3º andar, Moema – São Paulo – SP
Cód. postal 04524-030 • BRASIL
(55 11) 3372-9499
www.sterislatam.com

Este documento está destinado al uso exclusivo de los clientes de STERIS, incluidos arquitectos o diseñadores. Queda prohibida la reproducción total o parcial por parte de un tercero que no sea un Cliente.