

3M Soluprep

Aplicador con Solución Antiséptica Coloreada

Ficha Técnica



Descripción

Aplicador estéril de dosis única, con 35 ml de solución antiséptica coloreada (rosa transparente) de Gluconato de Clorhexidina al 2% p/v y Alcohol Isopropílico al 70% v/v con esponja suave de calidad quirúrgica.

Antiséptico de acción rápida, efecto residual, amplio espectro. Ayuda a reducir el número de bacterias presentes en la piel para disminuir el riesgo de infección del sitio quirúrgico.

Antiséptico efectivo contra las bacterias gram positivas, gram negativas, hongos y virus.

Volumen de antiséptico presente en el aplicador, **permite la asepsia de superficies extensas de la piel (52x52 cm)**

Fácil de usar, permite control de flujo del antiséptico al ser aplicado sobre la piel.

Presentación reduce el contacto con las manos, en quirófano y en farmacia.

Aprobado por el ISP (Reg. ISP N°: F-20159/13)

Usos

Preparación de la piel del paciente previo a un procedimiento quirúrgico.

Preparación de la piel del paciente previo a un procedimiento invasivo.

Para ser utilizado en Quirófano, Obstetricia, Servicios de Urgencia y Unidades de Cuidado Intensivo

Empaque u otras referencias

Beneficios, precauciones

No se recomienda su uso en menores de 2 meses.

Evitar el contacto con ojos, interior de los oídos, mucosas y meninges.

No utilizar en personas alérgicas al gluconato de clorhexidina o al alcohol isopropílico.

No usar en piel dañada, usar sobre piel intacta.

Descontinuar la utilización en casos de sensibilidad de la piel.

Producto inflamable, mantener alejado de fuentes de calor.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Importante:

Permitir que la solución antiséptica aplicada sobre la piel seque al aire completamente, antes de colocar los campos quirúrgicos y de utilizar fuentes de ignición (electrocauterización, laser). Mínimo de 3 minutos en la piel sin vello o cabello; hasta 1 hora sobre el vello o cabello. No secar el antiséptico con compresa después de la aplicación. Posterior a la preparación de la piel, retirar todo material saturado con solución antiséptica. Evitar que la solución se acumule en un lugar. Verificar debajo del paciente, bajo los brazos, entre los muslos y en el ombligo.

Nota:

Producto de uso único.

El aplicador se mantiene estéril mientras el empaque se mantenga indemne.

El uso del producto debe cumplir con la indicación del fabricante. 3M no se hace responsable por daños derivados del uso indebido del producto.

Almacenamiento y Vida útil

Almacenamiento a no más de 25°C, alejado de fuentes de calor y en ambiente fresco.

Proteger de la luz.

Caducidad en la etiqueta: 36 meses desde su fabricación.

Código Corto	Descripción	Medida	Empaque
10024	Soluprep Aplicador con Solución Antiséptica Coloreada	35 ml	25 Unidades/Caja