

FICHA TECNICA

APOSITO DUODERM® EXTRA DELGADO/FINO

PRODUCTO	
Nombre Genérico	Apósito Hidrocoloide Extra Delgado Con Formula Gel Controlada®
Nombre Comercial	Apósito DuoDERM CGF® Extra Thin
Descripción	Apósito oclusivo hidrocoloide extradelgado
Marca	ConvaTec
Fabricante	ConvaTec Inc. – Estados Unidos
Composición del Producto	Sustancias Hidrocoloides: Carboximetil Celulosa Sódica – Pectina USP- Gelatina Soporte: Película de Polietileno de superficie Matte
Características y beneficios del Producto	Oclusivo: DuoDERM CGF es impermeable a los líquidos, los gases y los microorganismos incluidos los virus del SIDA y la Hepatitis, reduciendo los riesgos de invasión bacteriana y viral. Mantiene el Ph ligeramente Acido (5,0 – 6,0): reduce los riesgos de infección, por mayor actividad de los macrófagos en el control del crecimiento bacteriano. Absorción de Exudado: las sustancias hidrocoloides tienen capacidad de absorber y controlar el exudado, permitiendo cambios de apósito entre 1 y máximo 7 días. Impermeable a los Líquidos: reduce los riesgos de contaminación de la lesión en pacientes con incontinencia y mejora la calidad de vida del paciente , ya que le permite realizar el baño general en ducha sin necesidad de un cubrimiento adicional.
Usos	Úlceras y heridas con exudado leve o escaso superficiales y/o en etapa de epitelización. Úlceras por presión estadio I y II, úlceras de miembros inferiores en etapa de epitelización (venosas, arteriales, diabéticas), quemaduras de primer grado, heridas quirúrgicas, heridas traumáticas, laceraciones y raspaduras.
Recomendaciones de Uso	Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación. ❖ Valorar el lecho de la lesión (condiciones de la herida) y la piel circundante ❖ Limpiar el lecho de la lesión y la piel circundante con solución salina normal, sin utilizar soluciones antisépticas. Secar bien la piel perilesional para asegurar la adhesividad del apósito a la piel sana. ❖ Remover la mayor cantidad de tejido necrótico posible antes de iniciar la terapia ❖ Elegir un tamaño de apósito que sobrepase por lo menos 3 cms, el tamaño de la lesión. ❖ Cambiar el apósito cuando se filtre por alguno de sus bordes o cuando el indicador de cambio lo indique. Promedio de duración 2 a 7 días. ❖ Para retirar el apósito, presione la piel con una mano y levante cuidadosamente un extremo del apósito con la otra. Traccione delicadamente para retirarlo de la herida.

Certificaciones	Latex free (2013) Environmental Statement (2013) Formaldehyde free Statement (2013)
Soporte técnico	1. Singh A, Halder S, Menor Gr. Meta-analysis of randomized controlled trials on hydrocolloid occlusive dressing versus conventional gauze dressing in the healing of chronic wounds. Asian J Surg. 2004 Oct;27(4):326-32. 2. Harding K, Cutting K, Price P The cost- effectiveness of wound managemet protocols of care. Br J Nursing. 2000 (suppl) Vol 9, No19. 3. Kernstein M D, German E, Van Rijswijk L, Lyder CH, Phillips T, Xakells G Golden K Harrington C. Disease Management and Health Outcomes 2001;9(11):651-663 4. Colwell, J, Foreman, M.D., Trotter, J.P.A. Comparison of the efficacy and cost-effectiveness of two methods of managing pressure ulcers. Decubitus 1993; 6 (4): 28-36 5. Arnold, T.E., Stanley, J.C. Prospective, Multicenter, Study of Managing Lower Extremity Venous Ulcers. Annals of Vascular Surgery 1994; 8 (4): 356-362 6.-Chang KW, et al. Med J Malaysia 1998; 53(4): 428-3126 7.-Meaume S, et al. J Wound Care 2002; 11(6): 219-2428 8.-Hollisaz M, et al. BMC Dermatology 2004; 4: 18 25

PRESENTACIÓN

Código	Presentación	Unidades por Caja
CVT1704764	Duoderm Extra Thin 5 x 10 cm	Caja 20 unidades
CVT1704765	Duoderm Extra Thin 7.5 x 7.5 cm	Caja 20 unidades
CVT1704768	Duoderm Extra Thin 10 x 10 cm	Caja 10 unidades
CVT1704769	Duoderm Extra Thin 15 x 15 cm	Caja 10 unidades
CVT1704770	Duoderm Extra Thin 5 x 20 cm	Caja 10 unidades

