

INSERTO

TAGUMESH - Malla de polipropileno de Refuerzo Abdominal**DESCRIPCION**

Es una malla de refuerzo de polipropileno, no absorbible, incolora; unida por enlace térmico, sin derivados de origen animal o humano.

- Material biocompatible a largo plazo, características físicas y mecánicas que permanecen idénticas durante la implantación.
- No se encoje.
- Las zonas de menor densidad favorecen la colonización por parte de las células del tejido huésped, facilitando la integración de la misma.

INDICACIONES

Se recomienda para los procesos herniarios de la pared abdominal, eventraciones, prolapsos rectales, genito-uritarios, por vía laparoscópica o transparietal, sin contacto visceral.

INSTRUCCIONES DE USO

- Leer la descripción del material.
- Seleccionar el tamaño adecuado del producto, en proporción al tamaño del defecto y recortarlo para que encaje perfectamente en el mismo.
- Se recomienda fijar preferentemente con sutura de polipropileno, u otro material de sutura no absorbible o suturas metálicas.

CONTRAINDICACIONES

No debe usarse en niños en crecimiento, personas con enfermedades infecciosas, o alérgicas a los polímeros.

PRECAUCIONES

- Manipular e implantar por un cirujano familiarizado con las técnicas quirúrgicas, así como con las aplicaciones específicas de las mallas.
- Verificar la integridad del envase antes de su uso para garantizar su esterilidad.
- No utilizar si el envase se encuentra dañado o abierto.
- No debe utilizarse después de la fecha de caducidad indicada en su envase.

METODO DE ESTERILIZACION

- Producto Esterilizado por Óxido de Etileno.
- No REESTERILIZAR.

PRESENTACIÓN

Producto disponible en sobres individuales en formas y dimensiones variables.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Transportar y almacenar a temperaturas de 25°C como máximo y un máximo de 60% de humedad, proteger de la luz solar y de fuentes de calor. No apilar más de 10 cajas verticalmente, ubicar el producto en lugares de poca circulación de personal por ser un producto de manejo estéril.

TAGUMEDICA S.A.
AV. MAQUINARIAS N° 2414 – LIMA – PERU
Teléfono: 3368101
e-mail: info@tagumedica.com
website: www.tagumedica.com