

FICHA TECNICA

BOLSA DE OSTOMIA DE UNA PIEZA ACTIVE LIFE® PEDIATRICA

PRODUCTO	
Nombre Genérico	Sistema de Ostomía PEDIATRICA de Una Pieza con bolsa drenable.
Nombre Comercial	Sistema de Ostomías PEDIATRICA de Una Pieza con bolsa drenable. Active Life®
Descripción	Sistema de Una pieza para ostomías digestivas pediátricas, con disco de protección cutáneo stomahesive , confeccionada en tres películas plásticas y panel externo confortable que aísla la humedad. El disco central muestra la demarcación para recortar según los diferentes tamaños y formas del estoma.
Marca	ConvaTec
Fabricantes	ConvaTec Inc. - USA ConvaTec Dominican Republic Inc. - República Dominicana
Composición del Producto	<u>Barrera Protectora de Piel Stomahesive®</u> : Carboximetil Celulosa Sódica , pectina, gelatina, poli-isobutileno, suspendidos en una película de polietileno. <u>Bolsa Recolectora</u> : Plástico PVC y EVA, panel poroso protector en su cara posterior
Características y Acciones del Producto	Protección de la Piel: las sustancias hidrocoloides absorben la humedad y tienen capacidad de regenerar la piel irritada. Adhesión seco a Húmedo: La barrera protectora de piel Stomahesive® se adhieren a la piel seca y absorben la humedad producida por la transpiración, manteniendo la piel integra y protegida. Puede permanecer en su sitio hasta por siete días. Multimedidas: recortable y adaptable a diferentes tamaños de estoma. Bolsa Transparente: Permite la observación del estoma y los drenajes. Bolsa Elaborada en Plástico Resistente a fugas: segura y cómoda para el paciente.

Usos	Ostomías Digestivas: Ileostomías, Colostomías.
Recomendaciones de Uso	Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación. • Medir el diámetro del estoma y valorar las condiciones de la piel circundante • Limpiar la piel circundante con agua limpia y jabón suave • Remover las sustancias grasosas de la piel circundante y secar perfectamente el área peristomal • Ampliar el orificio de la barrera protectora Stomahesive® según el tamaño del estoma. • Aplicar pasta Stomahesive® o polvo Stomahesive® según necesidad • Colocar la pinza de cierre en la parte distal de la bolsa
Presentaciones	Bolsa drenable transparente de una pieza pediátrica. Caja de 15 unidades, con pinza de cierre.

