



Película Protectora Sin Ardor Cavilon[®]

- Película líquida transparente, transpirable, sin ardor que forma una barrera de protección persistente sobre la piel.

CARACTERÍSTICAS

La Película Protectora Sin Ardor 3M Cavilon[®] es un excepcional protector barrera para la piel, de larga duración con amplio respaldo científico.

Su mecanismo de acción está dado por su alta afinidad a la epidermis, forma una película barrera protectora sobre la piel, ejerciendo una función PROTECTORA antihumedad frente a fluidos corporales (orina, heces, saliva, exudados entre otros).

La Película Protectora Sin Ardor 3M Cavilon[®] tiene 4 componentes esenciales:

- Terpolímero de acrilato: componente principal; material formador de película.
- Polifenilmetilsiloxano: plastificante.
- Hexametildisiloxano y Issooctano: solvente de base de silicona no irritante y de rápida evaporación.

Este producto no contiene ningún principio activo que dañe la piel.

BENEFICIOS

Única película que brinda protección cutánea contra fluidos corporales y adhesivos médicos hasta por 72 horas continuas.

No es citotóxica y permite una aplicación sin dolor (ardor) porque no contiene alcohol, puede interactuar con heridas sin interferir en la reparación cutánea.

Mayor versatilidad que otras películas: se puede usar en múltiples indicaciones clínicas.

La presentación en sachet es estéril de uso individual. La otra presentación en Spray es un rociador multidosis.

VENTAJAS

La Película Protectora sin Ardor Cavilon[®] de 3M se puede utilizar sobre piel dañada porque no produce dolor ni es citotóxica, esto se traduce en que no interviene con el proceso de cicatrización.

Película Protectora sin Ardor Cavilon[®] no afecta la adhesión de otros productos.

No se sale con exudado y líquidos.

No requiere ser removida para la siguiente aplicación.



Un excepcional protector barrera para la piel.

■ Instrucciones de aplicación

1. Limpie la zona afectada con un limpiador cutáneo de pH neutro o con agua y jabón. Si usa jabón, enjuague muy bien con agua tibia (no caliente). Seque sin restregar.

2. Aplique una capa uniforme de la Película Protectora sin Ardor Cavilon®. Deje secar por completo. Puede aplicar una segunda capa si lo desea, pero no exceda las dos capas. Para mejores resultados con el frasco rociador, sosténgalo a 10 a 12 cm de la piel.

3. Si lo aplica sobre pliegues cutáneos, sosténgalos hasta que el producto seque completamente.



■ Usos médicos específicos

USOS ESPECIFICOS	TECNICAS DE APLICACION
Protección del área perineal contra la orina y las heces (incontinencia).	Aplique a partir de la zona anal y avance hacia afuera sobre los glúteos o la zona de exposición. Para mejores resultados use el frasco rociador.
Protección de la piel periestomal contra la orina, heces o adhesivos.	Comience a aplicar en la piel cercana a la base del estoma y avance hacia fuera hasta abarcar toda la piel que debe ser cubierta con cinta o adhesivo para ostomías. Para mejores resultados use el frasco rociador, el hisopo de 1 ml.
Protección de la piel que rodea heridas quirúrgicas o lesiones contra exudados, secreciones y fricciones.	Comience la aplicación en el borde de la herida y avance hacia afuera sobre la zona de exposición. Para mejores resultados use el frasco rociador, el hisopo de 1 ml.
Protección de la piel alrededor de tubos, cánulas, sondas y otros dispositivos médicos contra el drenaje de fluidos corporales.	Aplique a partir del sitio por donde el dispositivo médico sale de la piel, y avance hacia fuera hasta abarcar toda la zona expuesta. Para mejores resultados use el frasco rociador o el hisopo de 1 ml.
Protección de la piel contra el daño causado por los adhesivos de uso médico.	Aplique la película en la piel que queda bajo el adhesivo; es necesario reaplicar la película cada vez que cambie el producto adhesivo.

Código Producto	Descripción	Tamaño / Unidad	Unidad de Venta	Unidades de Productos
3343E	Película protectora Sin Ardor Cavilon® Sachet	Hisopo 1 ml	Caja	25
3346E	Película protectora Sin Ardor Cavilon® Spray	Botella 28ml	Caja	12



División Médica
3M Chile S.A.
Santa Isabel 1001. Providencia
Santiago

atencionconsumidor@mmm.com
Tel. 600 300 3636
www.3M.cl