



Boletín Técnico

Producto: Recortadora quirúrgica de Vello Clipper con cabeza pivotante

Código del Producto: 9660L

Características:

Recortadora quirúrgica de vello con cabeza pivot giratoria única. La navaja 9660, con el exclusivo cabezal pivotante se ajusta a los contornos del cuerpo, por lo que proporciona una experiencia de recorte cómoda para los pacientes.

La posición de la navaja fuera de contacto con la piel minimiza cortes y rasguños, lo que ayuda a reducir el riesgo de Infección del Sitio Quirúrgico.

La batería de iones de litio mejora la eficiencia proporcionando un recorte de vello ininterrumpidamente por un tiempo más largo.

Sumergible en agua para una fácil limpieza.

Batería:

- Batería de iones de litio
- Antes del uso inicial: Cargar el recortador de vello por 4 horas
- Después de cada uso:
Recarga en 4 horas- Cuando esté cargada su piloto de luz será verde
Tiempo aproximado de uso: 160 minutos
Guarde el equipo en la posición apagado en su base cargadora enchufada

Limpieza:

- Con el recortador de vello en posición de apagado y luego de retirar la cuchilla empape la recortadora con agua.
- Puede ser sumergida en agua hasta 30 minutos, a una profundidad de hasta un metro.
- Asegúrese que el equipo este completamente seco antes de recargar o reutilizar

Navaja 9660:

- Exclusivo cabeza pivotante que se ajusta a los contornos del cuerpo
- Corta eficientemente todo tipo de cabello de cabeza y cuerpo, mojado o seco, en un solo paso
- Navaja recortadora de 1,25 inches de largo (31.75mm)

Navaja 9690

- Exclusivo cabeza pivotante se ajusta a los contornos del cuerpo
- Corta eficientemente todo tipo de cabello de cabeza y cuerpo, mojado o seco, en un solo paso
- Navaja recortadora de 1,75 inches de largo (44.45mm)
- Navaja recortadora para cirugías neurológicas y traumatológicas
- Elimina el vello corporal pesado, tipo grueso, húmedo, seco, grueso y delgado.

Baja Tasa de Cortes

- La recortadora de vello Clipper 9661L 3M™ trabaja con la navaja recortadora fuera de contacto de la piel minimizando cortes y rasguños.

Utilización:

Cambiando Navajas



Como colocar la hoja

Retire la parte de atrás del empaque de la navaja, sostenga el cuerpo de la recortadora en un ángulo de 45 grados y ejerza presión sobre la navaja de un solo uso 9660.

Nota: un chasquido audible indica que la navaja se ajustó de forma segura.



Como remover la hoja

Utilice su pulgar para empujar la navaja usada al recipiente de corte punzantes **Nota: Siempre use una navaja nueva para cada paciente para evitar así, contaminación cruzada entre ellos mismos**

Recortando el vello



Empuje

Coloque la recortadora sobre la superficie de la piel como un lápiz, con la hoja plana o en un ángulo pequeño. Empújela suavemente hacia adelante, contra la dirección en que crece el cabello o el vello del paciente.

NOTA: No presione demasiado al empujar la recortadora sobre la piel del paciente.



Tire

Coloque la recortadora sobre la superficie de la piel con la hoja plana o en un ángulo pequeño y deslícela suavemente en dirección a usted.

NOTA: No recorte con la navaja en forma transversal sobre la piel del paciente. La recortadora no cortará bien el cabello o el vello si se usa en forma incorrecta

LIMPIEZA



Sumerja2
Con el recortador de vello en posición de “apagado” y luego de retirar la navaja empape el recortador en agua. Asegúrese que el equipo este completamente seco antes de recargar o reutilizar.
NOTA: Si elige enjuagar o sumergir, estos procesos deben realizarse antes de proceder a la desinfección



O Enjuague
Con el recortador de vello en posición de “apagado” y luego de retirar la navaja enjuague el cuerpo del recortador bajo agua corriente. Asegúrese que el recortador este completamente seco antes de recargar o de usar nuevamente.



Luego seque el equipo con un paño seco
Con el recortador de vello en posición de “apagado” y luego de haber retirado la navaja y limpiado la misma, puede proceder a frotar el equipo con un paño empapado con solución desinfectante



Cargando
Antes del uso inicial, cargue el recortador de vello por 4 horas. Después de cada uso, guarde el equipo en la posición “apagado” en su base cargadora enchufada. La recortadora 9661L proporciona aproximadamente 160 minutos de tiempo de uso con una carga de 4 horas. Cuando está cargada su piloto de luz será verde. Cuando la batería necesita recargarse, y durante el proceso de recarga, la luz parpadeará en color ámbar.
Consulte el prospecto para obtener advertencias e instrucciones más detalladas.

Número de Catálogo	Descripción de Producto	Unidades por Caja	Cajas por case
9660	Hoja 9660 para Recortadora Quirúrgica de Vello Clipper de 3M™	50	1
9661L	Recortadora Quirúrgica de Vello Clipper de 3M™ con cabeza pivotante	1	1
9690	Hoja 9690 para Recortadora Quirúrgica de Vello Clipper de 3M™	20	1