



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA

SPEEDICATH



Coloplast

SPEEDICATH

Catéter o Sonda Prelubricada



- **Descripción**

Es el primer catéter hidrofílico, con lubricación ya activada, estéril, de uso único y listo para usar, debido a que se presenta con solución salina incorporada en su envase.

- **Composición del Producto**

Poliuretano (PU).

Lubricación: Solución Salina 0,9% (SSN0,9%)

Cobertura hidrófoba que facilita la adhesión de la solución salina al cuerpo del catéter.

Envase: aluminio y polímeros.

- **Características y Acciones del Producto**

Lista para usar, se presenta en el envase ya inmersa en solución salina estéril y lubricada



La superficie lubricada es sumamente homogénea reduciendo la fricción al máximo y protegiendo la uretra de microtraumas



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA


SPEEDICATH



Coloplast

Los ojos (orificios) del catéter tienen forma radial y también están lubricados

El material de fabricación del catéter Poliuretano (PU) es algo más rígido que el PVC y que la Silicona, lo que facilita el manejo y la introducción del catéter, sobre todo en los hombres

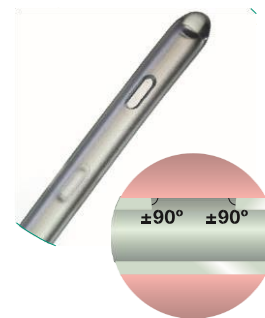

El color del conector identifica el calibre del catéter

Debido a las estrías que posee el catéter se facilita la sujeción, así como también se ve facilitada por el hecho de dejar libre de lubricación los cinco centímetros más cercanos al conector

Se conserva a temperatura ambiente, tolerando temperaturas extremas si no se superan las 24 horas.



Esterilizada por radiación beta

• Indicaciones

- o Disfunción Vesical aguda y crónica
- o Incontinencia Urinaria
- o Retención Urinaria

• Instrucciones de Uso

HOMBRE

1. Comenzar por lavar las manos con agua y jabón.
2. Abrir el envase a la manera tradicional. O para facilitar este paso, el envase de Speedicath presenta un punto adhesivo que puede fijarse a

 Ordenes & Suministros	FICHA TÉCNICA SPEEDICATH	 Coloplast
--	---	--

una superficie lisa y seca para luego tirar del anillo y hacer más simple el proceso para personas que presentan destreza manual reducida.

3. Higienice la zona genital, separando el prepucio.
4. Sacar la sonda del envase sujetándola por el conector o la zona próxima a él que no está lubricada para facilitar la sujeción.
5. Elevar el pene de forma tal que la uretra quede derecha para facilitar el paso de la sonda por la uretra.
6. Introduzca la sonda por la uretra hasta la vejiga hasta que comience a salir la orina.
7. Cuando deje de salir la orina, retirar la sonda lentamente.
8. Desechar la sonda en el cesto de basura y nunca en el inodoro.

MUJER

1. Comenzar por lavar las manos con agua y jabón.
2. Abrir el envase a la manera tradicional. O para facilitar este paso, el envase de Speedicath presenta un punto adhesivo que puede fijarse a una superficie lisa y seca para luego tirar del anillo y hacer más simple el proceso para personas que presentan destreza manual reducida.
3. Higienice la zona genital, siempre de adelante hacia atrás (en dirección de la vagina hacia el ano) para evitar que las bacterias ingresen en el tracto urinario.
4. Sacar la sonda del envase sujetándola por el conector o la zona próxima a él que no está lubricada para facilitar la sujeción.
5. Identificar la uretra. Esto puede ser un poco complicado en un 1er momento, se recomienda utilizar un espejo como ayuda. Es importante

 Ordenes & Suministros	FICHA TÉCNICA SPEEDICATH	 Coloplast
--	---	--

tener en cuenta que el primer orificio es la uretra, luego la vagina y por último el ano.

6. Introduzca la sonda por la uretra hasta la vejiga hasta que comience a salir la orina. Si por error, se introdujo el catéter en la vagina, habrá que descartar la sonda y comenzar nuevamente el sondaje para evitar la migración de bacterias al tracto urinario.
7. Cuando deje de salir la orina, retirar la sonda lentamente.
8. Desechar la sonda en el cesto de basura y nunca en el inodoro.

- **Presentaciones**

- Tamaños:

- ★★ Masculino: CH 08, 10, 12, 14, 16, 18. Longitud 40 cm.
- ★★ Femenino: CH 06, 08, 10, 12, 14, 16. Longitud 20 cm.
- ★★ Pediátrico: CH 06, 08, 10. Longitud 20 cm.
- ★★ Adolescente: CH 06, 08, 10, 12. Longitud 30 cm.

- Unidad o Caja por 30 unidades

- **Almacenamiento**

- En lugar fresco, seco y limpio
- Protegido de la luz y con humedad relativa menor a 60%
- Temperatura entre 5 a 25 °C

- **Datos de Interés General**

- Fabricante: COLOPLAST A/S
- Importador: ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.

 Ordenes & Suministros	FICHA TÉCNICA SPEEDICATH	 Coloplast
--	---	--

- País origen: Hungría, Francia, China, Estados Unidos
- Registro Sanitario Invima No. 2022DM-0008213-R1 vigente hasta 10/05/32
- Tipo de Dispositivo: Invasivo
- Clasificación de Riesgo: III
- Vida útil: 2 años