

Fixomull® stretch

Venda no tejida de fijación, elástica y adhesiva.

Descripción

Venda no tejida de poliéster blanca, elasticada a lo ancho, recubierta por una cara por un adhesivo acrílico hipoalergénico, indicada para fijación. El área adhesiva está completamente cubierta de papel impreso cuadrulado siliconado.

Características

- Buen poder adhesivo inicial y permanente.
- Bien tolerado por la piel, incluso en pacientes con piel sensible.
- Se estira transversalmente, se ajusta bien en zonas contorneadas del cuerpo.
- Previene la constricción, congestión y alteración de la circulación de la sangre.
- Radiotransparente.
- Flexible.
- Fácil manejo.
- Permeable al aire y al vapor de agua.
- Vigencia de 5 años.
- Libre de látex.

Esterilización

No estéril.

Almacenamiento

En condiciones secas, alejado de la luz y el calor.

Recomendaciones de uso

Utilizado para fijación de apósitos en heridas, particularmente en zonas de alta movilidad y también para fijación segura de tubos, catéteres, dispositivos e instrumentos de medición.

Composición

- Tela: Poliéster, no tejido (Área peso: 37 - 54 g/m²)
- Masa adhesiva: Poliacrilato (Cantidad: 33+/-3 g/m²)
- Papel de publicación: Papel cuadrulado siliconado (área peso: 87 - 95 g/m²).

Presentaciones


Código	Descripción	Presentación Producto
02036-00000	FIXOMULL STRETCH Venda de fijación adhesiva elástica 5 cm x 10 m	Caja x 1 Rollo
02037-00000	FIXOMULL STRETCH Venda de fijación adhesiva elástica 10 cm x 10 m	Caja x 1 Rollo
02038-00000	FIXOMULL STRETCH Venda de fijación adhesiva elástica 15 cm x 10 m	Caja x 1 Rollo

Procedencia

Alemania


Certificaciones de calidad

ISO 9001 - ISO 13485 / CE

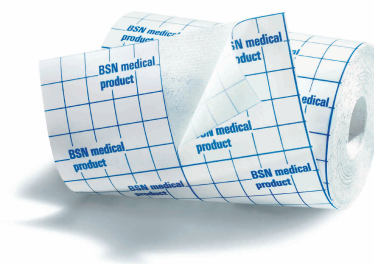


Fixomull®


Paso a Paso para una correcta aplicación de Fixomull.

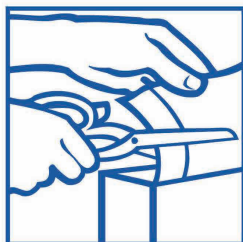


Tire el rollo y corte la lámina del tamaño deseado, ayudándose con las líneas guías del papel posterior.

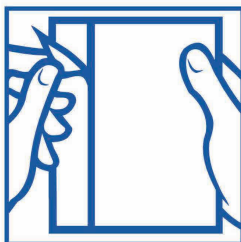

Remover la primera mitad de la lámina de papel protectora posterior.

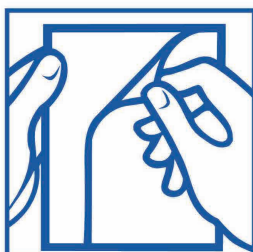

Aplice en la zona de fijación elegida, asegúrese de que la piel se encuentre limpia y seca. Remueva el resto del papel protector.

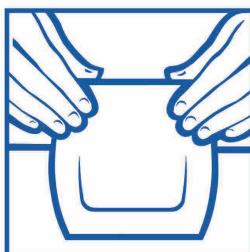

Alise la película con las yemas de los dedos, para asegurar su fijación.

