


FICHA TECNICA
BOLSAS OSTOMIAS DRENABLES PARA NIÑOS TRANSPARENTE
LITTLE ONES®

PRODUCTO	
Nombre	Bolsa de ostomía drenable transparente para niños
Nombre Comercial	Bolsa Drenable para niños Little Ones®
Descripción	Bolsa recolectora de fluidos abierta en su parte distal, protegida en su cara posterior por un panel de plástico protector. La bolsa está provista de un aro con acople placa Little Ones®.
Marca	ConvaTec
Fabricante	ConvaTec Limited – Reino Unido
Composición del Producto	Bolsa Recolectora drenable elaborada en un plástico suave (Five Ply Film), cubierta en su parte anterior y posterior con un refuerzo en Polietileno y EMA. Está provista de un aro Little Ones con acople para placa Little Ones.
Características y Acciones del Producto	Protección de la Piel: La bolsa esta cubierta en su parte posterior por un panel poroso plástico que absorbe la humedad e impide el contacto del plástico con la piel del paciente evitando así irritaciones de la piel. Mantiene la piel seca y protegida. Bolsa transparente: Permite la visualización de su contenido y del estoma. Bolsa Elaborada en Plástico resistente a fugas: Evita que los gases salgan al exterior proporcionando así mayor seguridad y comodidad al paciente. Ajuste perfecto: El aro Little Ones® permite que se ajuste perfectamente al aro del mismo diámetro de las barreras Little Ones®, minimizando los riesgos de desacoples accidentales. Comodidad: Por ser una bolsa drenable le ofrece comodidad e higiene al paciente.
Usos	Ostomías Digestivas: Ileostomías y Colostomías .Y cualquier sistema de drenaje que requiera protección de la piel ej. Esofagectomía.
Recomendaciones de Uso	Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación. ❖ Para acoplar la bolsa a la barrera, comenzar acoplando los aros por los bordes inferiores. Asegúrese que queden bien acoplados. ❖ Deje la bolsa con una pequeña cantidad de aire antes de acoplarla a la barrera para que pueda bajar libremente el efluente. ❖ Si la bolsa se perfora por alguna razón desecharla y usar una nueva. Promedio de duración 5 días . ❖ Colocar la pinza de cierre en la parte distal de la bolsa. ❖ Si se perfora por alguna razón la bolsa hay que desecharla.
Presentaciones:	Bolsas drenables transparente. Medidas de Aro : Diámetros de 32mm. – 45mm. Caja con 10 unidades c/u.

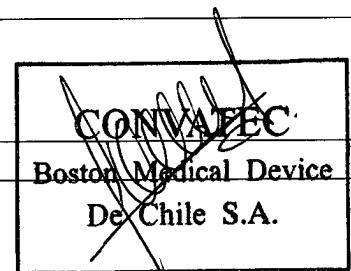

**FORMATO DE CALIFICACION
BOLSAS OSTOMIAS DRENABLES TRANSPARENTE PARA NIÑOS
LITTLE ONES**

(Calificación de 1 a 5) 5=Muy bueno 4=Bueno 3=Regular 2=Deficiente 1= Malo

PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LA INSTITUCIÓN

Concepto Técnico					
Facilidad de Aplicación	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Sistema de acople a la barrera de piel (broches de contención)	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Capacidad de Protección de la Piel	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Resistencia a los Drenajes	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Capacidad de la bolsa	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Facilidad de Remoción	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Reducción de la Frecuencia de Cambios de Dispositivo	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Control del olor	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Facilidad de Drenaje de la Bolsa	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Seguridad del Sistema de Cierre	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Resistencia de la Pinza de Cierre	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Comodidad para el Paciente	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Empaque	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Presentación	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Calidad	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Servicio Post-Venta: Asesoría educativa y Servicio al Cliente	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Otros:					
Observaciones:					
Calificación:					
Nombre del Calificador:					
Cargo:					
Fecha:					
Firma:					