

Soluprep

Esponjas Con Solución

Antiséptica Coloreada

Ficha Técnica



Descripción

Esponjas de poliuretano flexible impregnadas con solución antiséptica coloreada (rosa transparente) de Gluconato de Clorhexidina al 2% p/v y Alcohol Isopropílico al 70% v/v. Contenidas dentro de envase de aluminio. Antiséptico de acción rápida, efecto residual, amplio espectro.

Ayuda a reducir el número de bacterias presentes en la piel para disminuir el riesgo de infección del sitio quirúrgico. Antiséptico efectivo contra las bacterias gram positivas, gram negativas, hongos y virus. Fácil de usar.

Presentación del producto: 02 esponjas 50 ml solución permite la asepsia de **superficies extensas de la piel (61x61 cm)**

Presentación del producto: 04 esponjas 97 ml solución permite la asepsia de superficies **extensas de la piel (86x86 cm)**

Aprobado por el ISP (Reg. ISP N°:F-20893/14)

Usos

Preparación de la piel del paciente previo a un procedimiento quirúrgico.

Preparación de la piel del paciente previo a un procedimiento invasivo.

Para ser utilizado en Quirófano, Obstetricia, Servicios de Urgencia y Unidades de Cuidado Intensivo.

Empaque u otras referencias

Código Corto	Descripción	Medida	Empaque
10027	Soluprep 2 Esponjas con Solución Antiséptica Coloreada	50 ml	30 Unidades/Caja
10025	Soluprep 4 Esponjas con Solución Antiséptica Coloreada	97 ml	30 Unidades/Caja

Beneficios, precauciones

No se recomienda su uso en menores de 2 meses.

Evitar el contacto con ojos, interior de los oídos, mucosas y meninges.

No utilizar en personas alérgicas al gluconato de clorhexidina o al alcohol isopropílico.

No usar en piel dañada, usar sobre piel intacta

Descontinuar la utilización en casos de sensibilidad de la piel.

Producto inflamable, mantener alejado de fuentes de calor.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Importante:

Permitir que la solución antiséptica aplicada sobre la piel seque al aire completamente, antes de colocar los campos quirúrgicos y de utilizar fuentes de ignición (electro cauterización, laser). Mínimo de 3 minutos en la piel sin vello o cabello; hasta 1 hora sobre el vello o cabello. No secar el antiséptico con compresa después de la aplicación.

Posterior a la preparación de la piel, retirar todo material saturado con solución antiséptica. Evitar que la solución se acumule en un lugar. Verificar debajo del paciente, bajo los brazos, entre los muslos y en el ombligo.

Nota:

Producto para un único uso. Después de utilizar, deseche el envase incluyendo todas las esponjas que no fueron usadas.

El uso del producto debe cumplir con la indicación del fabricante. 3M no se hace responsable por daños derivados del uso indebido del producto.

Almacenamiento y Vida útil

Almacenamiento a no más de 25°C, alejado de fuentes de calor y en ambiente fresco.

Caducidad en la etiqueta: 24 meses desde su fabricación.